



Η μύτη παίζει καθοριστικό ρόλο στη θέρμανση και στην υγραποίηση του εισπνεόμενου αέρα και στο φιλτράρισμα του αέρα από μικρά σωματίδια, παρέχοντας προστασία στην κατώτερη αναπνευστική οδό από σκόνη, ερεθισμούς και ξηρότητα.

1. Τι είναι το OTRIMER και ποια είναι η χρήση του

Το ρικό σπαστικό **OTRIMER** είναι ένα 100% φυσικό ισότομο διάλυμα θαλασσινού νερού χωρίς συντηρητικά. Επιπλέον, το **OTRIMER** με **Alco Vero** περιέχει φυσική σκόνη του φυτού **Alco Vero**, γνωστή για τις καταπραυντικές και ενυδατικές της ιδιότητες.

Το **OTRIMER** συνιστάται για να:

- Καθαρίζει τις ρυτίδες καλύτερες σε περίπτωση βουλωμένης μύτης, για παράδειγμα σε περίπτωση κρυολογήματος ή αλλεργίας, απομακρύνοντας την περίσσεια βλέννας ή τα αλλεργιογόνα σωματίδια, όπως τη σκόνη ή τη γύλη.
- Ενυδατώνει το ρικό βλεννογόνο, όταν είναι ξηρό ή ερεθισμένος σε περίπτωση ελαφρών ρινικών ερεθισμών ή ξεσπασί κυψελής υγρασίας (για παράδειγμα λόγω βέρμασης) / κλιματισμού των δωμάτων, υψηλού υψομέτρου, αεροπορικών ταξιδιών).
- Ρευστοποιεί και να διαλύει τις ρινικές εκκρίσεις βοηθώντας στην απομάκρυνσή τους.
- Επιπλέον, το ρικό σπαστικό **Otrimer** με **Alco Vero** καταπραύνει τους ερεθισμένους ρινικούς αεραγωγούς.

Το ρικό σπαστικό **Otrimer** είναι κατάλληλο για καθημερινό καθαρισμό της μύτης.

2. Ποιο OTRIMER να επιλέξω?

- Το **OTITIS MEDIA (ήπιος φεκασμός)** είναι εύκολο σχεδιασμένο για βρέφη και μικρά παιδιά. Το σχήμα του ρινικού ακροφυσίου προσαρμόζεται στη μύτη παιδιών μέχρι 6 ετών. Επίσης, είναι κατάλληλο και για ενήλικες. Ο ήπιος φεκασμός του επιτρέπει την απλή και προσεκτική έκπλυση της βουλωμένης μύτης και της μύτης με καθαρότητα. Το σπρέι αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της υγρασίας των ρινικών αεραγωγών.
- Το **OTITIMER με Aloe Vera (μέτριος φεκασμός)** είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών. Το ρινικό του ακροφύσιο προσαρμόζεται στο σχήμα της μύτης μεγαλύτερων παιδιών (άνω των 6 ετών) και ενήλικων. Η ηπίωση του φεκασμού επιτρέπει μια απλή και προσεκτική έκπλυση της βουλωμένης μύτης και της μύτης με καθαρότητα. Το σπρέι αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της υγρασίας των ρινικών αεραγωγών.
- Το **OTITIMER (δυνατός φεκασμός)** είναι κατάλληλο για ενήλικες μόνο και εφαρμόζεται εύκολα για έκπλυση της μύτης σε περίπτωση έντονης ρινικής συμφόρησης. Το ρινικό σπρέι **OTITIMER (δυνατός φεκασμός)** προσφέρει 4 φορές πιο δυνατό φεκασμό από το **OTITIMER με Aloe Vera** (μέτριος φεκασμός).

3. Πριν χρησιμοποιήσετε το OTRIMER

Προσοχή: Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης.
Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο από τα συστατικά (βλ. λίστα συστατικών).

 Ην χρησιμοποιήσετε το προϊόν εάν έχει υποστεί φθορά ή είναι σπασμένο.

Μην βάζετε τη συσκευασία στο φούρνο μικροκυμάτων.

Πριν χρησιμοποιήσετε το **OTRIMER** μετά από μία χειρουργική επέμβαση ή μία πληγή στην μύτη συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Χάρη στις απολυμαντικές του ιδιότητες, το **OTRIMER** συνιστάται να χρησιμοποιείται πρώτο στην χειρουργική και κάποιος άλλο τοπικό ρινικό προϊόν (π.χ. να κρυστάλλωμα ή αλλεργική ρινίδα).

Το **OTRIMER** μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Πριν τη χρήση, ωθήστε το γυαρό ή το φαρμακείο σας.

4. Πώς χρησιμοποιείται το OTRIMER

Η συνήθης συχνότητα χρήσης είναι 1 έως 2 ψεκασμοί την ημέρα σε κάθε ρουθούνι.

Εάν είναι απαραίτητο, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο συχνά απαιτείται.

- Το **OTRIMER** kids (ήπιος ψεκασμός) είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Οστόσο, συνιστάται ιατρική συμβουλή πριν τη χρήση του σε βρέφη μικρότερα των 2 εβδωδών. Για παιδιά κάτω των 11 ετών, το **OTRIMER** kids συνιστάται να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
 - Το **OTRIMER** με Aloe Vera (μέτριος ψεκασμός) είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών. Για παιδιά κάτω των 11 ετών, το **OTRIMER** με Aloe Vera συνιστάται να χρησιμοποιείται υπό επίβλεψη ενήλικα.
 - Το **OTRIMER** (δυνατός ψεκασμός) είναι κατάλληλο για ενήλικες μόνο και εφαρμόζεται ειδικά για έκλυση της μύτης σε περίπτωση έντονης ρινικής συμφόρησης.
- Στα ηλικιακά άτομα όη σε άτομα που αδυνατούν να κάνουν χρήση του προϊόντος μόνο του, η χρήση του προϊόντος μπορεί να απαιτεί βοήθεια από έναν ενήλικα.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, το ρινικό σπρέι Otrimer είναι καλά ανεκτό.
- Για λόγους υγιεινής και για να αποφευχθεί μολύνση, το ρινικό σπρέι θα πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα μόνο άτομο.

OTRIMER kids (ήπιος ψεκασμός) και OTRIMER (δυνατός ψεκασμός)

Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης θεωρείται συνήθως από 17 °C έως 30 °C.

OTRIMER με Aloe Vera (μέτριος ψεκασμός)
Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης θεωρείται συνήθως από 17 °C
έως 25 °C.

1. Φυσήστε τη μία, εάν είναι απαραίτητο.
2. Πιάστε τη μετά τη χρήση του **OTRIMER**, πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό ο καπάκι του σπρέι.
4. Εάν το σπρέι δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιήστε το ψεκάζοντας μία φορά στον αέρα πριν τη χρήση. Σε περίπτωση που το κάπρι είναι βουλωμένο, καθαρίστε το βάζοντας το κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό και ακουμπήστε το με ένα καθαρό πανί.
5. **Για παιδιά που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν μόνοι τους:**
Βάλετε το παιδί να झαπλώσει ανάσκελα με το κεφάλι του γυρισμένο στη μία μεριά, ώστε το υγρό να διοχετευτεί ευκολότερα (**Εικόνα 1**).
Για παιδιά και ενήλικες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν μόνοι τους:
Γέρνετε το κεφάλι προς τα εμπρός, με κλίση προς τη μία πλευρά, ώστε να είναι σε όσο πιο οριζόντια θέση είναι δυνατόν (**Εικόνα 2**).
6. Εισάγετε το ακροφύσιο στο άνω ρουθούνι και ψεκάξτε για λίγο (2 – 3 δευτερόλεπτα).
7. Στη συνέχεια, γέρνετε το κεφάλι από την άλλη πλευρά και επαναλαμβάνετε στο άλλο ρουθούνι.


8.

Αφήστε το προϊόν να δράσει για λίγα δευτερόλεπτα. Μη φυσήξετε τη μύτη σας για αυτά τα δευτερόλεπτα αλλά σκουπίστε τη, εάν είναι αναγκαίο.
9.

Στη συνέχεια, φυσήξτε τη μύτη εάν είναι απαραίτητο.
10.

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε το ακροφύσιο βάζοντάς το κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό, σκουπίστε το με ένα καθαρό πανί και τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό καπάκι.
11.

Καθαρίστε το ακροφύσιο με ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιήσετε χημικές ουσίες, υγρά καθαριστικά πιάτων ή απολυμαντικά. Μη βάζετε τη συσκευασία στο φούρνο μικροκυμάτων.

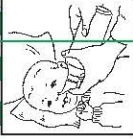

Εικόνα 1



Εικόνα 2

5. Για την ασφάλειά σας

Προειδοποιήσεις

Περιεχόμενο υπό πίεση:  Διατηρήστε το μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες πάνω από 50°C. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί.
Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
Να μην τρυπηθεί ή καεί, ακόμη και μετά τη χρήση.
Το ακροφύσιο του ρινικού σπρέι **OTRIMER kids** (ήπιος ψεκασμός) είναι σχεδιασμένο για παιδιά ώστε να εφαρμόζει στο φυσικό σχήμα των ρουθινιών και χάρη στο δακτύλιο ασφάλειας αποφεύγεται η εισαγωγή του βαθιά μέσα στη μύτη και ο τραυματισμός της μύτης των παιδιών.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

6. Πώς να διατηρήσετε το OTRIMER

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία.

 Το **OTRIMER kids** (ήπιος ψεκασμός) και το **OTRIMER** (δυνατός ψεκασμός) διατηρούνται σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 30°C.

 Το **OTRIMER Aloe Vera** (μέτριος ψεκασμός) διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 25°C.

Μην το καταψύχετε.

7. Άλλες πληροφορίες

Συστατικά: θαλασσινό νερό και καθαρό νερό. Χωρίς συντηρητικά. Επιπλέον, το **OTRIMER** με Aloe Vera περιέχει επιπλέον Aloe Vera σε σκόνη.

Το αέριο προστίθεται ως αδρανές προωθητικό αέριο στην υπό πίεση συσκευασία. Το προωθητικό αέριο δεν έρχεται σε επαφή με το διάλυμα.
Τα ρινικά σπρέι **OTRIMER** διατίθενται σε συσκευασίες των 100ml.

 Haleon CH SARL,
Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Ελβετία

 Haleon Medical Devices, Clocherane, Youghal
Road, Dungarvan, Co.Waterford, X35 Y983,
Ireland



0080044144381 (γραμμή χωρίς χρέωση)

 mystory.gr@haleon.com

 www.otrimer.gr



Διανέμεται από:

Haleon Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ.
Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι

CE 0459

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2021

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην Haleon. ©2023 Haleon ή δικαιούταρχος.

ANA90HAL042A