

# RHINOMER baby

Rhinomer Baby Aspirador Nasal para recién nacidos, bebés y niños.

La aspiración nasal está recomendada siempre que tu bebé tenga la nariz tapada, tan a menudo como sea necesario, especialmente antes de su alimentación y antes de que tu bebé vaya a dormir. El producto ha sido diseñado para despejar la nariz de tu bebé, eliminando suavemente las secreciones nasales. Cada boquilla contiene un filtro absorbente para retener la mucosidad. Su forma ergonómica y tacto suave aseguran un buen manejo. Rhinomer Baby Aspirador Nasal es delicado/ suave con la nariz del niño gracias a su boquilla blanda que está diseñada para que se ajuste a la nariz del niño. La fácil e higiénica utilización de Rhinomer Baby Aspirador Nasal ayuda a tu bebé a respirar, comer, dormir con normalidad y sentirse mejor de nuevo. La eliminación de la secreción nasal ayuda a prevenir complicaciones adicionales como infecciones del oído (otitis), infecciones sinusales (sinusitis) o tos. También mejora la calidad del sueño del bebé en caso de resfriado común. ¿Quién debería beneficiarse del uso de Rhinomer Baby Aspirador Nasal? Este producto está indicado en recién nacidos, bebés y niños, incapaces de sonarse la nariz por sí mismos. Sin embargo, consulte con su médico antes de usarlo en un bebé recién nacido. ¿Quién debería usar Rhinomer Baby Aspirador Nasal? Por razones de seguridad, Rhinomer Baby Aspirador Nasal debe ser utilizado por los padres o el cuidador, quienes deben ser capaces de leer y entender la información incluida en este envase, distinguir la boca, la nariz, la oreja y los ojos, y entender conceptos básicos de higiene. Junto a Rhinomer Baby Aspirador Nasal se incluyen dos recambios blandos desechables. Cada uno contiene 1 filtro absorbente que asegura la higiene bloqueando el moco en el filtro. Los recambios desechables también están disponibles en envases de 10 y 20 unidades.

Por razones higiénicas y para evitar contaminación, asegúrese de que los diversos componentes estén colocados correctamente y no coloque un recambio usado.

1. Lávese las manos cuidadosamente antes de utilizar Rhinomer Baby Aspirador Nasal.
2. Coloque un recambio blando (A) en el cuerpo central del aspirador (B).

No coloque un recambio usado.


3. Coloque la boquilla de aspiración (C) entre sus labios (del padre, cuidador) e inserte el extremo del recambio (A) en uno de los orificios nasales del bebé. Para mejorar el rendimiento del aspirador, se recomienda mantener la otra fosa nasal cerrada durante la aspiración.

4. Aspire suavemente, poco a poco y de forma regular, por la boquilla de aspiración (C).
5. Si el recambio se llena durante una aspiración, no lo vuelva a usar.

6. Repetir la operación en el otro orificio nasal.
7. Insuflaciones de limpieza: Retire y deseché la boquilla usada (A). Limpie la superficie exterior de la boquilla de aspiración (C) con un pañuelo de papel limpio humedecido con agua tibia. Seque la superficie exterior de la boquilla con un pañuelo. SOLO en caso de moco o secreción dentro del cuerpo central: separar el cuerpo central (B) del tubo de plástico. Enjuague el cuerpo central (B) con agua tibia y deje que se seque antes de volver a colocar el tubo. Lávese las manos cuidadosamente. Si tiene alguna duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico o farmacéutico.

¡Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.  
Use solo Recambios de Rhinomer Baby con el Aspirador Nasal Rhinomer Baby.

Paso 2

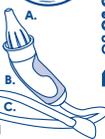

Consulte con su médico antes de usar Rhinomer Baby Aspirador Nasal después de una lesión o una cirugía nasal reciente. No utilice este producto en caso de alergia a cualquiera de los materiales que componen el producto (ver composición). No utilice un producto roto o dañado, un recambio usado o dañado o un recambio al que le falta el filtro o éste esté dañado. El producto debe usarse en un bebé en reposo. La boquilla de aspiración debe mantenerse firmemente sujeta entre los labios. Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el uso de Rhinomer Baby Aspirador Nasal debe comunicarse al contacto local del fabricante y al Sistema Español de Vigilancia de Productos Sanitarios: <https://notificaciones.es/entidades/notifraga/notifica/iniciada>. Ayuda a tu bebé a respirar mejor utilizando el método Rhinomer Baby. 2 sencillos pasos para despejar las fosas nasales de tu bebé y ayudar a restablecer su respiración.

Paso 1: Limpieza nasal con Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave O.

Paso 2: Aspiración nasal con Rhinomer Baby Aspirador Nasal.

Condiciones de almacenamiento:

- Almacenar entre 0 °C y 30 °C.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad que se muestra en el envase.
- Conservar en el envase original.
- Por favor, deseché el producto de acuerdo con sus requisitos locales y siempre tenga en cuenta el medio ambiente.

- No utilizar si el producto está roto o dañado.

Precaución: Antes de usar el producto, lea cuidadosamente la información incluida en el envase.

Un solo uso: los recambios son de un solo uso. Las otras partes del aspirador se pueden reutilizar.

Composiciones: Aspirador nasal: polipropileno, estireno etileno-butileno estireno, silicona. Recambios: PVC y espuma de melamina.

Contenido: 1 aspirador nasal (el cuerpo del aspirador nasal (parte central, parte B) con un tubo flexible y 1 boquilla de aspiración (parte C)) y 2 recambios blandos desechables (parte A).

Haleon CH SARI, Route de Fâraz, 1977 Prangins, Suiza

EC REP Haleon Medical Devices, Clocherans, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, X55 1Y93, Irlanda

CN:152643.4

8 470001526434 >

05ETZ7-ES 000580



Paso 1



Paso 2



MD Fecha: junio 2023

www.rhinomer.es

Marcas propiedad del, o licenciadas al, grupo de compañías Haleon.

©2023 Haleon o licenciantes.

05ETZ7-ES 000580