



Spray nasal

Solución de agua de mar isotónica y estéril



Lea este folleto detenidamente antes de utilizar Rhinomer Baby. Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico o farmacéutico.

Limpia de forma natural, ayuda en caso de congestión nasal e hidrata.

Para bebés a partir de los 15 días.

La higiene nasal en el bebé:

Las fosas nasales tienen una función esencial como filtro protector del aire inspirado. El aire inspirado no es aire puro, ya que contiene polvo, alérgenos, bacterias, virus, humo, etc. Todas estas impurezas pueden producir en el bebé y en el adulto, desde irritaciones nasales a resfriados, alergias o rinosinusitis.

La higiene nasal de tu bebé es muy importante, debido a que sus mecanismos de defensa son aún inmaduros. Por ello los bebés son más susceptibles de tener infecciones y resfriados.

La mucosidad presente de forma natural en los conductos nasales es necesaria pues actúa como lubricante y filtro del aire. Sin embargo cuando el bebé sufre una infección nasal, se produce una mayor mucosidad que acaba dificultando su respiración.

Es importante saber que los bebés de menos de seis meses, no saben respirar por la boca y cuando la mucosidad obstruye sus fosas nasales, su respiración se vuelve difícil, lloran y esto dificulta su alimentación y su sueño. Por este motivo es muy importante mantener sus fosas nasales limpias mediante la realización regular de lavados nasales con agua de mar.

1. Qué es Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave O:

Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave O, es un spray nasal muy suave a base de agua de mar natural 100%, indicado para la higiene nasal de los bebés a partir de los 15 días de vida.

Su uso diario contribuye a:

1. Reblandecer la mucosidad facilitando el sonado o el uso de un aspirador nasal.
2. Restablecer la respiración nasal en caso de nariz tapada.
3. Proteger contra el resfriado y otras infecciones en el sistema respiratorio superior.
Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave O ha sido especialmente diseñado para su uso en la delicada nariz del bebé.

Una solución de agua de mar natural con todos los beneficios del agua del mar:

El agua de mar Rhinomer se ha obtenido directamente del mar. Tras su obtención, a través de un innovador sistema de filtraje se reduce su contenido en sal para hacerla tolerable por la mucosa nasal. De esta forma se consigue una solución fisiológica. Y al no estar diluida, el agua de mar Rhinomer conserva todos los minerales y oligoelementos del mar. El uso de Rhinomer ayuda a prevenir el riesgo de infecciones secundarias y otitis.

Un envase innovador:

Rhinomer se presenta en un envase innovador que no precisa de gas propelente ni el uso de conservantes, lo que permite que el agua de mar conserve toda su naturalidad a temperatura ambiente.

Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave O está adaptado para los bebés gracias a su fina nebulización, su aplicador con tope de seguridad, especialmente diseñado para la nariz de los más pequeños.

- Nebulización extra suave

- Evita que los dedos se deslicen

- Con tope de seguridad (evita que el aplicador entre excesivamente en la nariz de tu bebé)

- Aplicador suave

- Seguro y fácil de usar (sin gas propelente)



2. Para qué se utiliza Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave O:

2.1 En caso de mucosidad, resfriado y congestión nasal:

- Reblandece la mucosidad facilitando el sonado o el uso de un aspirador nasal. La eliminación de la mucosidad ayuda a prevenir la ocurrencia de complicaciones del tracto respiratorio superior (otitis, bronquiolitis), que son muy comunes en los bebés.
- Ayuda de forma natural en caso de congestión nasal por resfriado.

2.2 Higiene diaria y prevención activa:

limpia y humedece las fosas nasales de tu bebé ayudando a eliminar polvo, alérgenos, contaminantes y patógenos (virus y bacterias). Su uso regular (incluso cuando el pequeño no presenta congestión ni mucosidad) ayuda a prevenir la ocurrencia de complicaciones del tracto respiratorio superior (otitis, bronquiolitis).

3. Antes de usar Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave O:



No use el producto si está roto o dañado.
No lo utilice si el dispositivo ha perdido su aspecto original.

4. Cómo usar Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave O:

Rhinomer puede utilizarse con la frecuencia que se necesite. Rhinomer Baby lo pueden usar los bebés a partir de los 15 días de vida.

Limpieza, ayuda en caso de obstrucción y humidificación de las fosas nasales:

- En casos de goteo (moqueo), mucosidad o congestión nasal: se recomiendan de 4 a 6 pulverizaciones al día en cada orificio nasal.
- En higiene y prevención: de 1 a 2 pulverizaciones al día en cada orificio nasal.


Modo de empleo:

Aplicación de Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave O:

Se recomienda proceder al lavado nasal antes de dar de comer al bebé, cuando esté despierto y tranquilo. Acueste al bebé en una cama ligeramente inclinada (30 °) con la cabeza hacia un lado (nunca hacia atrás para evitar el riesgo de que entre en la garganta).

1. Insertar suavemente la boquilla en la fosa nasal superior y presionar firmemente la boquilla durante 1-2 segundos.
2. Dejar que la solución actúe durante unos pocos segundos.
3. Repetir la misma operación en la otra fosa nasal.
4. Levante la espalda del bebé y limpie su nariz o use un aspirador nasal dentro de la gama Rhinomer.

Lavar la boquilla con agua caliente después de cada uso y secarla adecuadamente.

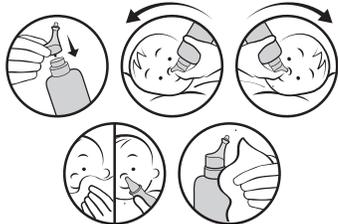

El producto nunca debe aplicarse con la cabeza del bebé inclinada hacia atrás, esta posición podría favorecer que entre erróneamente en la garganta.


En caso de que el bebé tenga mucha mucosidad, conviene proceder a aspirar las mucosidades después de la aplicación de Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave 0.

Método Rhinomer Baby:

Dos sencillos pasos para despejar de mucosidad los conductos nasales de tu bebé y ayudar a restablecer su respiración nasal.

Paso 1: Aplicación de Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave 0.

Paso 2: Aspiración nasal con Rhinomer Baby Aspirador Nasal.

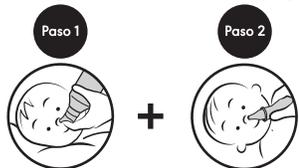

Tras cada uso limpiar el aplicador nasal con agua caliente y secar cuidadosamente.

Embarazo y lactancia:

Rhinomer puede utilizarse de forma habitual durante el embarazo y la lactancia.

5. Para su seguridad:

No son necesarias precauciones especiales cuando se utiliza Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave 0 correctamente y para las indicaciones mencionadas. Sin embargo, consulte a su médico antes de utilizar Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave 0 tras una operación de nariz o cuando haya herida.

Mantenga Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave 0 fuera del alcance y la vista de los niños.

No usar Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave 0 una vez sobrepasada la fecha de caducidad indicada en el bote.

Deseche el producto si observa roturas o defectos en el bote. Para mantener Rhinomer en óptimas condiciones, almacenar entre 0 °C y 30 °C.

Si los síntomas nasales prevalecen más de 5 días en bebés y 10 días en adultos, consulte a un profesional sanitario.

El uso por más de una persona puede propagar la infección.

En caso de irritación nasal, puede aparecer un hormigueo temporal durante su uso.

El envase de este producto contiene látex, el cual puede causar reacciones alérgicas.

6. Cómo conservar Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave 0:

Mantener el producto fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conservar a una temperatura entre 0°C y 30°C.

Conservar en el envase original.

7. Información adicional:

Composición: 100% agua de mar natural, sin conservantes ni otros aditivos químicos.

Concentración isotónica (equivalente a 9 g/l de NaCl).

Presentaciones Rhinomer Baby:

La gama Rhinomer Baby se compone de 3 productos:

- Rhinomer Baby Fuerza Extra Suave 0: spray nasal (115 ml).
- Rhinomer Baby Aspirador Nasal.

- Rhinomer Baby Recambios: blandos y desechables (formato de 10 uds. y 20 uds.).

También están disponibles para la higiene nasal de toda la familia otros productos de la gama Rhinomer. Los productos de la gama se diferencian por la fuerza con que sale el agua de mar y por lo tanto, en la intensidad del lavado nasal: Rhinomer Fuerza 1, Fuerza 2 y Fuerza 3 (135 ml).



Otros productos de la gama:

Rhinomer Descongestión Intensa (20ml)

Agua de mar hipertónica con aceite esencial de eucalyptus que alivia la congestión nasal proporcionando una sensación rápida de alivio por efecto drenante.

✉ mystory.es@haleon.com

☎ 900 816 705

🌐 www.rhinomer.es

🏢 Fabricante del producto.

LABORATOIRE DE LA MER

Z.A.C. de la Madeleine,

Avenue du Général Patton

35400 Saint-Malo - Francia

Distribuidor:

Haleon Spain, S.A.

C/ Severo Ochoa, 2

28760 - Tres Cantos, Madrid

Marcas propiedad del, o licenciadas al, grupo de compañías Haleon.

©2024 Haleon o licenciente.

Fecha de revisión: 2022/02

Recicle este folleto en el contenedor azul.

115 ml

CE 0459

Producto Sanitario

STERILE A

Conformidad europea e identificación del Organismo Notificado

Producto sanitario estéril procesado usando técnicas asépticas.



Contenido o presencia de látex de caucho natural.



Cartón reciclable.



Papel reciclable.



Número de lote de identificación del producto.




Fecha de caducidad del producto.



Consultar las instrucciones de uso.



No utilizar si el embalaje está dañado.

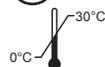

Límite de temperatura.

HALEON

CN071690