



HALÉON

ProRhinel

EAU DE MER À L'ALOE VERA

SPRAY NASAL

Solution isotonique naturelle d'eau de mer ayant des propriétés nettoyantes, et apaisantes.
Spray doux avec de l'extrait d'Aloe Vera.

⚠ **Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera. Si vous avez des questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Le nez joue un rôle crucial dans le réchauffement et l'humidification de l'air respiré et dans la filtration des petites particules de l'air, ce qui protège les voies respiratoires basses de la poussière, de l'irritation, et de la sécheresse. Aussi, il est important de garder les fosses nasales propres et hydratées afin de permettre au nez de remplir pleinement ses fonctions.

1. QU'EST-CE QUE PRORHINEL EAU DE MER À L'ALOE VERA, SPRAY NASAL ET DANS QUEL CAS L'UTILISER ?

ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera est un spray nasal sans conservateur contenant une solution isotonique 100% naturelle d'eau de mer. Ce produit contient aussi de l'extrait naturel d'Aloe Vera, qui est connu pour avoir des propriétés apaisantes et hydratantes.

ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera est recommandé pour :

- Nettoyer les fosses nasales en douceur quand le nez est bouché, par exemple pendant un rhume ou en cas d'allergie, afin d'évacuer les mucosités en excès ou les particules allergènes telles que la poussière ou le pollen.
- Apaiser les voies nasales irritées.
- Hydrater la muqueuse nasale lorsque celle-ci est sèche ou irritée en cas d'irritations nasales mineures ou d'un faible taux d'humidité (par exemple : pièce chauffée ou avec de l'air climatisé, haute altitude, transport aérien).
- Diminuer la viscosité des sécrétions nasales, les décoller et aider à leur évacuation.

ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera est aussi adapté au lavage nasal quotidien.

2. AVANT D'UTILISER PRORHINEL EAU DE MER À L'ALOE VERA, SPRAY NASAL

⚠ **Attention :** Avant utilisation lire attentivement la notice jointe dans l'emballage.

Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients (voir la liste des ingrédients).

⚠ **Ne pas utiliser un spray nasal cassé ou endommagé.**

Ne pas utiliser de micro-ondes.

Vous devez consulter votre médecin avant l'utilisation de ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera, spray nasal après une opération du nez ou une blessure.

En raison des propriétés de lavage de ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera, il est recommandé de l'utiliser avant l'autre produit nasal quand il est utilisé en association avec un autre produit local, (par exemple en cas de rhume ou de rhinite allergique).

ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera spray nasal peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement, demandez à votre médecin ou votre pharmacien avant de l'utiliser.

3. COMMENT UTILISER PRORHINEL EAU DE MER À L'ALOE VERA, SPRAY NASAL

La fréquence habituelle est de 1 à 2 fois par jour par narine. Si besoin, le produit peut être utilisé aussi souvent que nécessaire.

- ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera **Jeunes Enfants** est spécialement adapté pour les jeunes enfants de plus de 2 ans jusqu'à 6 ans. La forme de son embout nasal est adapté au nez des enfants jusqu'à 6 ans. De plus, la pulvérisation fine de la solution permet un nettoyage en douceur du nez obstrué et du nez qui coule.

Ce spray hydrate aussi la muqueuse nasale. Il est conseillé d'utiliser ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera **Jeunes Enfants** sous la surveillance d'un adulte.

- ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera **Enfants – Adultes** est adapté aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. Son embout nasal est adapté à la forme du nez des enfants à partir de 6 ans et des adultes. La pression du spray permet un lavage en douceur du nez obstrué et qui coule. Ce spray hydrate aussi la muqueuse nasale.

Pour les enfants en dessous de 11 ans, il est conseillé d'utiliser ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera **Enfants – Adultes** sous la surveillance d'un adulte. Chez les personnes âgées ou handicapées, l'utilisation de ce dispositif peut nécessiter l'aide d'un adulte. Dans des conditions normales d'utilisation, tel qu'indiqué, ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera est bien toléré.

Pour des raisons hygiéniques et afin d'éviter une contamination, le spray nasal doit être utilisé par une seule personne.

La température optimale d'utilisation est à température ambiante (généralement de 17°C à 25°C).

1. Moucher le nez si besoin.
2. Avant et après l'utilisation du ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera, lavez bien vos mains.
3. Retirer le capuchon protecteur du spray.

4. Si le spray n'a pas été utilisé depuis longtemps, amorcer le spray une fois dans l'air avant l'utilisation. Si l'embout du spray est bloqué, le nettoyer sous l'eau chaude et le sécher correctement avec un mouchoir propre.
5. - Pour les enfants qui ne peuvent utiliser le produit eux-mêmes :
Allonger l'enfant sur son dos avec la tête inclinée sur le côté, pour que le liquide s'écoule plus facilement (Fig.1).
- Pour les enfants et adultes qui peuvent utiliser le produit eux-mêmes :
Pencher la tête sur le côté, au-dessus d'une cuvette, inclinée sur un côté, afin que celle-ci soit le plus horizontale possible (Fig.2).
6. Insérer l'embout dans la narine supérieure et vaporiser brièvement (2 à 3 secondes).
7. Ensuite, incliner la tête de l'autre côté et répéter dans l'autre narine.
8. Laisser agir ce produit pendant quelques secondes. Ne pas se moucher pendant ce temps, mais essuyer le nez si nécessaire.
9. Puis, se moucher si nécessaire.
10. Après chaque utilisation, nettoyer sous l'eau chaude, sécher l'embout avec un mouchoir propre et remettre le capuchon protecteur.
11. Laver l'embout à l'eau chaude. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de liquide vaisselle. Ne pas utiliser de micro-ondes.



Fig 1



Fig 2

4. POUR VOTRE SÉCURITÉ

Avertissement

Contenu sous pression  : à conserver à l'abri de la lumière et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Flacon sous pression : peut éclater s'il est chauffé.

Tenir éloigné de la chaleur / des étincelles / des flammes / des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

Ne pas percer ou brûler, même après usage.

ProRhinel Eau de mer à l'Aloe Vera, Jeunes-Enfants : l'embout est conçu pour les enfants afin de s'adapter à la forme naturelle des narines et une collerette de sécurité évite une insertion profonde et des blessures chez l'enfant.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PRORHINEL EAU DE MER À L'ALOE VERA, SPRAY NASAL

Conserver le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

A conserver entre 0°C et 25°C.  .

Conserver dans son emballage d'origine.

Ne pas congeler.

6. AUTRES INFORMATIONS

Composants : extrait d'Aloe Vera, eau de mer et eau purifiée. Sans conservateur.

L'azote est ajouté en tant que gaz inerte propulseur dans ce dispositif pressurisé. Le gaz propulseur n'est pas en contact avec la solution. Flacon pressurisé de 100 ml.

 Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Suisse

 Distribué par :

 Haleon France
23 rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison

Les marques appartiennent ou sont concédées au groupe Haleon. © 2023 Haleon.

 0 805 542 569 (uniquement accessible depuis la France)
 service.consommateur@haleon.com

 0459

Dispositif médical

Date : Juin 2023

 Haleon Medical Devices,
Clocherane,
Youghal Road,
Dungarven,
Co. Waterford,
X35 Y983,
Irlande

 MD

