



HALEON

ProRhinel

EAU DE MER NOURRISSONS-JEUNES ENFANTS

SPRAY NASAL

Solution isotonique naturelle d'eau de mer naturelle ayant des propriétés nettoyantes et apaisantes.

Spray doux.

 **Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants. Si vous avez des questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Le nez joue un rôle crucial dans le réchauffement et l'humidification de l'air respiré et dans la filtration des petites particules de l'air, ce qui protège les voies respiratoires basses de la poussière, de l'irritation, et de la sécheresse. Aussi, il est important de garder les fosses nasales propres et hydratées afin de permettre au nez de remplir pleinement ses fonctions.

1. QU'EST-CE QUE PRORHINEL EAU DE MER NOURRISSONS-JEUNES ENFANTS, SPRAY NASAL ET DANS QUEL CAS L'UTILISER ?

ProRhinel Eau de mer Nourrissons- Jeunes est un spray nasal sans conservateur contenant une solution isotonique 100 % naturelle d'eau de mer.

ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants est recommandé pour :

- Nettoyer les fosses nasales en douceur lorsque le nez est bouché, par exemple en cas de rhume ou en cas d'allergie, par évacuation des mucosités en excès ou les particules allergènes telles que la poussière ou le pollen.
- Hydrater la muqueuse nasale lorsque celle-ci est sèche ou irritée en cas d'irritations nasales mineures ou d'un faible taux d'humidité (par exemple : pièces chauffées ou avec de l'air climatisé, haute altitude, transport aérien).
- Diminuer la viscosité des sécrétions nasales, les décoller et aider à leur évacuation.

ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants est aussi adapté au lavage nasal quotidien, en particulier chez les bébés qui ne sont pas en mesure de se moucher.

Le lavage nasal diminue la viscosité des sécrétions nasales et aide à l'évacuation des sécrétions en excès qui peuvent affecter la qualité de vie des bébés (sommeil perturbé, difficulté à dormir), ce qui les aide à respirer et se sentir mieux à nouveau.

En cas d'excès de mucosités lors du lavage du nez d'un nourrisson ou jeune enfant, il est conseillé d'utiliser ProRhinel Mouche bébé juste après avoir utilisé ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants, spray nasal. L'utilisation en association du ProRhinel Mouche bébé et d'une solution saline permet l'évacuation des sécrétions nasales et contribue à réduire le risque de complications telles que les infections de l'oreille (otites) ou les infections des sinus (rhinosinusites). Cela permet également d'améliorer la qualité de sommeil du bébé en période de rhume.

2. POURQUOI CHOISIR PRORHINEL EAU DE MER NOURRISSONS- JEUNES ENFANTS ?

ProRhinel Eau de mer Nourrissons- Jeunes enfants est particulièrement adapté aux tout-petits : son embout nasal a une forme adaptée au nez des tout-petits jusqu'à 6 ans. En outre, la pulvérisation fine et non agressive de la solution permet un lavage tout en douceur du nez bouché et du nez qui coule. Ce spray peut aussi être utilisé pour l'humidification des fosses nasales.

3. AVANT D'UTILISER PRORHINEL EAU DE MER NOURRISSONS-JEUNES ENFANTS

 **Attention :** Avant utilisation lire attentivement cette notice.

Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients (voir la liste des ingrédients).

 Ne pas utiliser si le produit est cassé ou endommagé. Ne pas utiliser de micro-onde.

Vous devez consulter votre médecin avant l'utilisation de ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants, spray nasal après une opération du nez ou une blessure.

En raison des propriétés de lavage du ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants, il est recommandé de l'utiliser avant un autre produit nasal quand il est utilisé en association avec un autre produit nasal local (par exemple en cas de rhume ou de rhinite allergique).

ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants spray nasal peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement, demandez à votre médecin ou votre pharmacien avant de l'utiliser.

4. COMMENT UTILISER PRORHINEL EAU DE MER NOURRISSONS-JEUNES ENFANTS, SPRAY NASAL.

La fréquence habituelle est de 1 à 2 fois par jour par narine. Si besoin, le produit peut être utilisé aussi souvent que nécessaire.

ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants est spécialement adapté aux nourrissons et les enfants. Cependant, il ne doit pas être utilisé chez un nourrisson de moins de 2 semaines sans avis médical.

Pour les enfants de moins de 11 ans, il est conseillé d'utiliser ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants sous la surveillance d'un adulte.

Chez les personnes âgées ou handicapées, l'utilisation de ce dispositif peut nécessiter l'aide d'un adulte.

Dans des conditions normales d'utilisation, tel qu'indiqué, ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants est bien toléré.

Pour des raisons d'hygiène et afin d'éviter une contamination, le spray nasal ne doit être utilisé que par une seule personne.

La température optimale d'utilisation est à température ambiante (généralement de 17°C à 30°C).

1. Moucher le nez si besoin.
2. Avant et après l'utilisation du ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants, lavez bien vos mains.
3. Retirer le capuchon protecteur du spray.
4. Si le spray n'a pas été utilisé depuis longtemps, amorcer le spray une fois dans l'air avant l'utilisation. Si l'embout du spray est bloqué, le nettoyer sous l'eau chaude et le sécher correctement avec un mouchoir propre.
5. * Pour les enfants qui ne peuvent utiliser le produit eux-mêmes :
Allonger l'enfant sur son dos avec la tête inclinée sur le côté, pour que le liquide s'écoule plus facilement (Fig.1)
* Pour les enfants et adultes qui peuvent utiliser le produit eux-mêmes :
Pousser la tête sur le côté, au-dessus d'une cuvette, inclinée sur un côté, afin que celle-ci soit la plus horizontale possible (Fig.2).
6. Insérer l'embout dans la narine supérieure et vaporiser brièvement (2 à 3 secondes).
7. Ensuite, incliner la tête de l'autre côté et répéter dans l'autre narine.
8. Laisser agir ce produit pendant quelques secondes. Ne pas se moucher pendant ce temps, mais essuyer le nez si nécessaire.
9. Puis, se moucher si nécessaire.
10. Après chaque utilisation, nettoyer sous l'eau chaude, sécher l'embout avec un mouchoir propre et remettre le capuchon protecteur.
11. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de liquide vaisselle. Ne pas utiliser de micro-ondes.



Fig 1



Fig 2

5. POUR VOTRE SÉCURITÉ

Avertissement

Contenu sous pression  : à conserver à l'abri de la lumière et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Facon sous pression : peut éclater s'il est chauffé.

Tenir éloigné de la chaleur / des étincelles / des flammes / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

Ne pas percer ou brûler, même après usage.

L'embout est conçu pour les enfants afin de s'adapter à la forme naturelle des narines et une collerette de sécurité évite une insertion profonde dans le nez et des blessures chez l'enfant.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

Tout incident qui est survenu en relation avec ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants doit être communiqué au fabricant et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) – Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

6. COMMENT CONSERVER PRORHINEL EAU DE MER NOURRISSONS-JEUNES ENFANTS, SPRAY NASAL

Conserver le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

A conserver entre 0°C et 30°C. .

Conserver dans son emballage d'origine.

Ne pas congeler.

7. AUTRES INFORMATIONS

Ingédients : eau de mer et eau purifiée. Sans conservateur.

L'azote est ajouté en tant que gaz inerte propulseur dans ce dispositif pressurisé. Le gaz propulseur n'est pas en contact avec la solution. ProRhinel Eau de mer Nourrissons-Jeunes Enfants, spray nasal est disponible en format 100 mL.



Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Suisse

Distributeur:

Haleon France
23 rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison

Les marques appartiennent ou sont concédées au groupe Haleon. © 2023 Haleon.



0 805 542 569 (uniquement accessible depuis la France)

service.consommateur@haleon.com



0459

Dispositif médical

Date: Juin 2023



Haleon Medical Devices,
Cloherane,
Youghal Road,
Dunganvan,
Co. Waterford,
X35 Y9B3,
Irlande



ANA90HAL065A