


ProRhinel Mouche bébé pour nouveau-nés, nourrissons et jeunes enfants. Avant utilisation, lire attentivement les informations suivantes. Le mouchage est recommandé lorsque votre bébé a le nez encombré, aussi souvent que nécessaire, notamment avant de nourrir et d'endormir bébé. **ProRhinel Mouche bébé** aide à dégager le nez de votre bébé en évacuant en douceur les sécrétions nasales. Il contient un filtre absorbant pour retenir le mucus. Sa forme ergonomique et sa texture assurent une bonne prise en main. **ProRhinel Mouche bébé** est confortable pour le nez grâce à son embout souple adapté au nez de votre bébé. Deux embouts souples jetables spécialement conçus pour le nez de bébé sont fournis avec le **ProRhinel Mouche bébé**. Utilisez uniquement les embouts **ProRhinel** avec le **ProRhinel Mouche bébé**. Chaque embout est composé d'un filtre absorbant qui bloque la remontée du mucus dans le dispositif et en assure l'hygiène. Facile à utiliser et hygiénique, **ProRhinel Mouche bébé** aide votre bébé enrhumé à respirer, manger, dormir normalement et à se sentir mieux. L'évacuation des sécrétions nasales permet de prévenir le risque de complications du rhume telles que les infections de l'oreille (otites), les infections des sinus (sinusites) ou la toux. Le **Mouche bébé** améliore aussi la qualité du sommeil de bébé au cours d'un rhume.

Comment utiliser ProRhinel Mouche bébé ?

1. Avant d'utiliser **ProRhinel mouche bébé**, lavez-vous bien les mains.
2. Positionner un embout nasal souple (A) sur le corps de l'appareil (B). Ne pas assembler avec un embout usagé.
3. Placer l'embout buccal (C) dans votre bouche (parent, soignant) puis placer l'extrémité de l'embout nasal (A) dans l'une des narines de votre bébé. Pour augmenter la performance de ce **Mouche bébé**, il est recommandé de maintenir l'autre narine bouchée pendant l'aspiration.

4. Aspirer doucement, lentement et régulièrement par l'embout buccal (C).
5. Si l'embout nasal est trop rempli entre 2 aspirations, changez l'embout.
6. Procéder de même pour l'autre narine.
7. Consignes de nettoyage : Enlever l'embout nasal usagé (A) et jetez-le. Essuyer la surface extérieure de l'embout buccal (C) à l'aide d'un linge propre humidifié à l'eau chaude. Sécher la surface extérieure de l'embout buccal avec un mouchoir.

SEULEMENT dans le cas où du mucus ou des sécrétions se trouveraient dans le corps de l'appareil : détacher le corps de l'appareil (B) du tube en plastique. Rincer le corps de l'appareil (B) sous l'eau chaude et laisser sécher avant d'y réattacher le tube. Lavez-vous bien les mains.

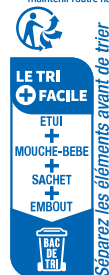

Aidez votre bébé enrhumé à mieux respirer en utilisant la **Méthode ProRhinel** : 2 gestes simples pour dégager son nez et l'aider à mieux respirer. 1. Lavage nasal avec **ProRhinel Spray Nourrissons - jeunes enfants** ou **ProRhinel Sérum Physiologique**. 2. Mouchage avec **ProRhinel Mouche bébé**.

A qui est destiné **ProRhinel Mouche bébé** ? Ce produit est destiné aux personnes qui ne sont pas en capacité de se moucher tels que les nouveau-nés, nourrissons et jeunes enfants. Cependant, il est conseillé de demander conseil à un professionnel de santé avant de l'utiliser chez le nouveau-né. Qui devrait utiliser **ProRhinel Mouche bébé** ? Pour des raisons de sécurité, le **ProRhinel Mouche bébé** doit être utilisé par un parent ou un soignant en mesure de lire et de comprendre l'étiquetage, de distinguer la bouche, le nez, les oreilles et les yeux et de comprendre les principes de l'hygiène de base. Il est recommandé de demander conseil à votre médecin avant d'utiliser **ProRhinel Mouche bébé** suite à une blessure ou une opération chirurgicale nasale récente. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants de ce dispositif médical (voir composition). Ne pas utiliser si le produit est cassé, endommagé, si l'embout est usagé ou endommagé, ou s'il présente un filtre manquant ou endommagé. Il est conseillé d'utiliser ce dispositif chez un sujet calme. L'embout buccal doit être maintenu fermement entre les lèvres. Tout incident qui est survenu en relation avec ce **Mouche bébé** doit être communiqué au fabricant et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>. Pour des raisons d'hygiène et afin d'éviter toute contamination, assurez-vous que les différentes parties du **Mouche bébé** soient correctement assemblées, en évitant d'utiliser un embout usagé. Si vous avez des questions sur l'utilisation du produit, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien. Merci de jeter ce produit en accord avec la réglementation locale et de toujours respecter l'environnement.

Composition : Mouche bébé : polypropylène, styrène, éthylène-butylène styrène, silicone. Embout nasal : PVC et mousse de mélamine. Sans Bisphénol A.

Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Conservé entre 0°C et 30°C.

Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur la boîte. Conserver dans son emballage d'origine.

Contenu : 1 mouche bébé : (corps de l'appareil (B) avec 1 tube souple et 1 embout buccal (C) et 2 embouts nasaux : (A)) Embouts jetables aussi disponibles en boîte de 10 ou 20 unités.



Attention : Avant l'utilisation du produit, lire attentivement l'information sur l'étui.

Usage unique : Les embouts nasaux sont à usage unique. Les autres parties du dispositif peuvent être réutilisées.

Fabricant : HALEON CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Suisse.

Distribué par : HALEON France, 23 rue François Jacob, 92500 Rueil-Malmaison, France.

Dispositif Médical. Date : juin 2023.



EC REP

HALEON



Youghal Road, Dunganavan, Co. Waterford, X35 1983, Ireland

Les marques appartiennent ou sont concédées au groupe HALEON. © 2023 HALEON.

Ne pas utiliser de produit cassé ou endommagé.

service.consommateur@halcon.com

www.prhinel.fr



0805 542 569 (uniquement accessible depuis la France)



0512174R 000590