

ProRhinel
HYPERTONIQUE

Naturel

2,3% NaCl

HALEON

ProRhinel Naturel, spray nasal est un décongestionnant nasal, 100% naturel, dont l'action est cliniquement prouvée.

C'est une solution d'eau de mer hypertonique (2,3% NaCl) riche en ingrédients marins qui ont des propriétés bénéfiques (sels minéraux et oligo-éléments). **ProRhinel Naturel, spray nasal** soulage la congestion nasale et la pression dans les sinus par le mécanisme naturel de l'osmose. De plus, **ProRhinel Naturel, spray nasal** nettoie les voies nasales, en éliminant les mucosités accumulées, les croûtes, la poussière, les débris, les polluants, les allergènes et les agents infectieux. Il aide également à hydrater la muqueuse nasale.

L'eau de mer utilisée dans **ProRhinel Naturel, spray nasal** est prélevée en Bretagne, dans la baie de Cancale en France. Cette baie est connue pour ses fortes marées qui provoquent un brassage perpétuel des eaux assurant la qualité exceptionnelle de l'eau prélevée, riche en sels minéraux et oligo-éléments. L'institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) procède également à des contrôles réguliers de qualité sous les auspices du gouvernement français.

ProRhinel Naturel, spray nasal ne contient aucun agent médicamenteux, ni conservateurs ni additifs chimique.

ProRhinel Naturel, spray nasal peut être utilisé seul, comme une alternative naturelle aux décongestionnants médicamenteux (corticoïdes locaux, antihistaminiques, vasoconstricteurs), ou en combinaison avec ces derniers pour améliorer leur efficacité. Ainsi, il permet de limiter la durée du traitement prescrit et peut contribuer à la réduction de la dose globale médicamenteuse.

Propriétés :

► Soulage la congestion nasale en réduisant l'œdème de la muqueuse nasale (par osmose).

► Fluidifie les sécrétions muqueuses facilitant ainsi leur élimination.

► Aide à restaurer la fonction naturelle de la muqueuse nasale.

► Nettoie les voies nasales des mucosités accumulées, des croûtes, de la poussière, des débris, des polluants, des allergènes et des agents infectieux.

► Hydrate la muqueuse nasale et soulage la sécheresse nasale.

ProRhinel Naturel, spray nasal améliore la qualité de vie en soulageant les symptômes liés à la congestion nasale (par exemple, le nez qui démange, les éternuements, la toux, la pression dans les sinus et l'oreille, les troubles du sommeil).

ProRhinel Naturel, spray nasal est recommandé :

► Pour tous les cas de congestion nasale et celle des sinus, par exemple, rhinite (infectieuse ou allergique), sinusite ; pour le rhume et la grippe.

► Quand les décongestionnants médicamenteux sont contre-indiqués (par exemple pendant la grossesse, l'allaitement, les maladies thyroïdiennes, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, le diabète).

► Pour l'amélioration de l'efficacité des décongestionnants médicamenteux et pour la réduction de leur utilisation.

► Pour la prévention des infections nasales et les complications ORL secondaires, par exemple l'otite.

► Pour l'hygiène quotidienne (par exemple dans des environnements pollués).

► Pour une humidification dans un environnement sec.

Description : Spray nasal (pompe) 30mL. Sans conservateur. Adapté à tous y compris les bébés.

Composition : Eau de mer 70%, eau purifiée 30%, équivalent à 23g/L de NaCl (2,3%). Sans conservateur. Sans agent médicamenteux. Sans additifs chimiques. 100% naturel.

Posologie recommandé :

Veuillez utiliser comme indiqué ci-dessous ou selon les recommandations de votre médecin.

Dès 0 mois : 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour.

Dès 6 mois : 1 à 3 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour.

Précautions : Pour usage nasal seulement. Ne pas partager le même flacon avec un autre individu. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'eau de mer.

Conseil : Une légère et temporaire sensation d'irritation peut être ressentie au début de l'utilisation.

Conditions de stockage : Conserver en dessous de 25°C. Protéger du soleil.

Convient pendant la grossesse et l'allaitement.

Les produits **ProRhinel** sont des dispositifs médicaux marqués CE.

ProRhinel
HYPERTONIQUE

Naturel


HALEON

2,3% NaCl

Instructions d'utilisation

Adultes & Enfants

- 1 Mouchez le nez afin d'éliminer les mucosités avant d'utiliser ProRhinel Naturel, spray nasal.
- 2 Retirez le capuchon de protection.
- 3 Maintenez le flacon dans une position verticale et pulvérisez quelques fois avant d'activer la pompe spray.
- 4 Pliez légèrement le cou vers l'avant au-dessus d'un lavabo et penchez la tête à droite.
- 5 Insérez doucement l'embout dans la narine gauche (en parallèle à la cloison nasale) et appuyez fermement.
- 6 Tournez la tête de l'autre côté et répétez l'application dans l'autre narine.
- 7 Enlevez l'embout nasal de la narine. Revenez à la position verticale, permettant ainsi à la solution d'agir pendant quelques secondes, puis mouchez-vous.
- 8 Répétez la procédure si nécessaire.
- 9 Lavez bien l'embout nasal à l'eau chaude et essuyez-le après chaque utilisation.

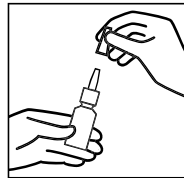

Bébés & enfants qui ont besoin d'aide

- 1 Essuyez le nez du bébé avant d'utiliser ProRhinel Naturel, spray nasal.
- 2 Retirez le capuchon de protection.
- 3 Maintenez le flacon dans une position verticale et pulvérisez quelque fois afin d'activer la pompe spray.
- 4 Placez le bébé en position couchée en inclinant sa tête à droite.
- 5 Insérez doucement l'embout dans la narine gauche (en parallèle à la cloison nasale) et appuyez fermement.
- 6 Tournez la tête de l'autre côté et répétez l'application dans l'autre narine.
- 7 Enlevez l'embout nasal de la narine du bébé. Redressez le bébé à la verticale tout en permettant à la solution d'agir pendant quelques secondes, puis essuyez le nez.
- 8 Répétez procédure si nécessaire.
- 9 Lavez bien l'embout nasal à l'eau chaude et essuyez-le après chaque utilisation.

Les marques appartiennent ou sont concédées
au groupe Haleon. ©2025 groupe Haleon

Gerolymatos International S.A.
8 Asklipiou St.
14568 Kryoneri, Athènes
Grèce
Distributeur: **Haleon France**,
23 rue François Jacob, 92500 Rueil-Malmaison

www.prorhinel.fr
service.consommateur@haleon.com
0 805 542 569 (uniquement accessible depuis la France)

15 °C — 25 °C



233046A