



HALEON

ProRhinel

EAU DE MER NOURRISSONS-JEUNES ENFANTS SPRAY NASAL PRESSURISÉ

Solution isotonique naturelle d'eau de mer.

⚠ Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants. Si vous avez des questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Pourquoi est-il important de nettoyer le nez en le lavant avec une solution saline ?

Le nez joue un rôle crucial dans le réchauffement et l'humidification de l'air respiré et dans la filtration des petites particules de l'air, ce qui protège les voies respiratoires basses de la poussière, de l'inhalation et de la sécheresse. Aussi, il est important de garder les fosses nasales propres et hydratées afin de permettre au nez de remplir pleinement ses fonctions.

2. Qu'est-ce que ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants, spray nasal et dans quels cas l'utiliser ?

ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants est un spray nasal sans conservateur contenant une solution isotonique 100 % naturelle d'eau de mer.

ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants est recommandé pour :

- L'hygiène nasale quotidienne. Lorsque ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants est utilisé quotidiennement en prévention, il aide à diminuer la récurrence des rhumes.
- ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants est adapté pour le lavage nasal quotidien, en particulier chez les bébés qui ne sont pas en mesure de se moucher. Le lavage nasal diminue la viscosité des sécrétions nasales et aide à l'évacuation des sécrétions qui peuvent affecter la qualité de vie des bébés (sommeil perturbé, difficulté à manger), ce qui les aide à respirer et se sentir mieux à nouveau.
- L'utilisation quotidienne de ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants peut aider à diminuer le risque d'infections des oreilles (otites) ou de bronchites.
- Nettoyer et lever les narines et soulager naturellement lorsque le nez est bouché. Par exemple, lors de rhumes, de gripes et de réactions allergiques affectant le nez, ou par exposition à des particules de pollution. Il agit en diminuant et en éliminant l'excès de mucus ou les particules allergènes, telles que la poussière ou le pollen.
- En cas de nez sec, causé par un environnement sec. Il hydrate les narines et apaise les irritations mineures telles que les démangeaisons, le nez qui coule et les éternuements.

En cas d'excès de mucosités lors du lavage du nez d'un nourrisson ou jeune enfant, il est conseillé d'utiliser ProRhinel Mouche bébé juste après avoir utilisé ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants, spray nasal. L'utilisation en association de ProRhinel Mouche bébé et d'une solution saline permet l'évacuation des sécrétions nasales.

ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants est particulièrement adapté aux tout-petits : son embout nasal a une forme adaptée au nez des tout-petits jusqu'à 6 ans. En outre, la pulvérisation fine et non agressive de la solution permet un lavage tout en douceur du nez bouché et du nez qui coule. Ce spray peut aussi être utilisé pour l'humidification des fosses nasales.

3. Avant d'utiliser ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants

⚠ Attention : avant utilisation lire attentivement cette notice.

Chez les personnes âgées ou handicapées, l'utilisation de ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants peut nécessiter l'aide d'un adulte.

Il est conseillé d'utiliser ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants sous la surveillance d'un adulte.

⚠ Fragile, manipuler avec précaution. Le spray peut ne pas fonctionner correctement après un choc ou une chute.

⚠ Ne pas utiliser un produit cassé ou endommagé.

Ne pas mettre au micro-ondes.

Vous devez consulter un médecin avant d'utiliser ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants après une opération nasale ou une blessure.

Lorsque vous utilisez ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants pour nettoyer et lever le nez, vous devez l'utiliser avant tout autre produit nasal local (par exemple, en cas de rhume ou de rhinite allergique). Dans des conditions normales d'utilisation, comme indiqué, ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants est très bien toléré.

4. Comment utiliser ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants, spray nasal

La fréquence d'utilisation habituelle est de 1 à 2 fois par jour par narine. Si besoin, le produit peut être utilisé aussi souvent que nécessaire.

Pour des raisons d'hygiène et pour éviter une contamination, le spray nasal doit être utilisé par une seule personne.

Pour éviter des effets secondaires indésirables tels que des brûlures et des picotements, utilisez à température ambiante (17°C à 30°C).

ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants est spécialement adapté aux nourrissons et aux enfants. Cependant, il ne doit pas être utilisé chez un nourrisson de moins de 2 semaines sans avis médical.

Instructions pour nettoyer et lever le nez :

1. Moucher le nez si besoin.
2. Avant et après l'utilisation de ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants, lavez bien vos mains.
3. Retirer le capuchon protecteur du spray.
4. Si le spray n'a pas été utilisé depuis longtemps, amorcez le spray une fois dans l'air avant utilisation. Si l'embout du spray est bloqué, le nettoyer sous l'eau chaude et le sécher correctement avec un mouchoir propre.
5. * Pour les enfants qui ne peuvent utiliser le produit eux-mêmes :
Ablonger l'enfant sur son dos avec la tête inclinée sur le côté, pour que le liquide s'écoule plus facilement (Fig.1)
* Pour les enfants qui peuvent utiliser le produit eux-mêmes :
Pencher la tête sur le côté, au-dessus d'une cuvette, inclinée sur un côté, afin que celle-ci soit le plus horizontale possible (Fig.2).
6. Insérer délicatement l'embout dans la narine supérieure et pulvériser brièvement (2 à 3 secondes).
7. Ensuite, incliner la tête de l'autre côté et répéter dans l'autre narine.
8. Laisser le produit agir pendant quelques secondes. Ne pas se moucher pendant ce temps, mais essayer le nez si nécessaire.
9. Puis, se moucher si nécessaire.
10. Après chaque utilisation, nettoyer l'embout sous l'eau chaude, sécher l'embout avec un mouchoir propre et remettre le capuchon protecteur. Ne pas utiliser de produits chimiques, de liquide vaisselle ou de désinfectant.



Fig.1

Fig.2

5. Pour votre sécurité

Avertissements

Ne pas laisser ce produit à la portée et à la vue des enfants.
Ne pas mettre la solution dans les yeux, la bouche ou les oreilles.
Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients (voir la liste des ingrédients).
Récipient sous pression : Peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes / des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Ne pas percer ni brûler, même après usage.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou pharmacien.
Tout incident qui est survenu en relation avec ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants doit être communiqué au fabricant et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>
L'embout est conçu pour les enfants afin de s'adapter à la forme naturelle des narines et une collerette de sécurité évite une insertion profonde dans le nez et des blessures chez l'enfant.

6. Comment conserver ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants, spray nasal

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Conserver le spray dans son emballage d'origine.



Conserver entre 0°C et 30°C.

Ne pas congeler.

Contenu sous pression : garder à l'abri de la lumière du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.

7. Autres Informations

INGRÉDIENTS : Eau de mer (21,8g/100mL) et eau purifiée.

Sans conservateur.

L'azote est ajouté en tant que gaz inerte propulseur de ce dispositif pressurisé. Le gaz propulseur n'est pas en contact avec la solution.
ProRhinel Eau de Mer Nourrissons-Jeunes Enfants, spray nasal est disponible en format de 100 mL.

Haleon CH SARL, Route de l'Énoz, 197 Prangins, Suisse



Haleon Medical Devices,
Clachraone,
Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
X25 1Y63,
Irlande



Distribué par :
Haleon France,
23 rue François Jacob,
92500 Neuilly-Matignon



service.consommateur@haleon.com

0 805 542 569 (uniquement accessible depuis la France)

Pour plus d'information, www.prorhinel.fr



Dispositif médical

Date : Avril 2025

Les marques appartiennent ou sont concédées au groupe Haleon. © 2025 groupe Haleon.