

10 mm non imprimé

Tolérance 5 mm non imprimé

ProRhinel

Extra

**EUCALYPTUS
SPRAY NASAL**

HALEON

Eau de mer naturelle hypertonique
Avec arôme d'Eucalyptus Globulus.

⚠ Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ProRhinel Extra Eucalyptus, spray nasal. Si vous avez des questions, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.

Au cours d'un rhume, l'inflammation provoque un gonflement de la muqueuse nasale, un nez bouché et augmente la production de mucus. L'hypertonie* de l'eau de mer crée une différence de pression entre la solution et la muqueuse nasale (effet osmotique), ce qui aide à diminuer le gonflement des voies nasales.

Le produit permet aussi de ramollir et fluidifier le mucus en excès par l'action osmotique de la solution hypertonique aidant ainsi à éliminer le mucus et les bactéries et les virus piégés dans le mucus du nez par effet drainant.

* Les solutions d'eau de mer hypertoniques sont différentes des solutions d'eau de mer isotoniques du fait de leur concentration en sel optimisée à 2,2% pour réduire de manière efficace la congestion nasale. Cette concentration saline est suffisamment douce pour respecter la muqueuse nasale.

1. Qu'est-ce que ProRhinel Extra Eucalyptus, spray nasal et dans quel cas l'utiliser ?

ProRhinel Extra Eucalyptus est un spray nasal contenant de l'eau de mer naturelle hypertonique et de l'arôme d'Eucalyptus Globulus. La solution non diluée préserve également la richesse de tous les minéraux et oligo-éléments importants contenus dans l'eau de mer. ProRhinel Extra Eucalyptus décongestionne le nez en cas de rhume, rhinopharyngite et de nez bouché. L'utilisation de ProRhinel Extra Eucalyptus soulage la congestion nasale et améliore le quotidien.

ProRhinel Extra Eucalyptus, spray nasal est un décongestionnant naturel qui :

- Procure un soulagement naturel et efficace de la congestion nasale (nez bouché) due aux rhumes et rhinosinusites, en réduisant le gonflement des voies nasales.
- Libère les voies nasales par son action drainante.
- Aide à éliminer les bactéries et les virus piégés dans le mucus du nez par action mécanique naturelle par le biais d'un effet drainant.
- Procure une sensation agréable de soulagement et de fraîcheur, a un effet non-desséchant en hydratant la muqueuse nasale.

ProRhinel Extra Eucalyptus, spray nasal est adapté aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

2. Avant d'utiliser ProRhinel Extra Eucalyptus, spray nasal

⚠ Attention, lire la notice avant utilisation.

Contre-indications

Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients.

Ne pas utiliser ce produit en cas d'asthme.

Ne pas utiliser ce produit chez un enfant de moins de 6 ans.

Ne pas utiliser ce produit durant la grossesse ou l'allaitement.

En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes.

Les effets indésirables suivants ont été décrits :

- rares cas de réaction nasales transitoires (<0,001%)
- Cas exceptionnels d'épistaxis, nausée, maux de tête (<0,0001%)

Si un symptôme/effet secondaire survient, arrêtez l'utilisation. Consultez votre médecin si l'effet persiste.

Les incidents graves doivent être signalés au Laboratoire de la Mer et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

3. Comment utiliser ProRhinel Extra Eucalyptus, spray nasal ?

Réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes. 2 pulvérisations dans chaque narine, 6 fois par jour maximum.


L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'utilisation chez l'enfant.

10 mm non imprimé

Tolérance 5 mm non imprimé

Mode d'emploi :

1. Se moucher.
2. Retirer le capuchon protecteur.
3. Avant la première utilisation, amorcer la pompe en effectuant quelques pressions jusqu'à ce qu'une pulvérisation franche soit libérée dans l'air.
4. Maintenez la tête droite et insérer l'embout dans la narine.
5. Laisser agir le produit pendant quelques minutes avant de moucher votre nez.
6. Après chaque utilisation, laver l'embout et remettre le capuchon de protection dessus.
7. A conserver dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine.

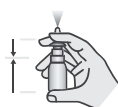

- Le spray doit uniquement être utilisé par une seule personne afin de ne pas propager l'infection.

ProRhinel Extra Eucalyptus est disponible en flacon doseur de 20 ml.

La durée maximale de traitement est estimée à 10 jours. Si les symptômes nasaux persistent, consultez un professionnel de santé. Peut être utilisé seul ou en association avec un traitement médicamenteux (par exemple : décongestionnants nasaux, corticostéroïdes, antihistaminiques). Veuillez consulter votre médecin ou pharmacien.

4. Pour votre sécurité



Ne pas utiliser un produit cassé ou endommagé.

Ne pas utiliser le produit s'il a perdu son apparence d'origine.



Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration indiquée sur l'emballage.

Ne pas utiliser le produit plus de 6 mois après la première utilisation.

Conserver le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

5. Comment conserver ProRhinel Extra Eucalyptus, spray nasal ?

A conserver en dessous de 25°C. Utiliser à température ambiante.

6. Autres informations

Composition : 97% Maris aqua, Sorbitol, Aroma (Huile essentielle de menthe-eucalyptus globulus) Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate & Aqua, Polyepsilon-Lysine & Aqua.

Délivre de l'eau de mer hypertonique avec de l'arôme de menthe-eucalyptus via un flacon doseur.

Sans conservateur chimique / sans conservateur artificiel.

Sans gaz propulseur.

Formule d'origine naturelle.

Sans agent médicamenteux.

 Laboratoire de la Mer, Avenue du Général Patton, ZAC de la Madeleine, 35400 Saint-Malo, France

Distributeur en France :

Haleon France
23 rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison



Attention, avant utilisation lire attentivement la notice jointe dans l'emballage.




0459  ^{25°C} A conserver en dessous de 25°C. Utiliser à température ambiante.


Conformité européenne et identification de l'organisme notificateur.

Date de première apposition du marquage CE : Octobre 2010.

Date de révision de la notice: 2024-10 V4

 service.consommateur@haleon.com

 0 805 542 569 (uniquement accessible depuis la France)

 www.prorhinel.fr

Les marques appartiennent ou sont concédées au groupe Haleon. ©2025 Haleon



Papier recyclable



Carton recyclable



Dispositif médical



Identification du numéro de lot sur le produit



Date d'expiration du produit



Identifiant unique du dispositif

CN01710