

ProRhinel

Naturel

HALEON

2,3% NaCl

ProRhinel Naturel est un décongestionnant nasal, 100% naturel, dont l'efficacité est cliniquement prouvée.

C'est une solution d'eau de mer hypertonique (2,3% NaCl) riche en ingrédients marins qui ont des propriétés bénéfiques (sels minéraux et oligo-éléments).

ProRhinel Naturel soulage la congestion nasale et la pression dans les sinus par le mécanisme naturel de l'osmose. De plus, **ProRhinel Naturel** nettoie les voies nasales, en éliminant les mucosités accumulées, les croûtes, la poussière, les débris, les polluants, les allergènes et les agents infectieux.

ProRhinel Naturel aide également à hydrater la muqueuse nasale.

L'eau de mer utilisée dans **ProRhinel Naturel** est prélevée en Bretagne, dans la baie de Cancale en France. Cette baie est connue pour ses fortes marées, qui provoquent un brassage perpétuel des eaux assurant la qualité exceptionnelle de l'eau prélevée, riche en sels minéraux et oligo-éléments. L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) procède également à des contrôles réguliers de qualité sous la sous les auspices du gouvernement français.

ProRhinel Naturel ne contient aucun agent médicamenteux, ni conservateur, ni additif chimique.

ProRhinel Naturel peut être utilisé seul, comme une alternative naturelle aux décongestionnants médicamenteux (corticoïdes locaux, antihistaminiques, vasoconstricteurs) ou en association avec ces derniers pour améliorer leur efficacité.

Ainsi, il contribue à réduire la durée du traitement médicamenteux et peut conduire à une réduction de la consommation globale de médicaments.

Propriétés :

- Soulage la congestion nasale en réduisant l'œdème de la muqueuse nasale (par osmose).
- Fluidifie les sécrétions nasales facilitant ainsi leur élimination.
- Aide à restaurer la fonction naturelle de la muqueuse nasale.
- Nettoie les voies nasales des mucosités accumulées, des croûtes, de la poussière, des débris, des polluants, des allergènes et des agents infectieux.
- Hydrate la muqueuse nasale et soulage la sécheresse nasale.

ProRhinel Naturel améliore la qualité de vie en soulageant les symptômes liés à la congestion nasale (par exemple, le nez qui démange, les éternuements, la toux, la pression dans les sinus et l'oreille, les troubles du sommeil).

ProRhinel Naturel est recommandé :

- Pour tous les cas de congestion nasale et celle des sinus, par exemple, rhinite (infectieuse ou allergique), sinusite ; pour le rhume et la grippe.
- Quand les décongestionnants médicamenteux sont contre-indiqués (par exemple pendant la grossesse, l'allaitement, les maladies thyroïdiennes, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, le diabète).
- Pour l'amélioration de l'efficacité des décongestionnants médicamenteux et pour la réduction de leur utilisation.

- Pour la prévention des infections nasales et les complications ORL secondaires, par exemple l'otite.
- Pour faciliter le rétablissement suite à une chirurgie endonasale.
- Pour l'hygiène quotidienne (par exemple dans des environnements pollués).
- Pour une humidification en environnement sec.

Description : ProRhinel Naturel, flacon de 125 mL. Brumisateur doux avec un embout nasal adapté aux enfants et aux nourrissons dès 1 mois.

Composition : Eau de mer 70%, Eau purifiée 30%, équivalent à 23g/L de NaCl (2,3%). Sans agent de conservation. Sans agent médicamenteux. Sans additifs chimiques. 100% naturel.

Posologie recommandée :

Veuillez utiliser comme indiqué ci-dessous ou selon les recommandations de votre médecin.

ProRhinel Naturel dès 1 mois :

1 à 3 pulvérisations dans chaque narine par jour.

ProRhinel Naturel dès 6 mois :

1 à 2 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour

Précautions : Pour usage nasal uniquement. Ne pas partager le même flacon nasal avec un autre individu. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'eau de mer.

Conseil : Une légère et temporaire sensation d'irritation peut être ressentie au début de l'utilisation.

Conditions de conservation :

Conserver en-dessous de 25 °C. Flacon sous pression. Protéger du soleil et des sources de chaleur. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Ne pas perforer ou incinérer le contenant, même lorsqu'il est vide.

Autres informations : Gaz propulseur inerte (azote), sans contact avec le produit. Solution contenue dans un récipient séparé.

La gamme ProRhinel est une gamme complète de solutions à base d'eau de mer répondant aux besoins de tous les âges, des nouveau-nés aux adultes.

Convient pendant la grossesse et/ou l'allaitement.

Les produits ProRhinel sont des dispositifs médicaux marqués CE en conformité avec les exigences de la directive 93/42 de l'Union Européenne.

Instructions d'utilisation



Adultes & Enfants

1. Mouchez le nez afin d'éliminer les mucosités avant d'utiliser **ProRhinel Naturel**.

2. Brisez le sceau de sécurité sur la bouteille et retirez le capuchon de protection.

3. Placez l'embout nasal sur le dessus du flacon.

4. Penchez légèrement le cou vers l'avant au-dessus d'un lavabo et penchez la tête à droite.

5. Insérez doucement l'embout dans la narine gauche (en parallèle à la cloison nasale) et appuyez fermement.

6. Tournez la tête de l'autre côté et répétez l'application dans l'autre narine.

7. Enlevez l'embout nasal de la narine. Revenez à la position verticale, permettant ainsi à la solution d'agir pendant quelques secondes puis, mouchez-vous.

8. Répétez la procédure si nécessaire.

9. Enlevez l'embout nasal de la bouteille, lavez le bien à l'eau chaude et essuyez-le après chaque utilisation.



Bébés & Enfants qui ont besoin d'aide

1. Essayez le nez du bébé avant d'utiliser **ProRhinel Naturel**.

2. Enlevez le sceau de sécurité sur la bouteille et retirez le capuchon de protection.

3. Installez l'embout nasal sur le dessus du flacon.

4. Placez le bébé en position couchée en inclinant sa tête à droite.

5. Insérez doucement l'embout dans la narine gauche (en parallèle à la cloison nasale) et appuyez fermement.

6. Tournez la tête de l'autre côté et répétez l'application dans l'autre narine.

7. Enlevez l'embout nasal de la narine du bébé. Redressez le bébé à la verticale tout en permettant à la solution d'agir pendant quelques secondes, puis essuyez le nez.

8. Répétez la procédure si nécessaire.

9. Retirez l'embout nasal de la bouteille, lavez le bien à l'eau chaude et essuyez-le après chaque utilisation.

Les marques appartiennent ou sont concédées au groupe Haleon. (c) 2025 groupe Haleon.

 **Distribué par :** Haleon France,
23 rue François Jacob, 92500 Rueil-Malmaison

 service.consommateur@haleon.com

 0 805 542 569 (uniquement accessible depuis la France)

 www.prorhinel.fr

 Gerolymatos International

Gerolymatos International S.A.,
8 Asklepiou St., 14568 Kryoneri,
Athènes, Grèce



Date : Novembre 2025