

ProRhinel

SPRAY

Lavage nasal en cas de rhume et rhinopharyngite Spray nasal sous pression

⚠ Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ProRhinel Spray. Si vous avez des questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Pourquoi est-il important de faire un bon lavage nasal ?

En cas de rhume ou d'une rhinopharyngite, l'intérieur du nez est attaqué par des virus et réagit en développant une réaction inflammatoire, ce qui entraîne un nez bouché ou qui coule. Désobstruer les fosses nasales en cas de rhume et de rhinopharyngite est nécessaire pour aider à restaurer la respiration nasale.

La gêne occasionnée est d'autant plus importante chez le tout-petit que celui-ci ne sait pas, ou mal, respirer par la bouche ou le nez mouchoir.

2. Qu'est-ce que ProRhinel Spray et à quoi sert-il ?

ProRhinel Spray contient un fluide doux, il peut être utilisé en cas de rhume et rhinopharyngite pour soulager le nez bouché et le nez qui coule.

- Permet l'élimination des mucosités et des agents infectieux du nez.
- Réduit l'obstruction nasale, libérant le nez et facilitant la respiration.

ProRhinel Spray Nourissons-Jeunes Enfants et ProRhinel Spray Enfants-Adultes sont également recommandés pour humidifier les voies nasales.

Le conditionnement en flacon pressurisé permet de préserver la solution, rendant impossible l'entrée des mucosités à l'intérieur du flacon, le protégeant ainsi de toute contamination.

ProRhinel Spray Adultes Jet Tonique : son embout nasal est adapté à la morphologie du nez des adultes.

ProRhinel Spray Nourissons-Jeunes Enfants est adapté aux tout-petits jusqu'à l'âge de 6 ans. Son embout nasal a une forme adaptée au nez des tout-petits. Cependant, il est recommandé de demander conseil à votre médecin ou pharmacien, si vous souhaitez utiliser ce produit chez le nourrisson de moins de 2 semaines. En outre, la pulvérisation fine et non agressive de la solution permet de laver en douceur un nez bouché et/ou qui coule. Ce spray peut aussi être utilisé pour humidifier les voies nasales. Ce spray peut aussi être utilisé pour des enfants plus âgés ou des adultes.

ProRhinel Spray Enfants-Adultes s'adresse aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans.

Son embout nasal est adapté à la morphologie du nez des plus grands (enfants > 6 ans et adultes). Sa pression assure un lavage doux et respectueux de la muqueuse nasale en cas de nez bouché ou de nez qui coule. Ce spray peut aussi être utilisé pour humidifier les voies nasales.

ProRhinel Spray Adultes Jet Tonique est adapté uniquement à l'adulte.

ProRhinel Spray Adultes Jet Tonique est particulièrement adapté pour dégager les nez très encombrés. ProRhinel Spray Adultes Jet Tonique peut aussi être utilisé en cas de nez qui coule. ProRhinel Spray Adultes Jet Tonique n'est pas adapté pour l'humidification des voies nasales, contrairement au ProRhinel Spray Enfants-Adultes.

Le jet de ProRhinel Spray Adultes Jet Tonique est 4 fois plus puissant que le jet de ProRhinel Spray Enfants-Adultes.

3. Avant d'utiliser ProRhinel Spray ?

⚠ Attention : avant utilisation, lisez attentivement la notice fournie à l'intérieur de l'étui.

Chez les personnes âgées ou en situation de handicap, l'utilisation de ce dispositif peut nécessiter l'aide d'un adulte.

Pour les enfants de moins de 11 ans, ProRhinel Spray Enfants-Adultes doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

⚠ Fragile, manipuler avec précaution. Le spray peut ne pas fonctionner correctement après un choc ou une chute.

⚠ Ne pas utiliser si le produit est cassé ou endommagé. Ne pas mettre au micro-ondes.

Vous devriez consulter un médecin avant d'utiliser ProRhinel Spray après une opération ou une blessure nasale.

En raison de ses propriétés nettoyantes, il est recommandé d'utiliser ProRhinel Spray en premier avant tout autre produit nasal local (exemple : en cas de rhume, rhinite allergique ou avant un produit antiseptique).

Dans des conditions normales d'utilisation, comme indiqué, ProRhinel Spray est très bien toléré.

Vous pouvez utiliser ProRhinel Spray pendant la grossesse et l'allaitement, demandez à votre médecin ou pharmacien avant de l'utiliser.

4. Comment utiliser ProRhinel Spray ?

La fréquence habituelle d'utilisation est de 1 à 3 fois par jour par narine.

Pour des raisons d'hygiène et pour éviter une contamination, le spray nasal doit être utilisé par une seule personne.

Pour éviter les effets secondaires indésirables tels que des sensations de brûlure et de picotement, utilisez à température ambiante (17°C à 30°C).

- Pour un lavage nasal :

1. Se moucher, si nécessaire.
2. Avant et après avoir utilisé ProRhinel Spray, lavez-vous soigneusement les mains.
3. Si le spray n'a pas été utilisé pendant une longue période, amorcez le une fois en l'air avant utilisation. Si l'embout nasal est bloqué, le nettoyez sous l'eau chaude et le séchez proprement avec un mouchoir propre.

4. **Partie de l'embout nasal à insérer dans le nez (seule la partie de l'embout montrée à l'intérieur du cercle dans les images ci-dessous).**

Nourissons-Jeunes Enfants :

5. Allonger l'enfant sur le dos avec la tête inclinée sur le côté, afin que le liquide puisse s'écouler plus facilement.
6. Introduire délicatement l'embout dans la narine supérieure.
7. Appliquer une pression ferme sur l'embout pendant 2 à 3 secondes.
8. Répéter l'opération sur l'autre narine après avoir changé la position de la tête (toujours lever la narine supérieure).
9. Essuyer doucement le nez de l'enfant avec un mouchoir doux. Pour les tout-petits, appuyer si besoin les sécrétions à l'aide de ProRhinel Mouche-bébé.

Enfants à partir de 6 ans et adultes :

5. Incliner bien la tête d'un côté.
6. Introduire délicatement l'extrémité de l'embout nasal dans la narine supérieure.
7. Exercer une pression franche sur l'embout pendant 2 à 3 secondes.
8. Répéter l'opération sur l'autre narine après avoir changé la position de la tête (toujours lever la narine supérieure).
9. Laisser le produit agir pendant quelques secondes. Ne pas se moucher pendant ce temps, mais essayer si nécessaire. Puis, se moucher légèrement si besoin. Ne pas se moucher fortement pendant 10 minutes après la pulvérisation.



Adultes uniquement :

- Incliner bien la tête sur un côté.
- Introduire délicatement l'extrémité de l'embout nasal dans la narine supérieure.
- Exercer une pression franche sur l'embout pendant 2 à 3 secondes.
- Répéter l'opération sur l'autre narine après avoir changé la position de la tête (toujours lever la narine supérieure).
- Laisser le produit agir pendant quelques secondes. Ne pas se moucher pendant ce temps, mais essuyer si nécessaire. Puis, se moucher légèrement si besoin. Ne pas se moucher fortement pendant 10 minutes après la pulvérisation.

10. Après chaque utilisation, nettoyer l'embout sous l'eau chaude courante, le sécher avec un mouchoir propre
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de liquide vaisselle ou de produit désinfectant. **Le spray doit être utilisé uniquement par une seule personne.**

5. Pour votre sécurité

Avertissements

Garder le produit hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas mettre la solution dans les yeux, la bouche ou les oreilles.

Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients (voir liste des ingrédients).

ProRhinel Spray contient du bromure de benzododécinium, un composé d'ammonium quaternaire, qui pourrait provoquer une allergie locale chez les personnes sensibles à cette substance.

Réceptier sous pression : peut éclater s'il est chauffé.

Tenir éloigné de la chaleur / des étincelles / des flammes / des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

Ne pas percer ni brûler, même après usage.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou pharmacien.

Tout incident qui est survenu en relation avec **ProRhinel Spray** doit être communiqué au fabricant et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) - Site internet :

<https://signalement.social-vente.gouv.fr/>

L'embout est conçu pour les enfants afin de s'adapter à la forme naturelle des narines. L'anneau de sécurité évite une insertion en profondeur dans le nez et les blessures chez les enfants.

6. Comment conserver ProRhinel Spray ?

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Conserver le spray dans son emballage d'origine.

Conserver entre 0°C et 30°C.

Ne pas congeler.

Contenu sous pression :

Garder à l'abri de la lumière du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.

7. Informations complémentaires

INGRÉDIENTS : Chlorure de sodium (0,009 g/mL), alcool éthylique 90 % (0,006 g/mL), glycérol (0,003 g/mL), polysorbate 80 (0,002 g/mL), bromure de benzododécinium (0,00004 g/mL), eau purifiée.

L'azote est ajouté comme gaz propulseur inerte dans le dispositif sous pression. Le gaz propulseur n'est pas en contact avec la solution.

ProRhinel Spray est disponible en flacon pressurisé de 100 mL.

Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Suisse

Haleon Medical Devices,
Cluchemane,
Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
X35 Y983,
Irlande

Distribué par:
Haleon France,
23 rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison

CE 0459

MD

3

service.consommateur@haleon.com
0 805 542 569 [uniquement accessible depuis la France]

Pour plus d'information, www.prorhinel.fr

Les marques appartiennent ou sont concédées au groupe Haleon. © 2025 groupe Haleon.



Date : Avril 2025

DISPOSITIF MÉDICAL