



Lavage nasal
en cas de Rhume
et Rhinopharyngite
Spray nasal sous pression

HALÉON

 Lire attentivement la notice avant d'utiliser ProRhinel Spray.
Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.



1. Pourquoi est-il important de faire un bon lavage nasal ?

En cas de rhume ou de rhinopharyngite, la muqueuse nasale agressée par les virus réagit en développant une réaction inflammatoire qui aboutit à une augmentation des sécrétions nasales. Cela se manifeste par un nez bouché ou un nez qui coule. La gêne occasionnée est d'autant plus importante chez le tout-petit que celui-ci ne sait pas, ou mal, respirer par la bouche ou se moucher.

Désobstruer les fosses nasales en cas de rhume et de rhinopharyngite est nécessaire pour aider à restaurer la respiration nasale.

2. Dans quels cas ProRhinel Spray peut-il être utilisé ?

ProRhinel Spray contient un fluideifiant, il peut être utilisé en cas de rhume et de rhinopharyngite lorsque le nez est bouché ou lorsque le nez coule.

Un lavage nasal avec ProRhinel Spray :
— facilite l'évacuation des mucosités et des agents infectieux,
— diminue l'obstruction nasale,
— libère le nez pour une meilleure respiration.

ProRhinel Spray Nourrissans-Jeunes Enfants et ProRhinel Spray Enfants-Adultes sont également recommandés pour l'humidification des voies nasales.

3. Quels sont les avantages de ProRhinel Spray ?

- **ProRhinel Spray Adultes Jet tonique** : son embout nasal est adapté à la morphologie du nez des adultes. Le conditionnement en flacon pressurisé permet de préserver la solution, rendant impossible l'entrée des mucosités à l'intérieur du flacon, le protégeant ainsi de toute contamination.
- **ProRhinel Spray** peut être utilisé quelle que soit la position du flacon, pour une plus grande facilité d'emploi.

4. Quel ProRhinel Spray choisir ?

- **ProRhinel Spray Nourrissans-Jeunes Enfants** est particulièrement adapté aux tout-petits : son embout nasal a une forme adaptée au nez des tout-petits (jusqu'à 6 ans). Cependant, il est recommandé de demander conseil à votre médecin ou pharmacien, si vous souhaitez utiliser ce produit chez le nourrisson de moins de 2 semaines. En outre, la pulvérisation fine et non agressive de la solution permet un lavage tout en douceur du nez bouché ou du nez qui coule. Ce spray peut aussi être utilisé pour humidifier les voies nasales. Ce spray peut aussi être utilisé pour des enfants plus âgés ou des adultes.
- **ProRhinel Spray Enfants-Adultes** s'adresse aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans. Son embout nasal est adapté à la morphologie du nez des plus grands (enfants > 6 ans et adultes). Sa pression assure un lavage doux et respectueux de la muqueuse nasale en cas de nez bouché ou de nez qui coule. Ce spray peut aussi être utilisé pour humidifier les voies nasales.
- **ProRhinel Spray Adultes Jet tonique** est adapté uniquement à l'adulte. ProRhinel Spray Adultes Jet tonique est particulièrement adapté pour dégager les nez très encombrés. Le jet de ProRhinel Spray Adultes Jet tonique est 4 fois plus puissant que le jet de ProRhinel Spray Enfants-Adultes.
- **ProRhinel Spray Adultes jet tonique** peut aussi être utilisé en cas de nez qui coule. ProRhinel Spray Adultes Jet tonique n'est pas adapté pour l'humidification des voies nasales, contrairement au ProRhinel Spray Enfants-Adultes.
- Disponible en flacon pressurisé de 100 mL.

5. Quelles sont les précautions d'emploi ?

 Attention : Avant utilisation, lisez attentivement la notice fournie à l'intérieur de l'étui.

Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients (voir liste des ingrédients).

ProRhinel Spray contient du bromure de benzododécinium, un ammonium quaternaire susceptible de provoquer une allergie locale chez les sujets sensibles à cette substance.

Pour les enfants de moins de 11 ans, ProRhinel Spray Enfants-Adultes doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Chez les personnes âgées ou en situation de handicap, l'utilisation de ce dispositif peut nécessiter l'aide d'un adulte.

 Ne pas utiliser si le produit est cassé ou endommagé.

Par mesure d'hygiène, afin d'éviter toute contamination :

— Après chaque utilisation, nettoyer l'embout nasal sous l'eau chaude et le sécher avec un mouchoir propre. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de liquide vaisselle ou de produit désinfectant. Ne pas mettre au micro-ondes.

— Le spray ne doit être utilisé que par une seule personne.

En raison de ses propriétés nettoyantes, il est recommandé d'utiliser ProRhinel Spray en premier lors de l'utilisation en association avec un autre produit par voie nasale (exemple : en cas de rhume, rhinite allergique ou avant un produit antiseptique).

Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Tout incident qui est survenu en relation avec ProRhinel Spray doit être communiqué au fabricant et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) – Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

6. Comment utiliser ProRhinel Spray ?

Mode d'emploi :

La température d'utilisation optimale est à température ambiante (généralement de 17°C à 30°C).

- Pour un lavage nasal :

1 à 3 fois par jour en fonction de l'encombrement des fosses nasales.

1. Moucher préalablement le nez.
2. Avant et après utilisation de ProRhinel Spray, bien laver vos mains.
3. Si le spray n'a pas été utilisé pendant une longue période, amorcer le spray une fois en l'air avant utilisation. Si l'embout nasal est bloqué, le nettoyer sous l'eau chaude et le sécher proprement avec un mouchoir propre.

Partie de l'embout nasal à entrer dans le nez.

Chez l'enfant en bas âge :

4. Allonger l'enfant sur un plan dur et tourner sa tête sur le côté. Introduire délicatement l'extrémité de l'embout nasal dans la narine supérieure.
5. Exercer une pression franche sur l'embout pendant 2 ou 3 secondes.
6. Boucher la narine supérieure, le liquide doit s'écouler par l'autre narine.
7. Répéter l'opération sur l'autre narine après avoir changé la position de la tête (toujours lever la narine supérieure).
8. Essuyer doucement le nez de l'enfant avec un mouchoir doux. Pour les tout-petits, apaiser si besoin les sécheresses à l'aide de **ProRhinel Mousse-Bébé**.
9. Après chaque utilisation, nettoyer l'embout sous l'eau chaude, le sécher avec un mouchoir propre. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de liquide vaisselle ou de produit désinfectant. Ne pas mettre le spray au micro-ondes.

Chez l'enfant à partir de 6 ans et l'adulte :

4. Bien incliner la tête sur le côté et introduire délicatement l'extrémité de l'embout nasal dans la narine supérieure.
5. Exercer une pression franche sur l'embout pendant 2 ou 3 secondes.
6. Boucher la narine supérieure, le liquide doit s'écouler par l'autre narine.
7. Répéter l'opération sur l'autre narine après avoir changé la position de la tête (toujours lever la narine supérieure).
8. Mouchoir le nez si besoin.
9. Après chaque utilisation, nettoyer l'embout sous l'eau chaude, le sécher avec un mouchoir propre. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de liquide vaisselle ou de produit désinfectant. Ne pas mettre le spray au micro-ondes.

Chez l'adulte uniquement :

4. Bien incliner la tête sur le côté et introduire délicatement l'extrémité de l'embout nasal dans la narine supérieure.
5. Exercer une pression franche sur l'embout pendant 2 ou 3 secondes.
6. Boucher la narine supérieure, le liquide doit s'écouler par l'autre narine.
7. Répéter l'opération sur l'autre narine après avoir changé la position de la tête (toujours lever la narine supérieure).
8. Mouchoir le nez si besoin.
9. Après chaque utilisation, nettoyer l'embout sous l'eau chaude, le sécher avec un mouchoir propre. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de liquide vaisselle ou de produit désinfectant. Ne pas mettre le spray au micro-ondes.

- Pour humidifier les voies nasales :
 - 2 pulvérisations brèves dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour.
 - Ne pas se mouchoir violemment au cours des 10 minutes suivant la pulvérisation.

7. Comment conserver ProRhinel Spray ?

Avertissements
Continu sous pression : ☀️ à conserver à l'abri de la lumière et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Flacon sous pression : peut éclater s'il est chauffé.
Tenir éloigné de la chaleur / des étincelles / des flammes / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
Ne pas percer ou brûler, même après usage.
Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption inscrite sur le flacon.
Conserver le flacon dans son étui d'origine.
🌡️ À conserver entre 0°C et 30°C.
Ne pas congeler.

8. Informations complémentaires

Composition pour 100 mL de solution : Bromure de benzododécinium, polysorbate 80, chlorure de sodium, alcool éthylique à 90%, glycérol, eau purifiée.
L'azote, gaz inerte, est le gaz propulseur de ce spray. Il n'est pas en contact avec la solution.

Haleon CH SARL., Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Suisse

EC REP Haleon Medical Devices,
Clocherane, Youghal Road
Dungannon
Co. Waterford
X35 Y983
Irlande

Distribué par :
Haleon France
23 rue François Jacob
93500 Noisy-Malmaison

☎️ 0 805 542 569 (uniquement accessible depuis la France)
✉️ service.consommateurs@haleon.com

Pour plus d'information : www.prorhinel.fr
Les marques appartiennent ou sont concédées au groupe Haleon. © 2023 Haleon.

MD 3
Juin 2023

CE 0459
Dispositif médical

ANAGHAL014A