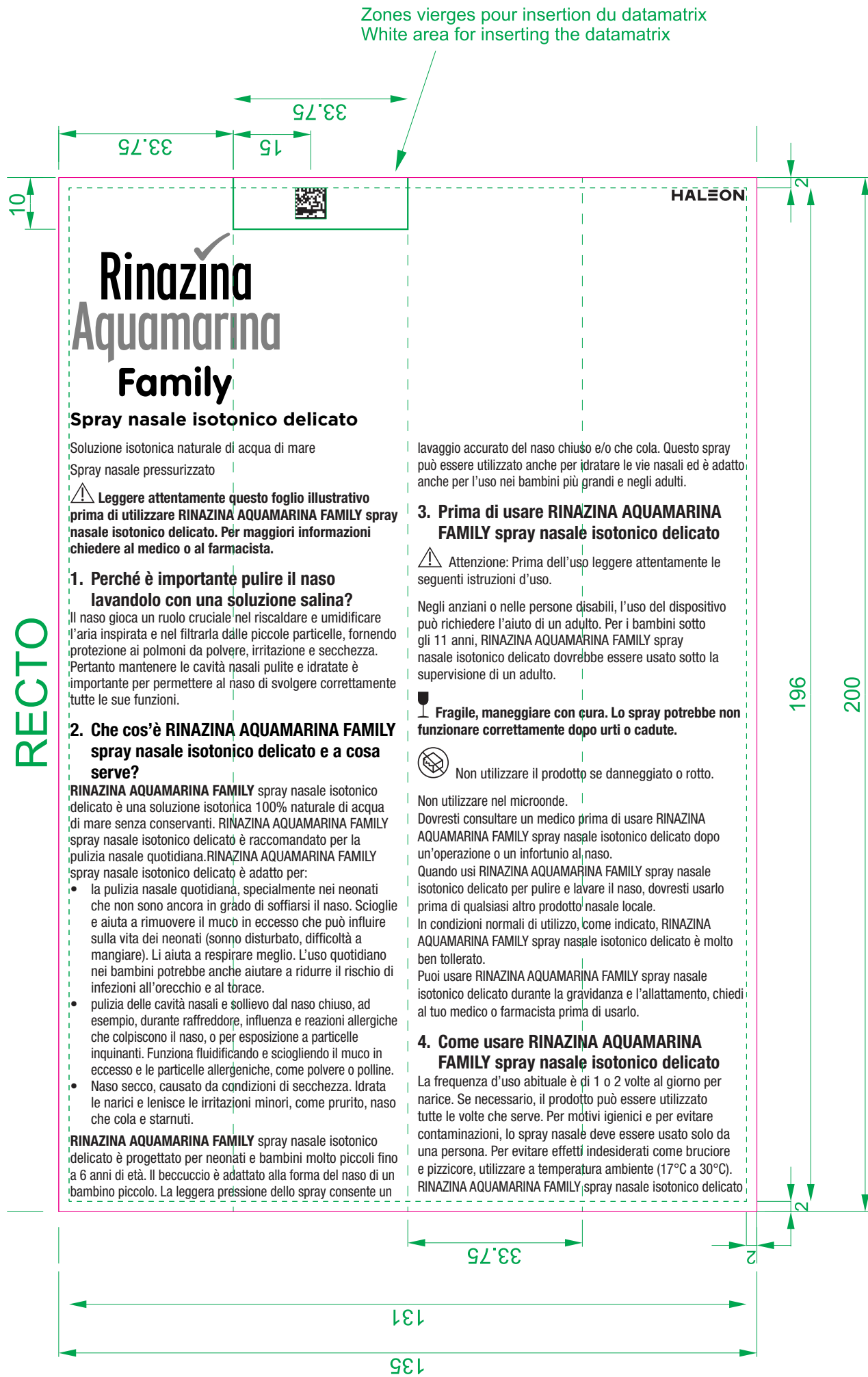


MMP PACKETIS  
DATE : 14/04/2021  
CLIENT : FAREVA  
Lxl ouvert : 135.0 x 200.0 mm  
Lxl fermé : 33.75 x 200 mm  
PAPIER : (2P)4V  
SURFACE : 27000  
N° ETUDE : 135x200\_2\_FAREVA



V1

24 - Jul - 2025

Artwork Information Panel

HALEON

Non Production Artwork

Production Artwork

Component No: AWP No:  
ANA90HAL003B TR3635677/A

Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1

Manufacturing Site:  
SPPH

Approving Market:  
Italy

Process  
1, black

Technical Drawing No:  
135X200\_33.75X200\_3\_FAREVA - Surface decorable notice

Material Spec No:  
N/A

Body Text Size: 8.0pt  
Smallest Text Size: 8.0pt

Total Special Finishes: 0

Electronic Verification Code:  
ANA90HAL003B

Printer and User notes:  
N/A

Studio Location: Europe

BARCODE INFO

Barcode Type: Data Matrix  
Barcode Number: ANA90HAL003B  
Magnification: 100  
BWR: 0 Micrometre

MMP PACKETIS  
DATE : 14/04/2021  
CLIENT : FAREVA  
Lxl ouvert : 135.0 x 200.0 mm  
Lxl fermé : 33.75 x 200 mm  
PAPIER : (2P)4V  
SURFACE : 27000  
N° ETUDE : 135x200\_2\_FAREVA

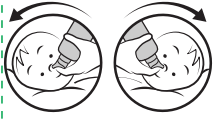
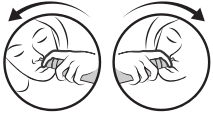
VERSO

è adatto per neonati, bambini e adulti, anche durante la gravidanza o l'allattamento. Tuttavia, è consigliabile consultare un medico prima di utilizzarlo su neonati di età inferiore a 2 settimane, o se si è in gravidanza o in allattamento.

Istruzioni per la pulizia e il lavaggio del naso:

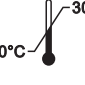
- Soffiarsi il naso, se necessario.
- Prima e dopo l'uso di RINAZINA AQUAMARINA FAMILY, lavarsi accuratamente le mani.
- Rimuovere il cappuccio protettivo dallo spray.
- Se lo spray non è stato usato per un lungo periodo, spruzzare una volta nell'aria prima dell'uso. In caso di blocco dell'ugello, pulirlo sotto acqua calda corrente e asciugarlo bene con un fazzoletto pulito.
- Per i bambini che non possono usare il prodotto da soli: Sdraiare il bambino sulla schiena con la testa inclinata da un lato, in modo che il liquido possa defluire più facilmente (Fig. 1).
- Per bambini e adulti che possono usare il prodotto da soli: Inclinare la testa in avanti sopra un lavabo, inclinata da un lato, in modo che sia il più orizzontale possibile (Fig. 2).
- Inserire delicatamente l'ugello nella narice superiore e spruzzare brevemente (2-3 secondi).
- Poi, inclinare la testa dall'altro lato e ripetere nell'altra narice.
- Lasciare agire il prodotto per alcuni secondi. Non soffiarsi il naso durante questo tempo, ma pulirlo se necessario.
- Poi, soffiarsi il naso, se necessario.
- Dopo ogni uso, pulire l'ugello sotto acqua calda corrente, asciugarlo bene con un fazzoletto pulito e rimettere il cappuccio protettivo.


Non usare materiali chimici, detersivo per piatti o disinfettante.


**5. Per la tua sicurezza**  
**Avvertenze**  
**Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.** Non mettere la soluzione negli occhi, bocca o orecchie. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno degli ingredienti (vedi lista ingredienti). Contenitore sotto pressione: Può esplodere se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici calde. Non fumare. Non perforare né bruciare, neanche dopo l'uso. Se hai ulteriori domande sull'uso di questo prodotto, chiedi al tuo medico o farmacista. Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave correlato all'uso RINAZINA AQUAMARINA FAMILY spray nasale isotonic delicato al fabbricante e al Ministero della Salute (www.salute.gov.it). Il beccuccio è stato studiato per adattarsi alla forma naturale delle narici anche dei bambini. L'anello di sicurezza evita l'inserimento profondo nel naso e lesioni nei bambini.

**6. Come conservare RINAZINA AQUAMARINA FAMILY spray nasale isotonic delicato**  
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservare lo spray nella confezione originale.


 Conservare tra 0°C e 30°C.

Non congelare. Contenuto sotto pressione:  proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.




**7. Altre informazioni**  
**Ingredienti:** acqua di mare (31,8g/100mL) e acqua depurata. Senza conservanti. L'azoto è aggiunto come gas propellente inerte nel dispositivo pressurizzato. Il gas propellente non entra in contatto con la soluzione. Rinazina Aquamarina Family è disponibile in spray nasale da 100 ml.



 Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Svizzera.

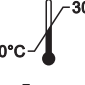
**EC REP** Haleon Medical Devices, Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, X35 Y983, Irlanda


**CE 0459**  Fragile, maneggiare con cura


**MD** Data: Aprile 2025

Contatti locali:  
 [mystory.it@haleon.com](mailto:mystory.it@haleon.com)  
 800.931.556  
 [www.rinazina.it](http://www.rinazina.it)

 Attenzione  
 Non utilizzare se la confezione è rotta o danneggiata


 Limite di temperatura

 Produttore

 Tenere lontano dalla luce solare

**EC REP** Rappresentante autorizzato nella comunità Europea

**MD** Dispositivo medico

 Singolo uso per singolo paziente

ANA90HAL003B

135

196

200

Zones vierges derrière le datamatrix  
White area behind the datamatrix

V1		Artwork Information Panel		HALÉON	
24 - Jul - 2025					
Non Production Artwork	<input type="checkbox"/>	Production Artwork	<input checked="" type="checkbox"/>	Component No:	AWP No:
Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1				ANA90HAL003B	TR3635677/A
				Manufacturing Site:	SPPH
				<small>Note: North American Artwork will have N/A in this field</small>	
				Approving Market:	Italy
				Technical Drawing No:	135X200_33.75X200_3_FAREVA - Surface decorable notice
				Material Spec No:	N/A
				<small>Note: North American Artwork will have N/A in this field</small>	
				Body Text Size:	8.0pt
				Smallest Text Size:	8.0pt
				<small>Note: For North American Artwork, see Regulatory Spec for this information</small>	
				Electronic Verification Code:	ANA90HAL003B
Total Special Finishes: 0				Printer and User notes:	N/A
Studio Location: Europe					

BARCODE INFO	
Barcode Type	Data Matrix
Barcode Number	ANA90HAL003B
Magnification	100
BWR	0 Micrometre