

Otrivin Baby Aspirator (zacht neusdopje) - Neusjeëneliger voor baby's, zuigelingen en kinderen.

Het leegzuigen van de neus wordt aanbevolen bij elke verstopte neus van uw baby en dit is zo vaak de nodig en vooral vóór de maaltijd of slapen van uw baby. Dit product helpt het neusje van uw baby te reinigen door neusslijm op een zachte manier te verwijderen. Eenvoudig en hygiënisch in gebruik.

Otrivin Baby Aspirator helpt uw baby normaal te ademen, te eten, te slapen en zich weer beter te voelen.

Het verwijderen van neusslijm helpt om verdere complicaties zoals oorinfecties (otitis), infecties van de sinussen (bijholte ontsteking) of hoesten te voorkomen. Het verlaagt ook de kwantiteit van de sloop van de baby tijdens een verkoudheid. U kunt Otrivin Baby Aspirator ook gebruiken na een zoutoplossing of zeevatoplossing voor de neus zoals Otrivin Baby Monodose, Otrivin Baby Zoutoplossing. Het maakt het gemakkelijker om neusslijm uit de neus van het kind te verwijderen en maakt de neus vrij. Dit product is bedoeld voor wie niet zelf de neus kan snuiten, zoals pasgeboren baby's, zuigelingen en kinderen. Voor gebruik bij een pasgeboren baby dient u eerst medisch advies in te winnen.

Wie moet de Otrivin Baby Aspirator hanteren?

Om veiligheidsredenen moet Otrivin Baby Aspirator worden gebruikt door de ouder of verzorger die de gebruiksaanwijzing kan lezen en begrijpen, mond, neus, oor en ogen kan onderscheiden en basisconcepten voor hygiëne kan begrijpen. Er worden 2 zachte wegwerpdopjes geleverd bij Otrivin Baby Aspirator. Elk dopje bevat een absorberende filter wat zijn vasthoudt, voor een hygiënisch proces. De wegwerpdopjes zijn ook apart verkrijgbaar in verpakkingen per 10 stuks.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik alleen Otrivin Baby Wegwerpdopjes met de Otrivin Baby Aspirator. Raadpleeg een arts voordat u Otrivin Baby Aspirator gebruikt na een verwonding of een recente neusoperatie. Niet gebruiken in geval van overvochtigheid voor één van de materialen (zie samenstelling).

Geen gebruik van beschadigd product gebruiken.

Gebruik geen gebruik van beschadigd neusdopje of een neusdopje met een ontbrekende of beschadigde filter. Gebruik het product wanneer uw baby in een rustige houding neeft. Het mandstuk dient stevig tussen de lippen worden gehouden. Elk eenig incident met betrekking tot Otrivin Baby Aspirator moet worden gemeld aan de lokale contact persoon van de fabrikant en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Om hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de verschillende componenten van Otrivin Baby Aspirator correct zijn gemonteerd en niet zijn gemonteerd met een gebruikt neusdopje.

1. Was uw handen zorgvuldig voor gebruik van Otrivin Baby Aspirator.
 2. Plaats een zacht neusdopje (A) op het centrale gedeelte (B) van het hulpmiddel. Plaats geen gebruikt neusdopjes.
 3. Plaats het mandstuk (C) in uw mond (ouder, verzorger) en plaats het einde van het neusdopje (A) in één van de neusgaten van u of uw baby. Voer een betere werking van het hulpmiddel is het aangraden om het andere neusgat dicht te houden tijdens het leegzuigen.
 4. Zuig zachtes, traag en regelmatig door het mandstuk (C).
 5. Indien het neusdopje val raakt tijdens het leegzuigen, vervang dan het neusdopje.
 6. Herhaal deze handelingen in het andere neusgat.
 7. Schoonmaak instructie
- Verwijder het gebruikte neusdopje (A). Veeg de buitenkant

van het mandstuk (C) met een schone vochtige tissue met warm water. Droog de buitenkant van het mandstuk met een tissue. ALLEEN in geval van neusslijm in het centrale deel: maak het centrale deel (B) los van de plastic slang. Spoel het centrale deel (B) af met warm water en laat het uitlekken om te drogen, voordat u de slang opnieuw bevestigt. Was uw handen zorgvuldig.



Vraag advies aan uw arts, apotheker of drogist indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product.

0 °C - 30 °C Bewaren tussen 0 °C en 30 °C.

Niet gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gooi het product weg volgens uw lokale voorschriften en houd altijd rekening met het milieu. Gooi de gebruikte aspirator en neusdopjes bij het restafval. Gooi de plastic omhulsel bij het plastic of restafval afhankelijk volgens de sorteringsslag van uw gemeente.

⊗ Geen gebroken of beschadigd product gebruiken.

⚠ Voorzichtig: Lees aandachtig de instructies op de verpakking alvorens dit product te gebruiken.

⊗ Éénmalig gebruik: De dopjes zijn voor éénmalig gebruik. De andere onderdelen van het product kunnen hergebruikt worden.

Samenstelling: Aspirator: polypropyleen, styreen-ethyleen-butyleen-styreen, siliconen. Neusdopjes: PVC en melamine schuim.

Inhoud: 1 aspirator | bestaande uit het centrale gedeelte (B) met 1 flexibele slang en 1 mandstuk (C) en 2 zachte wegwerpdopjes (A).

HALOON CH SARL, Route de l'Éclair, 1977 Prangins Zviterland

REG HALEON Medical Devices, Clocherne Youghal Road

Dungan Co. Waterford,

X35 1963, Ierland

Lokale contactpersoon:

0800 4090005

mystory.nl@haloon.com

www.otrivin.nl

Trade marks are owned by or licensed to the Haleon group of companies.

©2023 Haleon group of companies or its licensor.



datum: Juni 2023

2020007-NL-Z121350