



Met absorberend filter

**Wegwerpdopjes  
voor gebruik bij  
Otrivin Baby Aspirator**



**Zachte  
Wegwerpdopjes**

**Otrivin  
baby**

NOEHL

**Zachte Wegwerpdopjes**

**Otrivin  
baby**

Bevat 10 zachte wegwerpdopjes met absorberende filter om te gebruiken met de Otrivin Baby Aspirator – Neusjesreiniger voor baby's. Neusjesreiniger (zacht neusdopje) apart verkrijgbaar. Lees aandachtig de instructies op de verpakking van Otrivin Baby Aspirator (zacht neusdopje) alvorens dit product te gebruiken.

Het leegzuigen van de neus wordt aanbevolen bij elke verstopte neus van de baby, zo vaak als nodig en vooral vóór de maaltijd of slapengaan van de baby. Otrivin Baby Aspirator en Wegwerpdopjes (zacht neusdopje) zijn ontwikkeld om het neusje van de baby te reinigen door neusslijm op een zachte manier te verwijderen. De zachte neusdopjes zijn ontwikkeld aangepast aan het neusje van de baby.

Elk wegwerpdopje, individueel verpakt, bevat een absorberende filter om slijm te verzamelen, waardoor het proces volledig hygiënisch is.

Otrivin Baby Wegwerpdopjes zijn eenvoudig, hygiënisch in gebruik in combinatie met Otrivin Baby Aspirator helpen uw baby normaal te ademen, slapen, eten en zich weer beter te voelen. Het verwijderen van de neusslijm helpt om verdere complicaties zoals oorinfecties (otitis), infecties van de sinussen (sinusitis) of hoesten te voorkomen. Het verbeitert ook de kwaliteit van de slaap van de baby tijdens een verkoudheid.

U kunt Otrivin Baby Aspirator ook gebruiken na een zoutoplossing of zeewateroplossing voor de neus zoals Otrivin Baby Monodose, Otrivin Baby Zoutoplossing.

Het maakt het gemakkelijker om neusslijm uit de neus van het kind te verwijderen en maakt de neus vrij.

Voor wie is de Otrivin Baby Aspirator en Wegwerpdopjes geschikt? Dit product is bedoeld voor wie niet zelf de neus kan snuiten, zoals pasgeboren baby's, zuigelingen en kinderen.

Voor gebruik bij een pasgeboren baby dient u eerst medisch advies in te winnen.

Wie moet de Otrivin Baby Aspirator en Wegwerpdopjes hanteren? Om veiligheidsredenen moet Otrivin Baby wegwerpdopjes worden gebruikt door de ouder of verzorger die de gebruiksaanwijzing kan lezen en begrijpen, mond, neus, oor en ogen kan onderscheiden en basisconcepten voor hygiëne kan begrijpen.

**Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.** Gebruik enkel Otrivin Baby Aspirator samen met Otrivin Baby Wegwerpdopjes.

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de materialen (zie samenstelling). Gebruik geen gebruikte of beschadigde neusdopjes of neusdopjes waarvan het filter ontbreekt of beschadigd is. Voor hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, zijn de neusdopjes voor éénmalig gebruik. Na gebruik dienen de dopjes te worden weggegooid.

Vraag uw arts, apotheker of drogist indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product.

Elk ernstig incident met betrekking tot Otrivin Baby Wegwerpdopjes moet worden gemeld aan het lokale contact van de fabrikant en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

**Samenstelling:**  
PVC en melamine schuim.

**Bewaring:**  
 Bewaren tussen 0°C en 30°C.

Niet gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Gooi het product weg volgens de lokale voorschriften en houd altijd rekening met het milieu. Gooi de gebruikte neusdopjes bij het restafval en de kartonnen verpakking bij karton en papier.