

# Otrivin

## Zoutoplossing plus Eucalyptus Neusspray bij verstopte neus Natuurlijk hypertoon zeewater

Tijdens een verkoudheid leidt het ontstekingsproces tot zwelling van het neusslijmvlies, verstopte neus en verhoogde slijmproductie. Het hypertone\* zeewater creëert een drukverschil tussen de oplossing en het slijmvlies (osmotisch effect), waardoor de zwelling van de neusholtes verminderd wordt.

Het product verzacht en maakt ook het overtollige slijm los door de osmotische werking van de hypertone oplossing en helpt slijm en slijm verstrikte bacteriën en virussen uit de neus te verwijderen door het vochtverwijderend effect.

\* Hypertone zeewateroplossingen verschillen van isotone zeewateroplossingen omdat de zeezoutconcentratie is ingesteld op 2,2% om een verstopte neus effectief te verlichten. Deze concentratie zorgt er ook voor dat de oplossing zacht genoeg is om compatibel te zijn met het neusslijmvlies.

### 1. Wat is Otrivin zoutoplossing plus Eucalyptus en waarvoor wordt het gebruikt?

Otrivin zoutoplossing plus Eucalyptus is een neusspray die natuurlijk hypertoon zeewater met Eucalyptus globulus aroma bevat. De onverdunde oplossing bevat ook de rijkheid aan alle belangrijke mineralen en micro-elementen die in zeewater zitten. Otrivin Zoutoplossing plus Eucalyptus ontzwellt de neus bij een verkoudheid, rhinofaryngitis/nasofaryngitis en verstopte neus.

Otrivin Zoutoplossing plus Eucalyptus verlicht nasale symptomen waardoor je je beter kan gaan voelen en dus meer kwaliteit van het leven ervaart.

Otrivin zoutoplossing plus Eucalyptus is een natuurlijk ontzwellend middel voor de neus dat:

- Een efficiënte natuurlijke verlichting geeft bij neusverstopping als gevolg van een verkoudheid en neusbijholteontsteking door de neuszwelling te verlichten
- De neusholtes zuivert met zijn vochtverwijderend effect

- Helpt de in het slijm verstrikte bacteriën en virussen uit de neus te verwijderen met een natuurlijke mechanische werking door vocht verwijdering
- Zorgt voor een aangenaam gevoel van verlichting en frisheid, heeft een niet-uitdrogende werking en hydrateert het neusslijmvlies.

Zorgt voor een fris gevoel in minder dan 15 seconden. Otrivin Zoutoplossing plus Eucalyptus is geschikt voor kinderen ouder dan 6 jaar en volwassenen.

### 2. Voordat u Otrivin Zoutoplossing plus Eucalyptus gebruikt

⚠ Opgelet, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

#### Contra-indicaties

Gebruik het product niet bij allergie voor een van de ingrediënten.

Gebruik het product niet bij astma.

Gebruik het product niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruik het product niet tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding.

Bij contact met de ogen: zorgvuldig spoelen met water gedurende enkele minuten.

De volgende bijwerking is beschreven:

- Zeldzame gevallen van voorbijgaande nasale reactie (<0,001%)
- Uitzonderlijke gevallen van epistaxis, misselijkheid, hoofdpijn (< 0,0001%)

Als een symptoom/bijwerking optreedt, stop dan met het gebruik. Raadpleeg uw arts als het effect aanhoudt.

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan het Laboratoire de la Mer en de plaatselijke bevoegde autoriteit.


### 3. Hoe Otrivin Zoutoplossing plus Eucalyptus gebruiken?

Voor kinderen ouder dan 6 jaar en volwassenen: 2 verstuivingen in elk neusgat tot 6 keer per dag.

Toezicht door een volwassene wordt aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

1. Snuit de neus.
2. Verwijder de beschermkap.

3. Druk voor het eerste gebruik een paar keer stevig op de verstuiver totdat de oplossing eruit spuit.

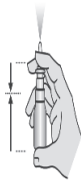

4. Spuit in elk neusgat, met uw hoofd rechtop, adem zacht in door de neus.
5. Laat de oplossing een paar minuten inwerken voordat u uw neus snuit.
6. Reinig na elk gebruik de sproeikop en plaats de beschermkap terug.
7. Bewaar op een droge plaats en in de originele verpakking.

Gebruik slechts één product per persoon om verspreiding van infecties te voorkomen.

Otrivin Zoutoplossing plus Eucalyptus neusspray is beschikbaar in een 20 ml gedoseerde neusspray.

De maximale behandelingsduur wordt geschat op 10 dagen. Als nasale symptomen blijven aanhouden, raadpleeg dan een professionele zorgverlener.

Kan alleen of in combinatie met medische behandelingen worden gebruikt (bijv. lokale decongestiva, corticosteroiden, antihistaminica). Raadpleeg uw professionele zorgverlener.

#### 4. Voor uw veiligheid

 Gebruik geen gebroken of beschadigd product.

Niet gebruiken als het apparaat zijn oorspronkelijke uiterlijk heeft verloren.

Gebruik het product niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.

Gebruik het product niet meer na 6 maanden na eerste opening.

Houd het product buiten het bereik en zicht van kinderen.


#### 5. Hoe Otrivin Zoutoplossing plus Eucalyptus neusspray gebruiken?

 <sup>25°C</sup> Bewaren beneden 25°C. Gebruik bij kamertemperatuur.

#### INGREDIËNTEN

97% Maris aqua, Sorbitol, Aroma (Mint - Eucalyptus globulus essential oil), Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate & Aqua, Polypepsilon-Lysine & Aqua.

Zonder chemisch conserveermiddel. Drijfgas vrij. Formule van natuurlijke oorsprong.

 Wettelijke fabrikant van het product  
Laboratoire de la Mer  
Avenue du Général Patton  
ZAC de la Madeleine  
35400 (Saint-Malo)  
France



Distributeur

**HALEON**

tel. : 0800 4090005

email: [mystory.nl@haleon.com](mailto:mystory.nl@haleon.com)

Gebruiksaanwijzing revisiedatum: 2022-04 V03

Neusspray

20 mL



Geschatte hoeveelheid



Distributeur



Europese conformiteit en identificatie van de aangemelde instantie



Gooi het product weg in de prullenbak



Recycleerbaar karton



Recycleerbaar papier



Identificatie lotnummer van het product



Houdbaarheidsdatum van het product



Unieke hulpmiddelenidentificatie

CNOT1414