

OtriBaby

Saltvannsløsning Engangsdoser

Engangsdose

Steril isoton saltvannssoppløsning med 0,74 % natriumklorid.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før bruk av OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose. Hvis du har spørsmål, kontakt lege eller apotek.

1. Hvorfor er det viktig med grundig nesevask?

Spedbarn, barn og voksne får ofte problemer med å puste på grunn av oppsamling av slim og skorper og tørrhet i neseslimhinnen. Overproduksjon av slim er spesielt vanlig hos babyer og er et symptom på tett og rennende nese. I slike situasjoner vil babyen, som ennå ikke kan fjerne neseseCRET ved å pusse nesen selv, ha vansker med å puste, spise og sove og blir da irritabel og urolig.

Rensing av nesen med saltvannssoppløsning kan bidra til å forebygge og lindre tett nese og kan i noen tilfeller bidra til å unngå komplikasjoner som bihulebetennelse og ørebetennelse.

Særlig hos små barn kan slik rensing kombineres med å suge ut slimet.

2. Hva OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose er og hva det brukes mot

OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose er en steril og isoton saltvannssoppløsning uten konserveringsmidler. Saltkonsentrasjonen er optimalisert for å forhindre irritasjon i nesen. Oppløsningen inneholder kastorolje (makroglycylalhydroksystearat), som er kjent for sine fuktgivende og bløtgjørende egenskaper.

OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose er anbefalt for:

- Skånsom rensing av nesehulen ved tett nese, for eksempel ved forkjølelse eller ved allergi, ved vasking for å fjerne overflødig slim eller allergifremkallende partikler som støv eller pollen.
- Fukting av neseslimhinnen når den er tørr eller irritert ved mindre irritasjoner i nesen eller på grunn av lav

luftfuktighet (for eksempel i rom med oppvarming/klimaanlegg, ved stor høyde over havet eller under flyreiser).

- Fortynning og løsning av neseseCRET slik at det blir enklere å fjerne.

OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose er spesielt egnet til daglig rensing av nesen hos babyer som ennå ikke kan pusse nesen selv:

- Daglig rensing løser slim i nesen og fjerner overflødig neseseCRET som kan redusere babyers livskvalitet (dårlig søvn, spisevansker). Det hjelper dem med å puste slik at de føler seg bedre igjen.
- Hvis det er overflødig slim, kan man bruke en neseenser som OtriBaby Neseenser til å rense spedbarnets eller babyens nesebor like etter at oppløsningen er tilført. Samtidig bruk av OtriBaby Neseenser og saltvannssoppløsningen gjør det enklere å fjerne slim fra nesen og dermed bidra til å redusere risikoen for videre komplikasjoner som mellomørebetennelse og bihulebetennelse. En forkjølet baby vil da også sove mye bedre.

3. Før du bruker OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose



Advarsel, les bruksanvisningen i pakningen nøye før bruk.



Bruk ikke et ødelagt eller skadet produkt.

På grunn av produktets rensende egenskaper er det anbefalt å benytte OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose før man bruker et annet lokalt neseprodukt (for eksempel mot forkjølelse eller allergisk rhinitt).

Under normal bruk, som indisert, tolereres OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose svært godt.

OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose kan brukes under graviditet og amming. Snakk med lege eller apotek før du bruker produktet.

4. Hvordan du bruker OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose

Normal dosering er 2-4 ganger daglig i hvert nesebor.

Produktet er egnet for spedbarn, barn og voksne. Du bør imidlertid rådføre deg med lege før bruk hos spedbarn som er under 2 uker gamle.

Hos barn under 11 år bør OtriBaby Saltvannsløsning brukes under tilsyn av en voksen.

Hos eldre eller funksjonshemmede kan bruken av produktet kreve hjelp fra en voksen.





Av hygieniske grunner og for å unngå forurensning er beholderen tiltenkt for engangsbruk og bør kun brukes av én person. En åpent beholder skal ikke gjenbrukes. Brukte beholdere skal kastes.

Optimal temperatur ved bruk er romtemperatur (vanligvis 17 °C–30 °C).

Vask hendene godt før du åpner beholderen.

1. Puss nesen om nødvendig.
2. Bryt av en enkeltdosebeholder og åpne den ved å vri av toppen.
3. Bøy hodet bakover og plasser tuppen av beholderen like innenfor åpningen i neseboret.
4. Trykk forsiktig på beholderen for å presse ut noen få dråper og hardere hvis det kreves grundig rensing. Gjenta i det andre neseboret.
5. Vent noen få sekunder og puss deretter nesen om nødvendig.
6. Når produktet brukes til å rense neseborene til et spedbarn eller en baby som ikke er i stand til å pusse nesen selv, bør en neserenser som OtriBaby Saltvannsløsning brukes til å fjerne slim.
7. Kast brukte beholdere og vask hendene.

5. For din sikkerhet

Produktet skal oppbevares utliggjelig for barn.

Dette produktet er kun til utvortes bruk. Det skal ikke injiseres.

Produktet skal ikke brukes ved allergi overfor noen av ingrediensene (se liste over ingredienser). Oppløsningen skal ikke brukes i øynene



Bruk ikke et ødelagt eller skadet engangsdose.

Kontakt lege eller apotek hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av dette produktet.

Hvis du opplever en alvorlig hendelse i tilknytning til bruken av OtriBaby Saltvannsløsning, skal det rapporteres til produsenten og Legemiddelverket.

6. Hvordan du oppbevarer OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose

Produktet skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.



Oppbevares ved 0 °C–30 °C.

Skal ikke fryses.

Beholderne skal oppbevares i originalpakningen.

Kast produktet i henhold til lokale krav og ta alltid hensyn til miljøet.

7. Ytterligere informasjon

Liste over ingredienser: natriumklorid, makrogolglycerolhydroksystearat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat og rensert vann. Uten konserveringsmidler.

OtriBaby Saltvannsløsning engangsdose er tilgjengelig som enkeltbeholdere à 5 ml i pakninger med 18 stk.



Haleon CH SARL,
Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Sveits.



STERILE A



0459

EC REP



Haleon Medical Devices,
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan,
Co. Waterford, X35 Y983, Irland

Lokal kontakt: mystory.nd@haleon.com
www.otrivin.no



Dato: Juli 2023



Advarsel



Ikke bruk hvis pakken er skadet



Temperaturrenser



Produsent

EC REP

Autorisert representant i Det
Europeiske Fellesskap



Ikke til gjenbruk

STERILE A

Sterilisert med aseptiske
prosesseringsteknikker



Utløpsdato

LOT

Batchnr.



Importør



Medisinsk utstyr



Produksjonsdato