

OtriBaby

Næsesuger (med blødt engangsfilter)

Læs venligst denne indlægsseddel omhyggeligt før anvendelse af OtriBaby Næsesuger. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du har spørgsmål.

1. Hvad OtriBaby Næsesuger er og hvad den anvendes til

OtriBaby Næsesuger anvendes til nyfødte, babyer og børn. Når børn er forkelede, kan de have en tilstoppet og blokeret næse og dermed besvær med at trække vejret, spise og sove. Da de er for små til selv at kunne pudse deres næse, kan en næsesuger være en meget effektiv måde til at afhjælpe den tilstoppede næse.

Næsesugning anbefales, når dit barns næse er tilstoppet og ved behov; specielt inden dit barn skal have mad eller skal sove. Produktet er udformet til at rense dit barns næse ved skånsomt at fjerne sekret i næsen.

Dets ergonomiske form og bløde materiale sikrer en god håndtering. OtriBaby Næsesuger er skånsom for barnets næse grundet de bløde engangsfiltere, der er tilpasset dit barns næse.

OtriBaby Næsesuger er nem og hygiejnisk at bruge og hjælper dit barn med at spise, sove og trække vejret normalt igen, så det kan få det bedre.

Når man fjerner slim fra næsen forebygger dette yderligere komplikationer såsom øreinfektioner (otitis), bihulebetændelse (sinusitis) eller hoste. Det øger også kvaliteten af barnets søvn gennem forkøleelsesperioden.

Hvem vil have gavn af OtriBaby Næsesuger?

Dette produkt er tiltænkt individer, som ikke er i stand til at pudse deres næse selv såsom nyfødte, babyer og børn. For nyfødte bør du dog tage kontakt til lægen før brug.

Hvem bør håndtere OtriBaby Næsesuger?

Af sikkerhedsmæssige årsager skal OtriBaby Næsesuger håndteres af en forælder eller omsorgsperson, som er i stand til at læse og forstå indlægssedlen og kan skelne mellem mund, næse, ører og øjne og forstå simple hygiejne koncepter.

Der følger to bløde engangsfiltere med OtriBaby Næsesuger. Hver indeholder et absorberende filter, som sikrer hygiejnen ved at tilbageholde slim i filteret. Engangsfilterne er også tilgængelige i pakker af 10 stk.

2. Før anvendelse af OtriBaby Næsesuger

Brug kun OtriBaby engangsfiltere med OtriBaby Næsesuger.

Du bør kontakte en læge, inden du anvender OtriBaby Næsesuger efter en skade eller en nylig operation i næsen.

Produktet bør bruges på et hvilende individ. Mundstykket bør holdes fast mellem læberne.

Utilsigtede hændelser, der opstår i relation til brugen af OtriBaby Næsesuger, skal rapporteres til fremstilleren og Lægemiddelstyrelsen.

3. Sådan anvendes OtriBaby Næsesuger


Af hygiejniske årsager og for at undgå kontaminering, skal det sikres, at de forskellige dele af OtriBaby Næsesuger er samlet korrekt og at der ikke sidder et brugt engangsfilter i.

1. Vask hænderne omhyggeligt, inden du bruger OtriBaby Næsesuger
2. Placer et engangsfilter (A) i den centrale del af Næsesugeren (B). Anvend aldrig et brugt engangsfilter.
3. Tag mundstykket (C) mellem dine læber (forældre/ omsorgsperson) og placer spidsen af engangsfilteret (A)

ved åbningen af barnets ene næsebor. For at forberede enhedens ydeevne anbefales det at holde det andet næsebor lukket, imens du suger.

4. Sug forsigtigt, langsomt og jævnt igennem sugestykket (C).
5. Hvis engangsfilteret bliver fyldt under en sugning skal det skiftes og må ikke genbruges.
6. Gentag behandlingen i det andet næsebor.
7. **Rengøringsinstruks**

Fjern engangsfilteret (A) og smid det ud. Tør den ydre overflade af mundstykket (C) af, ved brug af en klud med varmt vand. Tør derefter den ydre overflade af mundstykket af med en serviet. KUN hvis der er slim eller sekret inde i den centrale del: Aftag den centrale del (B) fra plastiktuben. Rens den centrale del (B) med varmt vand og dræn for at tørre, før tuben sættes på igen. Sikr dig at næsesugeren er tør og opbevar i den originale emballage. Vask dine hænder omhyggeligt.

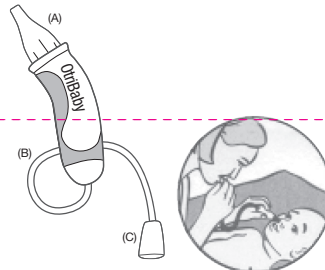

4. For din sikkerhed

Opbevar utilgængeligt for børn.

Brug ikke produktet ved allergi overfor indholdstofferne i næsesugeren (se sammensætningen i afsnit 6).

Brug ikke et ødelagt eller beskadiget produkt, et brugt eller ødelagt engangsfilter eller et engangsfilter med manglende eller beskadiget absorberende filter.



Anvend ikke et ødelagt eller beskadiget produkt.



Læs omhyggeligt vedlagte indlægsseddel før brug.



Engangsbrug: Engangsfilterne er til engangsbrug. De andre dele af enheden kan genbruges.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

5. Sådan opbevares OtriBaby Næsesuger

Må ikke opbevares ved temperaturer under 0 °C eller over 30 °C.

Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Opbevares i original emballage.

Bortskaf venligst produktet ifølge dine lokale krav og tag altid hensyn til miljøet.

6. Yderligere information

Sammensætning: Næsesuger: Polypropylen, styren-ethylenbutylenstyren, silikone.

Engangsfiltere: PVC og melaminskum

Fri for bisfenol A

Indhold: En næsesuger (den centrale del af næsesugeren (del B)), en fleksibel slange, et mundstykke (del C) og 2 bløde engangsfiltere.



OtriBaby

Neserenser (med myke engangsfiltre)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du bruker OtriBaby Neserenser. Hvis du har spørsmål, kontakt lege eller apotek.

1. Hva OtriBaby Neserenser er og hva det brukes til

OtriBaby Neserenser brukes til nyfødte, spedbarn og barn. Når barn er forkjølet kan de ha tett og blokkert nese, og de kan ha problemer med å puste, spise og sove. Siden de er for små til å kunne pusse nesen sin selv, kan en neserenser være en svært effektiv måte å avhjelpe nesetettheten på. Naserensing anbefales når barnet ditt har tett nese, så ofte som nødvendig, og spesielt før barnet skal spise eller sove. Produktet er utformet for å hjelpe å rensen nesen til barnet ditt ved forsiktig å fjerne plagsom sekret.

Dets ergonomiske form og myke materiale sikrer god håndtering. OtriBaby Neserenser er skånsom mot barnets nese, takket være de myke engangsfiltrene som er tilpasset barnets nese.

OtriBaby Neserenser er enkel og hygienisk å bruke, og hjelper barnet ditt med å spise, puste og sove normalt, slik at det kan få det bedre.

Rensing av nesen bidrar til å forebygge ytterligere komplikasjoner som mellomørebetennelse (otitt), sinusinfeksjoner (bihulebetennelse) eller hoste. Det forbedrer også barnets søvnkvalitet i perioder med forkjølelse.

Hvem vil ha nytte av OtriBaby Neserenser?

Dette produktet er beregnet på personer som ikke er i stand til å pusse nesen sin selv, slik som nyfødte, spedbarn og barn, men du bør oppsøke lege før du bruker det på en nyfødt baby.

Hvem kan håndtere OtriBaby Neserenser?

Av sikkerhetsgrunner skal OtriBaby Neserenser brukes av foreldre eller andre omsorgspersoner som kan lese og forstå pakningsvedlegget, skille mellom munn, nese, ører og øyne, og kjenner til grunnleggende hygieneprinsipper.

OtriBaby Neserenser selges med 2 myke engangsfiltre. Hvert inneholder et absorberende filter til oppsamling av slim, for å sikre hygien. Refil engangsfiltre er tilgjengelig i pakninger à 10 stk.

2. Før bruk av OtriBaby Neserenser

Bruk kun OtriBaby engangsfiltre sammen med OtriBaby Neserenser.

Du bør kontakte lege før bruk av OtriBaby Neserenser etter skade eller nylig operasjon i nesen.

Produktet bør brukes på en person som er i ro. Munnstykket skal holdes tett mellom leppene.

Alvorlige hendelser som skjer i forbindelse med bruk av OtriBaby Neserenser bør rapporteres til fabrikanten og Statens legemiddelverk.


3. Slik brukes OtriBaby Neserenser

Av hygieniske årsaker, og for å unngå overføring av smittestoff, må du være sikker på at de ulike delene av OtriBaby Neserenser er riktig satt sammen og at det ikke sitter i et brukt engangsfilter.

1. Vask hendene dine nøye før du bruker OtriBaby Neserenser.
2. Plassér et mykt engangsfiltre (A) i den sentrale delen (B) av utstyret. Bruk aldri et brukt engangsfiltre.
3. Plassér munnstykket (C) mellom leppene dine (foreldres/omsorgspersons) og sett toppen av engangsfiltret (A) ved åpningen av spedbarnets ene nesebor. For å få bedre virkning er det anbefalt å lukke det andre neseboret mens du suger.
4. Sug forsiktig, langsomt og jevnt gjennom munnstykket (C).
5. Dersom engangsfiltret blir fullt i løpet av rensingen skal det skiftes ut, og ikke brukes om igjen.
6. Genta behandlingen i det andre neseboret.
7. **Rengjøringsinstruksjoner**
Fjern engangsfiltret (A) og kast det. Tørk av det ytre

HALEON

munnstykket (C) med en klut med varmt vann. Tørk deretter ytre munnstykkets ytre overflate med en serviett. KUN hvis det er slim eller sekresjon inne i den sentrale delen: Løsn den sentrale delen (B) fra plastikkrøret. Skyll den sentrale delen (B) med varmt vann og tørk før du setter røret på igjen. Forsikre deg om at neserenseren er tørr og oppbevares i originalemballasjen. Vask hendene dine nøye.

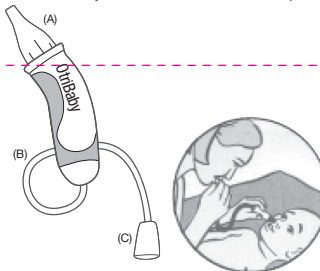

4. For din sikkerhet

Oppbevares utliggjelig for barn.

Brukes ikke ved allergi overfor noen av stoffene i utstyret (se pkt. 6 sammensetning).

Bruk ikke et ødelagt eller skadet produkt, og bruk ikke et brukt eller skadet sugestykke eller et sugestykke med manglende eller skadet filter.



Bruk ikke et skadet eller ødelagt produkt.



Les vedlagte pakningsvedlegg nøye før bruk.



Til engangsbruk: Engangsfiltrene er til engangsbruk. De andre delene av utstyret kan brukes om igjen.

Spør legen eller på apoteket hvis du er i tvil om noe.

5. Slik oppbevares OtriBaby Neserenser

Skal ikke oppbevares ved temperaturer under 0 °C eller over 30 °C.

Ikke bruk etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Oppbevares i originalpakningen.

Kast produktet ifølge dine lokale regler for søppel. Ta alltid hensyn til miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Sammensetning: Neserenser: Polypropylen, styren-etylenbutylenstyren, silikon.

Engangsfiltre: PVC og melaminiskum

Inneholder ikke bisfenol A.

Innhold: En nasal aspirator (den sentrale delen av nasal aspiratoren (del B)), en fleksibel slange, et munnstykke (del C) og 2 myke engangsfiltre.



Haleon CH SARL,
Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Schweiz/Sveits



Haleon Medical Devices,
Clocherane,
Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
X35 Y983,
Ireland



Dato: Juni 2023

Mystory.nd@haleon.com

05NO103-DK/NO 000140