

122,32 mm

85,63 mm

HALÉON

RINOMER  
baby

NARHINELsoft  
**Aspirador Nasal**  
+ 2 recargas suaves

**Fácil e  
higiénico de  
usar**


Confortável  
Antiderrapante

Ajuda a limpar o nariz do seu  
bebé, removendo delicadamente  
as secreções nasais.

05E1Z6-PT 000196

Para bebés, lactentes e crianças

PASSO 2

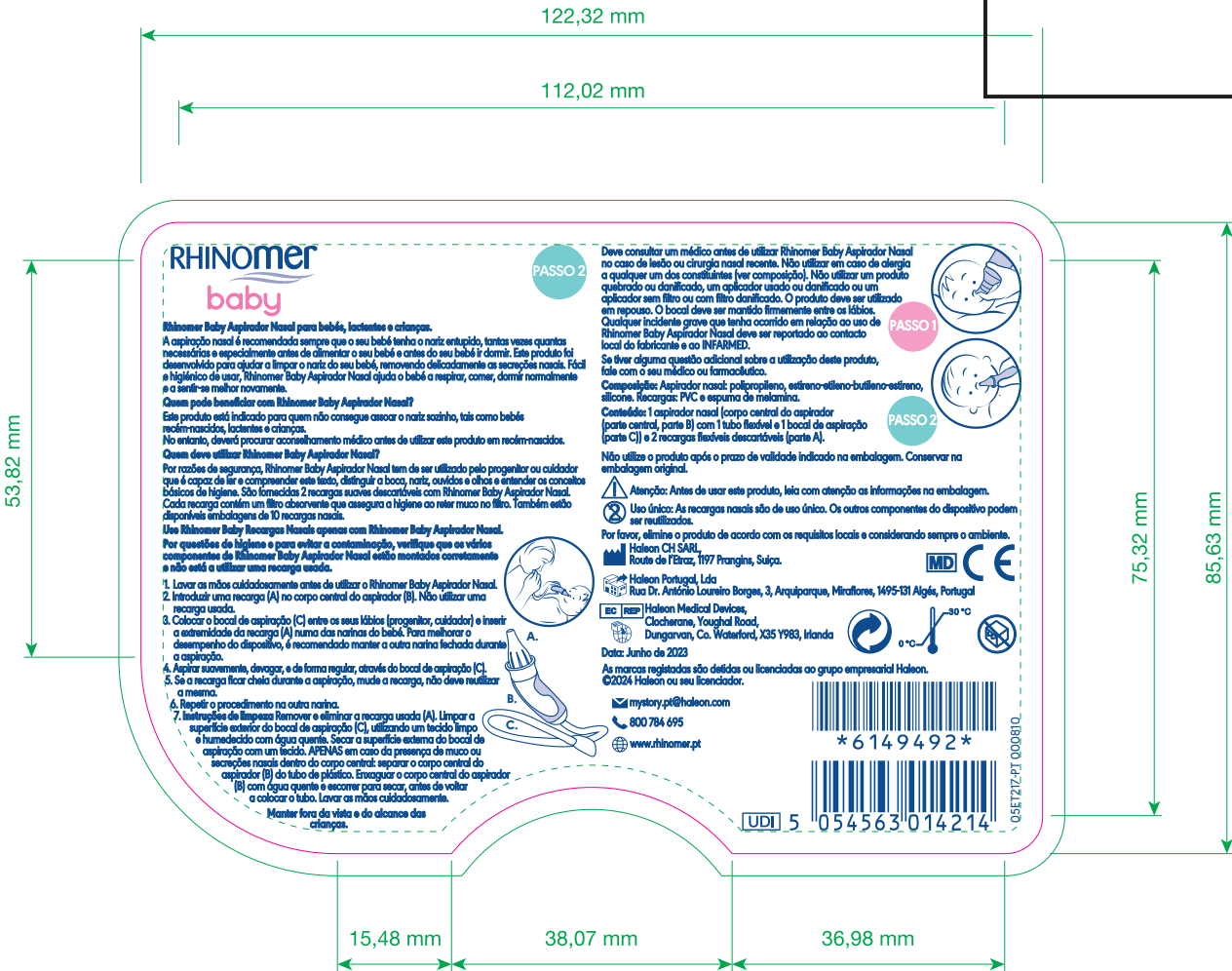

# RHINOMER baby

Rhinomer Baby Aspirador Nasal para bebés, lactentes e crianças.

A aspiração nasal é recomendada sempre que o seu bebé tenha o nariz entupido, tantas vezes quantas necessitadas e especialmente antes de alimentar o seu bebé e antes do seu bebé ir dormir. Este produto foi desenvolvido para ajudar a limpar o nariz do seu bebé, removendo delicadamente as secreções nasais. Fácil e higiénico de usar, Rhinomer Baby Aspirador Nasal ajuda o bebé a respirar, comer, dormir normalmente e a sentir-se melhor novamente.

Quem pode beneficiar com Rhinomer Baby Aspirador Nasal?

Este produto está indicado para quem não consegue assoar o nariz sozinho, tal como bebés recém-nascidos, lactentes e crianças.

No entanto, deverá procurar aconselhamento médico antes de utilizar este produto em recém-nascidos.

Quem deve utilizar Rhinomer Baby Aspirador Nasal?

Por razões de segurança, Rhinomer Baby Aspirador Nasal tem de ser utilizado pelo progenitor ou cuidador que é capaz de ler e compreender este texto, distinguir o boço, nariz, ouvidos e olhos e entender as conselhos básicos da higiene. São fornecidas 2 recargas suavis descartáveis com Rhinomer Baby Aspirador Nasal. Cada recarga contém um filtro absorvente que assegura a higiene ao reter muco no filtro. Também estão disponíveis embalagens de 10 recargas nasais.

Use Rhinomer Baby Recargas Nasais apenas com Rhinomer Baby Aspirador Nasal.

Por questões de higiene e para evitar a contaminação, verifique que os vários componentes de Rhinomer Baby Aspirador Nasal estão identificados corretamente e não está a utilizar uma recarga usada.

- Lavar as mãos cuidadosamente antes de utilizar o Rhinomer Baby Aspirador Nasal.
- Introduzir uma recarga (A) no corpo central do aspirador (B). Não utilizar uma recarga usada.
- Colocar o bocal de aspiração (C) entre os seus lábios (progenitor, cuidador) e inserir a extremidade da recarga (A) numa das narinas do bebé. Para melhorar o desempenho do dispositivo, é recomendado manter a outra narina fechada durante a aspiração.
- Aspirar suavemente, devagar e de forma regular, através do bocal de aspiração (C).
- Se a recarga ficar cheia durante a aspiração, mude a recarga, não deve reutilizar a mesma.
- Repetir o procedimento na outra narina.
- Inspecione de limpeza Remover e eliminar a recarga usada (A). Limpar a superfície exterior do bocal de aspiração (C), utilizando um tecido limpo e humedecido com água quente. Secar a superfície exterior do bocal de aspiração com um tecido. APENAS em caso da presença de muco ou secreções nasais dentro do corpo central: separar o corpo central do aspirador (B) do tubo de plástico. Enxaguar o corpo central do aspirador (B) com água quente e secar para secar, antes de voltar a colocar o tubo. Lavar as mãos cuidadosamente.

Mantém fora da vista e do alcance das crianças.

PASSO 2

Deve consultar um médico antes de utilizar Rhinomer Baby Aspirador Nasal no caso de lesão ou cirurgia nasal recente. Não utilizar em caso de alergia a qualquer um dos constituintes (ver composição). Não utilizar um produto quebrado ou danificado, um aplicador usado ou danificado ou um aplicador sem filtro ou com filtro danificado. O produto deve ser utilizado em repouso. O bocal deve ser manido firmemente entre os lábios. Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao uso de Rhinomer Baby Aspirador Nasal deve ser reportado ao contacto local do fabricante e ao INFARMED.

Se tiver alguma questão adicional sobre a utilização deste produto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Composição: Aspirador nasal: polipropileno, estireno-etileno-butileno-estireno, alicona. Recargas: PVC e espuma de melamina.

Conteúdo: 1 aspirador nasal (corpo central do aspirador [parte central], parte B) com 1 tubo flexível e 1 bocal de aspiração [parte C] e 2 recargas flexíveis descartáveis [parte A].

Não utilize o produto após o prazo de validade indicado na embalagem. Conservar na embalagem original.

Atenção: Antes de usar este produto, leia com atenção as informações na embalagem.

Uso único: As recargas nasais são de uso único. Os outros componentes do dispositivo podem ser reutilizados.

Por favor, elimine o produto de acordo com os requisitos locais e considerando sempre o ambiente.

Haleon CH SARL  
Route de Fèrax, 1177 Prangins, Suíça.

Haleon Portugal, Lda  
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, Arquiparque, Miraflores, 1495-131 Algue, Portugal

Haleon Medical Devices,  
Clochemare, Youghal Road,  
Dungarvan, Co. Waterford, X35 Y983, Irlanda


Data: Junho de 2023

As marcas registadas não são de ou licenciadas ao grupo empresarial Haleon.  
©2024 Haleon ou seu licenciador.

mystery.pt@haleon.com

800 784 695

www.rhinomer.pt

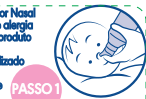

05E7127-PT 000810