

10 mm non imprimé

Tolérance 5 mm non imprimé



Spray nasal
Solução estéril e isotónica de água do mar

⚠ Por favor, leia com atenção este folheto antes de utilizar Rhinomer Baby Força extra suave. Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.

Limpa de forma natural, ajuda em caso de congestão nasal e hidrata.

Para bebés a partir das duas semanas de idade.

A higiene nasal do bebé

A função principal das fossas nasais é atuar como um filtro protetor do ar. O ar que inspiramos não é ar puro, pois contém pó, alérgenos, bactérias, vírus, fumos, etc. Em bebés e adultos, todas estas impurezas podem causar diversas situações, desde irritação nasal a constipações, alergias ou rinosinusites.

A higiene nasal do seu bebé é muito importante, uma vez que os seus mecanismos de defesa ainda são imaturos. Por este motivo, os bebés são mais suscetíveis às infeções e constipações.

O muco que está presente de uma forma natural nas vias nasais é necessário uma vez que atua como lubrificante e filtro do ar. No entanto, quando o bebé tem uma infeção nasal, existe uma maior produção de muco o que dificulta a respiração.

De realçar que os bebés com menos de 6 meses não sabem respirar pela boca, por isso quando as mucosidades obstruem as fossas nasais, a sua respiração torna-se difícil, choram e isto afeta a sua alimentação e o seu sono. Por este motivo é muito importante manter as suas fossas nasais limpas através da lavagem regular com água do mar.

1. O que é Rhinomer Baby Força extra suave?

Rhinomer Baby Força extra suave é um spray nasal muito suave à base de água do mar 100% natural indicado para a higiene nasal dos bebés desde as duas semanas de idade. A sua utilização diária contribui para:

1. Suavizar as mucosidades facilitando o assoar do nariz ou o uso de um aspirador nasal.
2. Restabelecer a respiração pelo nariz quando este está bloqueado.
3. Proteger contra constipações ou outras infeções do sistema respiratório superior.

Rhinomer Baby Força extra suave foi especialmente desenvolvido para o nariz delicado do bebé.

Uma solução de água do mar natural com todos os benefícios da água do mar.

A água do mar Rhinomer obtém-se diretamente do mar. Depois de um sistema de filtração inovador, o conteúdo em sais é reduzido de forma a que fique compatível com a mucosa nasal. Desta forma obtém-se uma solução

fisiológica. Uma vez que não é diluída, a água do mar Rhinomer mantém todos os sais minerais e oligoelementos da água do mar. O uso de Rhinomer ajuda a prevenir o risco de infeções secundárias e otites.

Uma embalagem inovadora

Rhinomer apresenta-se num frasco inovador que não requer gás propulsor e não contém conservantes, permitindo desta forma que a água do mar conserve toda a sua naturalidade à temperatura ambiente.

Rhinomer Baby Força extra suave é apropriado para o bebé graças à sua fina nebulização e ao seu aplicador com topo de segurança, especialmente desenhado para o nariz dos mais pequeninos.



2. Para que é utilizado Rhinomer Baby Força extra suave?


2.1 Casos de excesso de mucosidades, constipações e congestão nasal:

- Suaviza o muco, facilitando o assoar do nariz ou a utilização de um aspirador nasal. A eliminação das mucosidades ajuda a prevenir a ocorrência de complicações do trato respiratório superior (otites, bronquiolites), que são muito comuns em bebés.
- Ajuda de forma natural na congestão nasal no caso de constipações.

2.2 Higiene diária e prevenção ativa:

- Limpa e humidifica as fossas nasais do seu bebé, removendo pó, alérgenos, poluentes e agentes patogénicos (vírus e bactérias). O seu uso regular (mesmo quando o bebé não apresenta congestão ou mucosidades) ajuda a prevenir a ocorrência de complicações do trato respiratório superior (otites, bronquiolites).

3. Antes de utilizar Rhinomer Baby Força extra suave

-  Não utilize um spray nasal quebrado ou danificado. Não utilizar se o dispositivo perdeu a sua aparência original.

4. Como utilizar Rhinomer Baby Força extra suave

Rhinomer pode ser utilizado com a frequência desejada e Rhinomer Baby Força extra suave pode ser utilizado desde as duas semanas de idade.

Limpa, ajuda na descongestão e humidifica as fossas nasais:

- Em caso de corrimento nasal, mucosidades ou congestão nasal: são recomendadas 4 a 6 pulverizações em cada narina por dia.
- Para higiene e prevenção: 1 a 2 pulverizações em cada narina por dia.

210 mm

150 mm

10 mm non imprimé

Tolérance 5 mm non imprimé

Modo de utilização:

Aplicação de Rhinomer Baby Força extra suave:

É recomendado proceder à higiene nasal do bebé antes de o alimentar, quando o bebé está acordado e calmo.

Deite o bebé numa cama ligeiramente inclinada (30°) com a cabeça inclinada para um lado (nunca de costas, para evitar o risco da água do mar ir para a garganta do bebé).

1. Inserir suavemente o aplicador na narina superior e pressionar de forma firme uma vez por 1 ou 2 segundos.
2. Deixar a solução atuar durante alguns segundos.
3. Repetir a operação na outra narina.
4. Levantar o bebé e limpar o nariz ou utilizar Rhinomer Baby Narhinel Aspirador Nasal.

Limpe o aplicador com água quente depois de cada utilização e seque adequadamente.

Este produto nunca deve ser aplicado com a cabeça do bebé inclinada para trás uma vez que esta posição pode levar a uma aplicação incorreta do produto na garganta do bebé.

Caso o bebé tenha muitas mucosidades, recomenda-se proceder à sua remoção utilizando um aspirador nasal.

Método Rhinomer Baby:

Dois passos simples para desobstruir as fossas nasais do bebé e ajudar a respirar pelo nariz novamente:

Passo 1. Aplicação de Rhinomer Baby Força extra suave.

Passo 2. Aspiração nasal com Rhinomer Baby Narhinel soft Aspirador Nasal.

Passo 1



+

Passo 2



Após cada utilização, lavar o aplicador nasal de Rhinomer Baby com água quente e seque cuidadosamente.

Gravidez e aleitamento

Rhinomer pode ser utilizado regularmente durante a gravidez e aleitamento.

Precauções

Não são necessárias precauções especiais quando se utiliza Rhinomer corretamente e para as indicações mencionadas. Contudo, consulte o seu médico antes de utilizar após cirurgia ao nariz ou se tem alguma ferida no nariz.

Mantenha fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize Rhinomer depois do prazo de validade indicado na embalagem. Deite fora a embalagem se observar algum dano ou defeito na mesma. Armazene entre 0°C e 30°C para manter Rhinomer em condições ótimas de conservação.

Se os sintomas nasais persistirem por mais de 5 dias para bebés e 10 dias para adultos e crianças, consulte um profissional de saúde.

Se usado por mais de uma pessoa pode proliferar a contaminação.

No caso de irritações nasais, um formigueiro temporário pode aparecer durante o uso.

Apresentações de Rhinomer Baby

A gama Rhinomer Baby consiste em 4 produtos:

- Rhinomer Baby Força extra suave: Spray nasal
- Rhinomer Baby - Narhinel Monodoses
- Rhinomer Baby - Narhinel soft Aspirador Nasal
- Rhinomer Baby - Narhinel soft Recargas: suaves e descartáveis

Para além de Rhinomer Baby, também estão disponíveis para toda a família outras apresentações de Rhinomer. Estas apresentações diferenciam-se pela força do jato da água do mar e, consequentemente, pela intensidade da lavagem nasal.

As outras apresentações de Rhinomer são:

- Rhinomer Força 1 (Suave): 135 ml
- Rhinomer Força 2 (Médio): 135 ml
- Rhinomer Força 3 (Forte): 135 ml

5. Como conservar Rhinomer Baby Força extra suave

Manter o produto fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar entre os 0°C e 30°C.

Conservar o spray na embalagem original.

6. Informação adicional

Composição: 100% solução natural de água do mar, sem conservantes nem outros aditivos químicos.

Concentração isotónica (equivalente a 9 g/l de NaCl).

115 ml

Laboratoire de la Mer, Z.A.C de la Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, França

Distribuidor:

Haleon Portugal, Lda
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, Arquiparque,
Miraflores, 1495-131 Algés, Portugal

mystory.pt@haleon.com

800 784 695

www.rhinomer.pt



Dispositivo Médico

STERILE A

Data: 2022/02

As marcas registadas são detidas ou licenciadas ao grupo empresarial Haleon. ©2023 Haleon ou seu licenciador.



CN0T1477

HALEON

210 mm

150 mm