



## Spray Nasal

Água do Mar Natural Hipertónica  
Com aroma *Eucalyptus globulus*

**Por favor, leia com atenção este folheto antes de utilizar Rhinomer Intense Eucalyptus. Se tiver alguma questão, consulte o seu médico ou farmacêutico.**

Durante uma constipação o processo inflamatório provoca um edema da mucosa nasal, bloqueando o nariz e aumentando a produção de muco. A água do mar hipertónica\* cria uma diferença de pressão entre a solução e a membrana mucosa (efeito osmótico), ajudando à redução do edema das vias nasais. O produto também suaviza e solta o excesso de muco por ação osmótica da solução hipertónica, ajudando a remover o muco e as bactérias e vírus retidos no muco do nariz por efeito de drenagem.

\* As soluções hipertónicas de água do mar diferem das soluções isotónicas de água do mar, uma vez que a concentração de sal marinho está otimizada a 2,2% para aliviar eficazmente a congestão nasal. Esta concentração também assegura que a solução é suficientemente suave para ser compatível com a mucosa nasal.

### 1. O que é Rhinomer Intense Eucalyptus e para que é utilizado?

Rhinomer Intense Eucalyptus é um spray nasal contendo água do mar natural hipertónica com aroma de *Eucalyptus globulus*. A solução não diluída retém a riqueza de todos os minerais e microelementos importantes contidos na água do mar. Rhinomer Intense Eucalyptus descongestiona o nariz em situações de constipação, rino-faringite/nasofaringite e nariz entupido. Rhinomer Intense Eucalyptus alivia os sintomas nasais e melhora a qualidade de vida. Rhinomer Intense Eucalyptus é um descongestionante nasal natural que:

- Proporciona um alívio eficaz e natural da congestão nasal (nariz entupido ou bloqueado), em caso de constipação e rinosinusite, por redução do edema nasal;
- Purifica as vias nasais por efeito de drenagem;
- Ajuda a remover vírus e bactérias retidos no muco com uma ação mecânica natural por efeito de drenagem;
- Proporciona uma agradável sensação de alívio e frescura, hidratando a mucosa nasal.

Proporciona uma sensação de frescura em menos de 15 segundos.

10 mm non-imprimé (tolérance 5mm non imprimé)

Não escorre para a garganta em 8 em cada 10 utilizadores. Rhinomer Intense Eucalyptus pode ajudar a reduzir a necessidade de utilizar medicação descongestionante. Rhinomer Intense Eucalyptus é adequado para crianças a partir dos 6 anos e adultos.

### 2. Antes de utilizar Rhinomer Intense Eucalyptus spray nasal

⚠ Atenção, leia as instruções de utilização antes de começar a utilizar.

#### Contraindicações

Não utilizar este produto em caso de alergia a qualquer um dos ingredientes.

Não utilizar este produto em caso de asma.

Não utilizar este produto em crianças abaixo dos 6 anos de idade.

Não utilizar este produto durante a gravidez ou durante a amamentação.

Em caso de contacto com os olhos: lavar cuidadosamente com água durante vários minutos.

Os seguintes acontecimentos adversos foram descritos:

- Casos raros de reação nasal transitória (<0,001%)
- Casos excecionais de hemorragia nasal, náuseas, dor de cabeça (<0,0001%)


Se um sintoma/acontecimento adverso ocorrer, descontinue o uso. Consulte o seu médico se os efeitos persistirem.

Incidentes graves devem ser reportados à Laboratoire de la Mer e à Autoridade Competente local.

### 3. Como utilizar Rhinomer Intense Eucalyptus spray nasal?

Para crianças a partir dos 6 anos e adultos: 2 pulverizações em cada narina até 6 vezes ao dia. Na utilização em crianças, é recomendada a supervisão de um adulto.

1. Assoar o nariz.
2. Remover a tampa protetora.
3. Antes de utilizar pela primeira vez, ativar o nebulizador pressionando o aplicador algumas vezes até que saia uma pulverização homogénea.

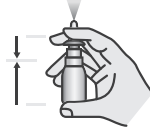

4. Com a cabeça direita, pulverizar em cada narina, inspirando suavemente pelo nariz.
5. Deixar a solução atuar durante alguns minutos antes de assoar o nariz.
6. Após cada utilização, limpar o aplicador do spray e colocar a tampa protetora.
7. Conservar num local seco e na embalagem de origem.

10 mm non-imprimé ( tolérance 5mm non imprimé )

Utilizar um produto por pessoa para evitar a propagação da infeção.

Rhinomer Intense Eucalyptus spray nasal está disponível num microdoseador com 20 mL.

A duração máxima estimada de utilização são 10 dias.

Se os sintomas nasais persistirem, consulte um profissional de saúde.

Rhinomer Intense Eucalyptus pode ser utilizado em combinação com água do mar isotónica (não diluída) para lavagem nasal, em caso de pingo no nariz, ou com água do mar hipertónica (não diluída) para lavagem nasal, em caso de nariz entupido. \*\*

Pode ser utilizado de forma isolada ou em combinação com tratamentos medicamentosos (p. ex., descongestionantes locais, corticosteroides, antihistamínicos). Por favor consulte o seu profissional de saúde.

\*\* Por favor consulte as instruções de utilização de cada produto para garantir um uso adequado e seguro.

#### 4. Para sua segurança



Não utilizar um produto quebrado ou danificado.

Não utilizar se o dispositivo perdeu a sua aparência original.



Não utilizar o produto após a data de validade impressa na embalagem.

Não utilizar o produto após 6 meses após a primeira abertura.

Manter o produto fora da vista e do alcance das crianças.

#### 5. Como conservar Rhinomer Intense Eucalyptus spray nasal?



25°C Conservar a temperatura inferior a 25 °C.  
Utilizar à temperatura ambiente.

#### INGREDIENTES:

97% Maris aqua, Sorbitol, Aroma (óleo essencial de *Mint-Eucalyptus Globulus*), Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate & Aqua, Polyepsilon-Lysine & Aqua.

Spray nasal em microdoseador que liberta água do mar hipertónica não diluída com aroma de Menta-Eucalipto. Sem conservantes artificiais. Sem gás propulsor. Fórmula de fontes naturais. Não medicamentosa.

#### Fabricante legal do produto

Laboratoire de la Mer  
Av. du Général Patton  
ZAC de la Madeleine  
35400 Saint-Malo  
França

Data de revisão das instruções de utilização: 2022-04 V03

Spray nasal 20 mL

e Quantidade estimada



#### Distribuidor:

Haleon Portugal, Lda  
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, Arquiparque,  
Miraflores, 1495-131 Algés, Portugal



Conformidade europeia e identificação do

0459 Organismo Notificado



Descarte o produto no lixo



Cartão reciclável



Papel reciclável



LOT Identificação do número de lote do produto



Data de validade do produto



UDI Identificador único do dispositivo



MD Dispositivo médico

As marcas registadas são detidas ou licenciadas ao grupo empresarial Haleon. ©2023 Haleon ou seu licenciador.

HALEON

CNOT1415