

HALEON

RHINOMER
PLUS⁺

RHINOMER PLUS ADULTOS FORÇA 2 MÉDIA

Rhinomer Plus Adultos, força 2 média, é um descongestionante nasal 100% natural, clinicamente comprovado. É uma solução hipertónica de água do mar (2,6% NaCl) enriquecida com ingredientes benéficos do mar (sais minerais e oligoelementos).

Rhinomer Plus alivia a congestão nasal e a pressão dos seios nasais através do mecanismo natural da osmose. Além disso, limpa as cavidades nasais, eliminando o muco acumulado, crostas, poeiras, detritos, poluentes, alergénios e agentes infecciosos (vírus e bactérias), ajudando a manter o nariz saudável e a prevenir infeções secundárias de ORL (ouvido-nariz-garganta). Adicionalmente, ajuda a hidratar a mucosa nasal.

A água do mar utilizada em **Rhinomer Plus** é recolhida na Baía de Cancale, na costa da Bretanha, em França. A área é conhecida pelos seus mares abertos e fortes correntes da maré, contribuindo para uma água do mar de qualidade excecional, enriquecida em sais minerais e oligoelementos.

Rhinomer Plus não contém substâncias medicamentosas, conservantes, nem aditivos químicos.

Rhinomer Plus pode ser utilizado individualmente, como uma alternativa natural aos descongestionantes medicamentosos (corticosteroides locais, anti-histamínicos, vasoconstritores), ou em combinação com estes para melhorar a sua eficácia. Como tal, pode ajudar a reduzir a duração do tratamento e a quantidade de medicamento tomada.

Indicações:

- Para o alívio natural da congestão nasal, no caso p. ex. de constipação comum, alergias nasais, rinosinusite.
- Para limpar as cavidades nasais e ajudar a remover o muco, agentes patogénicos (p. ex. vírus, bactérias), alergénios (p. ex. polén, alergénios domésticos), poluentes (p. ex. poluição atmosférica, tabaco), poeiras e outras partículas potencialmente prejudiciais (ação mecânica).
- Para promover a recuperação após cirurgia endonasal.
- Para melhorar a eficácia de descongestionantes medicamentosos e reduzir a sua utilização.
- Para hidratar a mucosa nasal, aliviando a secura nasal.

Rhinomer Plus pode ser também utilizado em combinação com descongestionantes medicamentosos tópicos, de preferência imediatamente antes da sua aplicação, para

uma eficácia otimizada do tratamento. **Pode ser utilizado durante a gravidez e a amamentação.**

Composição

80% de água do mar, 20% de água purificada (1 ml de solução contém 0,80 ml de água do mar), equivalente a 2,6% de Cloreto de Sódio. Sem conservantes ou outros aditivos químicos. 100% natural. Gás propulsor inerte (nitrogénio), que não se encontra em contacto com a solução.

Descrição:

Rhinomer Plus Adultos: Spray nasal em embalagem de 125 ml. Spray Médio - força 2 - para adultos e crianças a partir dos 6 anos de idade.

Modo de utilização recomendado:

Utilizar conforme descrito abaixo, ou de acordo com as instruções do médico.

Rhinomer Plus Adultos:

1 a 3 pulverizações em cada narina, 2 a 3 vezes ao dia.

Instruções de utilização:

Adultos:

1. Assoar o nariz para limpar o muco antes de utilizar **Rhinomer Plus**.
2. Quebrar o selo de segurança do frasco e remover a tampa protetora.
3. Colocar o aplicador nasal no topo do frasco.
4. Inclinar suavemente o pescoço para a frente, sobre um lavatório, e inclinar a cabeça para a direita.
5. Inserir suavemente o aplicador na narina esquerda, paralelamente ao septo nasal, e pressionar firmemente.
6. Inclinar a cabeça para o lado oposto e repetir a aplicação na outra narina.
7. Remover o aplicador nasal da narina, voltar à posição vertical, deixando a solução atuar por alguns segundos, e em seguida assoar o nariz.
8. Repetir o procedimento, se necessário.
9. Remover o aplicador nasal do frasco, lavar bem com água morna e secar após cada utilização.



Precauções

Apenas para uso nasal. Não utilizar em caso de hipersensibilidade à água do mar. Não utilizar o mesmo aplicador nasal em mais do que uma pessoa. Não utilizar após o prazo de validade. Manter fora do alcance das crianças.

Informação:

Pode experienciar uma irritação leve e temporária no início da utilização.

Condições de conservação

Conservar abaixo de 25 °C. Recipiente pressurizado. Pode explodir se aquecido. Não expor a temperaturas acima de 50 °C. Proteger da luz solar e de fontes de calor. Não perfurar ou incinerar o recipiente.

Outras informações: Gás propulsor inerte (nitrogénio), que não se encontra em contacto com a solução. Solução armazenada num recipiente separado.

Rhinomer Plus é uma gama completa de soluções hipertónicas de água do mar, que cobre as necessidades de todas as idades, desde recém-nascidos até adultos.

O produto **Rhinomer Plus Adultos** é um Dispositivo Médico com marcação CE, em conformidade com os requisitos da Diretiva 93/42 da União Europeia.

Distribuidor: Haleon Portugal, Lda
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3,
Arquiparque, Miraflores, 1495-131 Algés, Portugal

✉ mystory.pt@haleon.com
☎ 800 784 695
🌐 www.rhinomer.pt

Gerolymatos International[®]

Gerolymatos International S.A.
8 Asklipiou str., 145 68 Kryoneri, Attiki, Grécia.
T: +30 210 3500800, F: +30 210 6220384

As marcas registadas são detidas ou licenciadas ao grupo empresarial Haleon.
©2024 Haleon ou seu licenciador.

0653



15°C - 25°C