


и насадками
и 3 сменными
и назальным
и Аспиратор

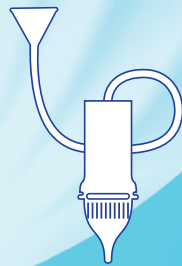

и Бэби
и Отривин

Назначение: Аспиратор назальный Отривин Бэби используют у детей (новорожденные, младенцы и младшего возраста) для мягкого удаления слизистых выделений из носа.


Аспиратор прост и гигиеничен в применении. С его помощью можно облегчить носовое дыхание малыша, чтобы он вновь почувствовал себя комфортно.

Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения: ушные инфекции (отит), инфекции пазух (синусит) или кашель.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями Отривин Бэби.

Способ применения:

1. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора.
2. Возьмите мундштук (С) в рот (для родителей и лиц, ухаживающих за ребенком) и вставьте наконечник (А) в один из носовых ходов ребенка.
3. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
4. Если насадка заполняется выделениями в промежутке между вдохами, удалите секрет из насадки в салфетку, продувая мундштук, или замените насадку.
5. Повторите процедуру для другого носового хода.
6. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А).

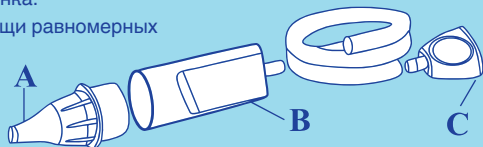

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно. Одноразовые сменные насадки для аспиратора Отривин Бэби продаются отдельно.



Аспиратор назальный Отривин Бэби с тремя сменными насадками предназначен для устранения выделений из носа, беспокоящих Вашего малыша при насморке.

К аспиратору прилагаются 3 одноразовые сменные насадки. Перед использованием следует внимательно ознакомиться с информацией на упаковке.

Не следует использовать аспиратор, если он испорчен или поврежден, при наличии аллергии на компоненты материалов аспиратора и насадок.

Состав: аспиратор – силиконовая трубка, полиэтилен, полипропилен; насадки – полипропилен, меламинавая пена.

и Отривин
и Бэби

и 3 сменными
и насадками



и Аспиратор
и назальный

05PR130-RU 500050

P 286 C
P 1788 C
P 2985 C
P 486 C

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от 0 °С до 30 °С. Срок годности 5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01133 от 05.05.2022.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО «ГлансоСмитНяльин Хелскер», Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, помещение III, комната 9, эт. 6. Тел. 8 (495) 777-98-50; факс 8 (495) 777-98-51 Телефон бесплатной «Горячей линии» 8 800 333 46 94 E-mail: rus.info@gsk.com



128 x 39 x 92



Место производства – «Стипластик – 62 Чемин дес Плантес – 38160 СЕН-МАРЕСЕЛЛЕН ФРАНЦИЯ»
Produced by Stiplastics – 62 Chemin des Plantees – 38160 SAINT-MARCELLIN – FRANCE

Производитель – ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ, Рю де Летраз, 1997 Пранжен, Швейцария
Legal Manufacturer - GSK Consumer Healthcare SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland

Годен до:

Серия №: