



## ИНСТРУКЦИЯ

### по применению

**Отривин Бэби** капли для орошения полости носа в одноразовых флаконах-капельницах

Медицинское изделие

Регистрационное удостоверение  
№ ФСЗ 2008/02184 от 06.07.2022 г.

Свободное дыхание носом особенно важно для младенцев и маленьких детей до 1 года, а также детей более старшего возраста. Инстинкт дыхания ртом появляется у ребенка лишь к 6 месяцам жизни, а при насморке и заложенности носик малыша наполняется слизью и ему становится трудно дышать. Это нарушает его нормальный образ жизни: малыш становится плаксивым и беспокойным, перестает кушать и плохо спит.

**Отривин Бэби** капли для орошения полости носа в одноразовых флаконах-капельницах – создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до 1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это стерильный изотонический раствор натрия хлорида, уровень рН которого близок естественной секреторной жидкости слизистой носа.

**Отривин Бэби** предназначен для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также для ежедневной гигиены полости носа:

- способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа.
- способствует разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам.
- способствует удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при аллергических ринитах.

### Состав

**Отривин Бэби**, капли для орошения полости носа – стерильный изотонический солевой раствор без консервантов (физиологический раствор). Содержит натрия хлорид 0,74 %, также натрия гидрофосфат, натрия фосфат, макрогиола глицерилрицинолеат (кремофор RH40) и воду очищенную. Каждый флакон-капельница содержит 5 мл стерильного солевого раствора, в упаковке 18 флаконов-капельниц.

### Применение

- Гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях носа, придаточных пазух и носоглотки, также при аллергическом рините
- Ежедневная гигиена полости носа для сохранения защитных свойств слизистой в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха (в т. ч. кондиционирование, центральное отопление и др.)
- Гигиеническое средство для профилактики инфекционных заболеваний носа и носоглотки, а также воспалительных процессов после оперативных вмешательств

### Способ применения

Для гигиены слизистой носа и профилактики заболеваний носа и носоглотки: детям до 1 года и старше капли **Отривин Бэби** применяют интраназально по 2- 4 промывания в каждой носовой ход ежедневно (при необходимости можно больше).

1. Один флакон-капельницу следует отделить от остальных, вскрыть флакон, повернув крышку по часовой стрелке.



2. Промывание носа у ребенка раннего возраста проводят в положении лежа. Поворачивают голову ребенка набок. Предварительно следует освободить полость носа от слизи. Раствор закапывают в каждый носовой ход последовательно, слегка нажимая на флакон (вводятся несколько капель или более, если требуется более тщательное очищение).
3. Следует посадить ребенка, через несколько секунд, если необходимо, излишки раствора и слизь следует удалить из полости носа. При необходимости процедуру можно повторить.
4. Флакон закрывают путем нажатия на крышку.





Для удаления слизистых выделений из носа у детей рекомендуется использование **Аспиратора Отривин Бэби** со сменными насадками.

В целях соблюдения гигиены один флакон следует использовать только для одного ребенка.

**Содержимое флакона-капельницы следует использовать в течение 12 часов после первого вскрытия.**

#### Особые указания

Не следует использовать капли **Отривин Бэби** при наличии аллергической реакции на какой-либо из ингредиентов, указанных в составе.

**Отривин Бэби** следует хранить при комнатной температуре, не допуская нагревания. Хранить в недоступном для детей месте  
Срок хранения 3 года. Не использовать после даты истечения срока годности, указанного на упаковке.

Производитель - ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

GSK Consumer Healthcare SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

**Место производства - Лаборатуар Юните, 151 рю Андре Дюруше, Инспейс Индастриель Норд, 80084 Амьен Седес 2, Франция.**

Laboratoire Unither, 151 rue André Durouchez, Espace Industriel Nord, 80084 Amiens Cedex 2, France

**Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:**

АО «ГлаксoСмитКляйн Хелскер».

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, помещ. III, ком. 9, эт. 6.

Тел. 8 (495) 777-98-50;

факс 8 (495) 777-98-51

Телефон бесплатной «Горячей линии»

☎ 8 800 2000 775

E-mail: rus.info@gsk.com

65NOT2073/D

65NOT2073/D

