

Аспиратор назальный  
с 3 сменными насадками

Отривин  
Бэби

05PR130-RU 500060

Cyan  
Magenta  
Yellow  
Black  
P 224 C  
P 286 C

**Назначение:** Аспиратор назальный "Отривин Бэби" используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа.

Аспиратор прост и гигиеничен в применении. С его помощью можно облегчить носовое дыхание малыша, чтобы он вновь почувствовал себя комфортно.

Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель.


Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора "Отривин Бэби" рекомендуется промыть нос физиологическим раствором, например, каплями "Отривин Бэби".

**Способ применения:**

1. Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.
3. Возьмите мундштук (С) в рот и вставьте конец насадки (А) в один из носовых ходов ребенка.
4. Медленно и аккуратно вытягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
5. Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.
6. Повторите процедуру для другого носового хода.
7. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А). Протрите внешнюю поверхность мундштука (С) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (В) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

Используйте аспиратор только с оригинальными насадками «Отривин Бэби».

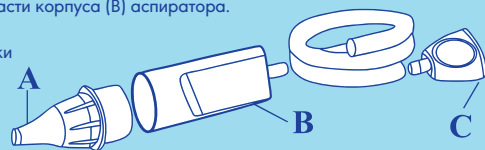

Аспиратор назальный "Отривин Бэби" с тремя сменными насадками (жесткие насадки), в составе:

- Аспиратор назальный "Отривин Бэби" - 1 шт.
- Жесткая насадка - 3 шт.

Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия. Не используйте сломанное или поврежденное изделие, поврежденную насадку или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа.

Используйте аспиратор у ребенка в положении лежа или полулежа, надежно удерживая мундштук между губами.

Состав: аспиратор - силиконовая трубка, полиэтилен, полипропилен; насадки - полипропилен, меламиновая пена.

Отривин  
Бэби

HALEON



Аспиратор  
назальный  
с 3 сменными  
насадками

Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке.

Храните при температуре от 0 °С до 30 °С.

Срок годности 5 лет.

Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01133 от 30.01.2025.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО «Хелеон Рус»,  
Российская Федерация, 123112,  
г. Москва, наб. Пресненская,  
д. 10, помещ. III, комната 9, эт. 6.

Тел.: +7 (495) 777-98-50;

Телефон бесплатной

«Горячей линии»:

☎ 8 (800) 333-46-94

Эл. почта: rus.info@haleon.com

■ СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

0+

Место производства: Стипластикс, 62 Чемин дес Плантаес, 38160 Сен-Марселлен, Франция.

Produced by Stiplastics, 62 Chemin des Plantees, 38160 Saint-Marcellin, France.

Производитель: Хелеон КХ САРЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Legal Manufacturer: Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

128 x 39 x 92



Годен до:

Серия №:



JH05610A

**Отривин Бэби**  
Аспиратор назальный с 3 сменными насадками

XX\_XX\_XXXX  
06018888888888888888

Cyan  
Magenta  
Yellow  
Black  
White  
PMS 866-C

**Назначение:** Аспиратор назальный "Отривин Бэби" используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа. Аспиратор прост и гигиеничен в применении. С его помощью можно облегчить носовое дыхание малыша, чтобы он вновь почувствовал себя комфортно.

**Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель.**

**Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора "Отривин Бэби" рекомендуется промыть нос физиологическим раствором, например, каплями "Отривин Бэби".**

**Способ применения:**

1. Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (A) к центральной части корпуса (B) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.
3. Возьмите мундштук (C) в рот и вставьте конец насадки (A) в один из носовых ходов ребенка.
4. Медленно и аккуратно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (C).
5. Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.
6. Повторите процедуру для другого носового хода.
7. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (A). Протрите внешнею поверхность мундштука (C) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (B) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

**В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.**

**Используйте аспиратор только с оригинальными насадками «Отривин Бэби».**

**Аспиратор назальный "Отривин Бэби" с тремя сменными насадками (жесткие насадки), в составе:**

- Аспиратор назальный "Отривин Бэби" - 1 шт.
- Жесткая насадка - 3 шт.

Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия. Не используйте сломанное или поврежденное изделие, поврежденную насадку или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа.

Используйте аспиратор у ребенка в положении лежа или полуплежа, надежно удерживая мундштук между губами.

**Состав:** аспиратор - силиконовая трубка, полиэтилен, полипропилен; насадки - полипропилен, меламиновая пена.

**Отривин Бэби**

HALEON

**Аспиратор назальный с 3 сменными насадками**

Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Храните при температуре от 0 °C до 30 °C.

Срок годности 5 лет. Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01133 от 30.01.2025.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации: АО «Халеон Рус», Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт. 6. Тел.: +7 (495) 777-98-50; Телефон бесплатной «Горячей линии»: 8 (800) 333-46-94 Эл. почта: rus.info@haleon.com

**СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ** **0+**

Место производства: Стипластик, 62 Chemin des Plantees, 38160 Сен-Марселлен, Франция.  
Produced by Stiplastics, 62 Chemin des Plantees, 38160 Saint-Marcellin, France  
Производитель: Халеон КХ САПЛ, Ро де Летраз, 1197 Франжэн, Швейцария.  
Legal Manufacturer: Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Frangins, Switzerland.

Годен до:   7,5  
Серия №:   7,5

128 x 39 x 92

4 607045 192156

2 20 45

Preprint	Local language	Translation
	Годен до: Серия №:	EXP LOT