



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Отривин Бэби капли для орошения полости носа в одноразовых флаконах-капельницах

Медицинское изделие

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2008/02184 от 18.07.2025.

Свободное дыхание носом особенно важно для младенцев и маленьких детей до 1 года, а также детей более старшего возраста. Инстинкт дыхания ртом появляется у ребенка лишь к 6 месяцам жизни, а при насморке и заложенности носик малыша наполняется слизью и ему становится трудно дышать. Это нарушает его нормальный образ жизни: малыш становится плаксивым и беспокойным, перестает кушать и плохо спит.

Отривин Бэби капли для орошения полости носа в одноразовых флаконах-капельницах – создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до 1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это стерильный изотонический раствор натрия хлорида, уровень pH которого близок естественной секреторной жидкости слизистой носа.

Отривин Бэби предназначен для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также для ежедневной гигиены полости носа:

- способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа.
- способствует разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам.
- способствует удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при аллергических ринитах.

Состав

Отривин Бэби, капли для орошения полости носа – стерильный изотонический солевой раствор без консервантов (физиологический раствор). Содержит натрия хлорид 0,74 %, также натрия гидрофосфат, натрия фосфат, макрогола глицерилрицинолеат (кремофор RH40) и воду очищенную. Каждый флакон-капельница содержит 5 мл стерильного солевого раствора, в упаковке 18 флаконов-капельниц.

Применение

- Гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях носа, придаточных пазух и носоглотки, также при аллергическом рините.
- Ежедневная гигиена полости носа для сохранения защитных свойств слизистой в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха (в т. ч. кондиционирование, центральное отопление и др.).
- Гигиеническое средство для профилактики инфекционных заболеваний носа и носоглотки, а также воспалительных процессов после оперативных вмешательств.

Способ применения

Для гигиены слизистой носа и профилактики заболеваний носа и носоглотки: детям до 1 года и старше капли **Отривин Бэби** применяют интраназально по 2-4 промывания в каждый носовой ход ежедневно (при необходимости можно больше).

1. Один флакон-капельницу следует отделить от остальных, вскрыть флакон, повернув крышку по часовой стрелке.



2. Промывание носа у ребенка раннего возраста проводят в положении лежа. Поворачивают голову ребенка набок. Предварительно следует освободить полость носа от слизи. Раствор закапывают в каждый носовой ход последовательно, слегка нажимая на флакон (вводят несколько капель или больше, если требуется более тщательное очищение).
3. Следует посадить ребенка, через несколько секунд, если необходимо, излишки раствора и слизь следует удалить из полости носа. При необходимости процедуру можно повторить.
4. Флакон закрывают путем нажатия на крышку.





Для удаления слизистых выделений из носа у детей рекомендуется использование **Аспиратора Отривин Бэби** со сменными насадками.

В целях соблюдения гигиены один флакон следует использовать только для одного ребенка.

Содержимое флакона-капельницы следует использовать в течение 12 часов после первого вскрытия.

Особые указания

Не следует использовать капли **Отривин Бэби** при наличии аллергической реакции на какой-либо из ингредиентов, указанных в составе.

Отривин Бэби следует хранить при комнатной температуре, не допуская нагревания. Хранить в недоступном для детей месте. Срок хранения 3 года. Не использовать после даты истечения срока годности, указанного на упаковке.

Производитель – Хелеон КХ САРЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

Место производства – Лаборатуар Юните, 151 рю Андре Дюруше, Инспейс Индастриель Норд, Сs 28028 80084 Амьен Седекс 2, Франция.

Laboratoire Unither, 151 rue André Durouchez, Espace Industriel Nord, Cs 28028 80084 Amiens Cedex 2, France.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО «Хелеон Рус»,
123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6.

Тел. 8 (495) 777-98-50;

Телефон бесплатной «Горячей линии»

☎ 8 (800) 333-46-94

E-mail: rus.info@haleon.com

65NOT2073/D

HALEON

65NOT2073/E

