

Насадки сменные
мягкие для
аспиратора
назального
10 штук



Отривин
Бэби Комфорт

05PR140-RU 800020

P 2945 C
P 485 C
P 1505 C
P 224 C
P 3278 C

В упаковке содержатся десять мягких одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным Отривин Бэби Комфорт, который приобретается отдельно. Анатомическая форма насадки позволяет легко установить ее в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеническое использование.




Аспиратор назальный Отривин Бэби Комфорт предназначен для детей (новорожденных, грудных, младшего возраста). Аспиратор способствует очищению носа Вашего ребенка, мягко удаляя беспокоящие его слизистые выделения.

Удаление слизистых выделений из носа способствует предотвращению осложнений, например, отита, синусита и кашля.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби Комфорт рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями Отривин Бэби.

Способ применения

1. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора.
 2. Возьмите мундштук (С) в рот (для родителей и лиц, ухаживающих за ребенком) и вставьте наконечник (А) в один из носовых ходов ребенка.
 3. Осторожно вытягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
 4. Если насадка заполняется выделениями в промежутке между вдохами, удалите секрет из насадки в салфетку, продувая мундштук, или замените насадку.
 5. Повторите процедуру для другого носового хода.
 6. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А).
- В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

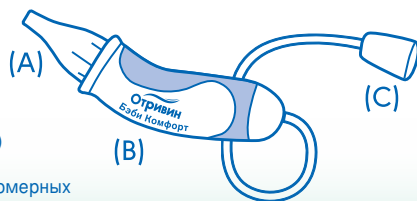

Насадки сменные мягкие для назального аспиратора Отривин Бэби Комфорт в количестве 10 штук.

Сменные мягкие насадки идеально подходят для носика малыша; содержат впитывающий фильтр, удерживающий слизь.

Перед использованием следует внимательно ознакомиться с информацией на упаковке.

Одноразовые насадки гигиеничны в применении. Во избежание повторного инфицирования использованную насадку следует выбросить.

Не следует использовать аспиратор и насадки при наличии аллергии на материалы, из которых изготовлены компоненты изделия.

Состав: поливинилхлорид меламиновая пена.

Не следует использовать аспиратор, если он испорчен или поврежден.

Отривин
Бэби Комфорт



Для очищения
носа вашего
малыша



10 штук

Насадки сменные мягкие
для аспиратора назального

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от 0 °С до 30 °С.

Срок годности 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01134 от 05.05.2022.

Производитель - ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Legal manufacturer - GSK Consumer Healthcare SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер", Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10, помещение III, комната 9, эт. 6. Тел. 8 (495) 777-98-50; факс 8 (495) 777-98-51 Телефон бесплатной "Горячей линии" 8 800 333 46 94 E-mail: rus.info@gsk.com

Произведено "Стипластик" – 62 Чемин дес Плантес – 38160 СЕН- МАРЕСЕЛЛЕН ФРАНЦИЯ
Produced by Stiplastics – 62 Chemin des Plantées – 38160 SAINT-MARCELLIN – FRANCE

Годен до:

Серия №:

128 x 47 x 92

