


Насадки сменные для аспиратора
назального "Отривин Бэби
Комфорт" (мягкие) – 10 шт.
Храните в недоступном для
детей месте в оригинальной
упаковке. Храните при
температуре от 0 °C до 30 °C.
Срок годности 3 года.
Не используйте после
истечения срока годности,
указанного на упаковке.
Медицинское изделие,
рег. удостоверение
№ФСЗ 2008/01134 от
18.07.2025.
Место производства:
Ступатикс, 62 Чемин
дес-Марселлен, Франция.
Производитель:
Хеон КХ САРЛ,
62 Чемин дес Плантаз,
38160 Сент-Марселлен, France.
Legal Manufacturer:
Haleon CH SARL,
Route de l'Éclair,
1197 Prangins, Switzerland.
**Организация, принимающая
претензии на территории
Российской Федерации:**
АО «Хеон Рус»,
Российская Федерация, 123112,
г. Москва, наб. Пресненская, д. 10,
помещ. III, комната 9, эт. 6.
Тел.: +7 (495) 777-98-50;
8 (800) 333-46-94
Эл. почта: rus.info@haleon.com

В упаковке содержится десять
мягких анатомических насадок
для использования с
аспиратором назальным
"Отривин Бэби
Комфорт", которые
проборются
отдельно.
Анатомическая
форма насадки
позволяет легко
установить ее в носовой ход
ребенка, исключая травмирование.
В каждой насадке содержится
аскорбирующий филтр,
задерживающий слизистые
выделения, что обеспечивает чистое
и гигиеничное использование.
Насадки сменные вместе с аспиратором
используют у детей (новорожденных,
младенцев и детей младшего возраста)
для бережного удаления слизистых
выделений из носа. Удаление слизистых
выделений помогает предотвратить
дальнейшие осложнения, например,
ушные инфекции (отит), инфекции
носовых пазух (синусит) и кашель.
Для облегчения процедуры перед
использованием назального
аспиратора "Отривин Бэби Комфорт"
рекомендуется промыть нос
физиологическим раствором,
например, каплями "Отривин Бэби".
Не используйте изделие любого из
аллергии на материал любого из
компонентов изделия.
Используйте сменные насадки только
с соответствующим аспиратором,
поставляемым производителем
отдельно.
Проконсультируйтесь с врачом перед
применением аспиратора и сменных
насадок после травмы носа или
недавно перенесенного
хирургического вмешательства в
полости носа.
Состав: поливинилипиррид,
металиновая пена.
Насадки следует использовать лишь
однократно.
Исключение повторного использования
в целях соблюдения гигиены и для
глубины.
Надежно удерживая мундштук между
в положении лежа или полужа,
Проводите аспирацию у ребенка
филтром.
С отсутствующим или поврежденным
поврежденное изделие или насадку
Не используйте сломанное или
его, прикрепите трубку обратно.
Промойте корпус теплой водой и осушите
отсоедините силиконовую трубку,
падающая слеза внутрь корпуса (B).
тканью, просушите салфеткой. В случае
(C) чистой смоченной в теплой воде
внешнюю поверхность мундштука
использования насадку (A). Протрите
7. Отсоедините и выбросьте
носового хода.
6. Повторите процедуру для другого
носового хода.
3. Возьмите мундштук (C) в рот
и вставьте конец насадки (A) в один из
носовых ходов ребенка.
4. Медленно и аккуратно втягивайте
воздух ртом при помощи равномерных
вдохов через мундштук (C).
5. Если насадка заполняется
выделениями во время аспирации,
замените ее, не используйте насадку
повторно.
1. Перед и после использования
аспиратора тщательно мойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (A) к
центральной части корпуса
(B) аспиратора. Не используйте бывшую
в употреблении насадку.
3. Возьмите мундштук (C) в рот
и вставьте конец насадки (A) в один из
носовых ходов ребенка.
4. Медленно и аккуратно втягивайте
воздух ртом при помощи равномерных
вдохов через мундштук (C).
5. Если насадка заполняется
выделениями во время аспирации,
замените ее, не используйте насадку
повторно.
6. Повторите процедуру для другого
носового хода.
7. Отсоедините и выбросьте
использованную насадку (A). Протрите
внешнюю поверхность мундштука
использованной насадкой (A). Протрите
носочной частью мундштука (B) аспиратора
филтром.
Состав: поливинилипиррид,
металиновая пена.
Насадки следует использовать лишь
однократно.

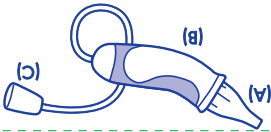

Отривин Бэби

Комфорт
Насадки сменные для
аспиратора назального (мягкие)

10 штук

05PRT40-RU 800030

Отривин
Бэби
Комфорт

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
НОСИКА МАЛЫША



Мягкие
сменные
насадки



СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

10 ШТУК

Годен до:
Серия №:



Супер
Модерно
Yellow
Black
P 286 C