

Насадки сменные для аспиратора назального

Отривин
Бэби

05PR140-RU 500060

Cyan
Magenta
Yellow
Black
P 224 C
P 286 C

В упаковке содержится десять одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным "Отривин Бэби", который приобретается отдельно. Анатомическая форма насадки позволяет легко установить ее в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеничное использование. Насадки сменные вместе с аспиратором назальным "Отривин Бэби" используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа. Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора "Отривин Бэби" рекомендуется промыть нос физиологическим раствором, например, каплями "Отривин Бэби".

Способ применения:

1. Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.


3. Возьмите мундштук (С) в рот и вставьте конец насадки (А) в один из носовых ходов ребенка.

4. Медленно и аккуратно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).

5. Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.

6. Повторите процедуру для другого носового хода.

7. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А). Протрите внешнюю поверхность мундштука (С) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (В) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

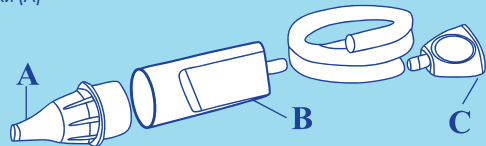

Насадки сменные для аспиратора назального "Отривин Бэби" (жесткие) - 10 шт.

Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия.

Используйте сменные насадки только с соответствующим аспиратором, поставляемым производителем отдельно. Не используйте сломанное или поврежденное изделие или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора и сменных насадок после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа.

Проводите аспирацию у ребенка в положении лежа или полуплежа, надежно удерживая мундштук между губами. В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

Состав: полипропилен, меламиновая пена.

Отривин
Бэби



HALEON

Насадки сменные
для аспиратора
назального

Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Храните при температуре от 0 °С до 30 °С.

Срок годности 5 лет.

Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01134 от 30.01.2025.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО «Хелеон Рус»,
Российская Федерация, 123112,
г. Москва, наб. Пресненская, д. 10,
помещ. III, комната 9, эт 6.
Тел.: +7 (495) 777-98-50;
Телефон бесплатной «Горячей линии»:
8 (800) 333-46-94
Эл. почта: rus.info@haleon.com

■ СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

10 ШТУК

Место производства: Стипластикс, 62 Чемин дес Плантаес, 38160 Сен-Марселлен, Франция.

Produced by Stiplastics, 62 Chemin des Plantees, 38160 Saint-Marcellin, France.

Производитель: Хелеон КХ САРЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Legal Manufacturer: Haleon CH SARL, Route de l' Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

Голен до:


Серия №:



128 x 47 x 92



CUTCONTOUR

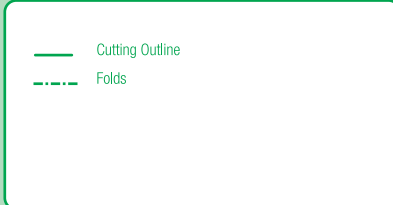

- Area where no text nor important information/artwork should appear
- Forbidden area dedicated to the box manufacturer
- Forbidden area dedicated to the expiry date embossing
- Area where to place (in the language of the country), the equivalent of "Expiration Date"
- Forbidden area dedicated to the batch number embossing
- Area where to place (in the language of the country), the equivalent of "Batch N°"

FORBIDDEN AREA

Date expiration
 Expiry date embossing
 Numero Lot
 Batch number embossing

SMALLEST TEXT SIZE : 6pts , for one colour text and text with reserved color.

QR CODES : no limitation as far as the standards are respected, and as far as they are made of 100% black color.

10 REFILLS BOX
(soft and hard nasal aspirators)

2020.01.20

JH07277A - AWSPEC

Stiplastics®Healthcaring

Насадки сменные для аспиратора назального

Отривин Бэби

В упаковке содержится десять одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным "Отривин Бэби", который приобретается отдельно. Анатомическая форма насадки позволяет легко установить ее в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеничное использование. Насадки сменные вместе с аспиратором назальным "Отривин Бэби" используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа. Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель. Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора "Отривин Бэби" рекомендуется промыть нос физиологическим раствором, например, каплями "Отривин Бэби".

Способ применения:

- Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
- Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.
- Возьмите мундштук (С) в рот и вставьте конец насадки (А) в один из носовых ходов ребенка.
- Медленно и аккуратно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
- Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.
- Повторите процедуру для другого носового хода.
- Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А). Протрите внешнюю поверхность мундштука (С) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (В) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

Насадки сменные для аспиратора назального "Отривин Бэби" (жесткие) - 10 шт. Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия. Используйте сменные насадки только с соответствующим аспиратором, поставленным производителем отдельно. Не используйте сложное или поврежденное изделие или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром. Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора и сменных насадок после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа. Проводите аспирацию у ребенка в положении лежа или полуплежа, надежно удерживая мундштук между губами. В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно. Состав: полипропилен, меламиновая пена.

Отривин Бэби

Насадки сменные для аспиратора назального

10 ШТУК

Место производства: Стипластикс, 62 Чемин дес Плантаес, 38160 Сен-Марселлен, Франция.
 Produced by Stiplastics, 62 Chemin des Plantees, 38160 Saint-Marcellin, France.
 Производитель: Хелеон КХ САРЛ, Ро де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.
 Legal Manufacturer: Haleon CH SARL, Route de l' Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

Годен до: _____
 Серия №: _____

4 607045 192163

Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Храните при температуре от 0 °С до 30 °С. Срок годности 5 лет. Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке. Медицинское изделие, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/0134 от 30.01.2025. Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации: АО «Хелеон Рус», Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6. Тел.: +7 (495) 777-98-50; Телефон бесплатной «Горячей линии»: 8 (800) 333-46-94 Эл. почта: rus.info@haleon.com

Preprint	Local language	Translation
	Годен до: Серия №:	EXP LOT

V1		Artwork Information Panel		HALEON							
20 - Feb - 2025		Non Production Artwork <input type="checkbox"/>		Production Artwork <input checked="" type="checkbox"/>							
Total Number of Colours including Varnish & Foils: 7		Component No: JAWP No: 05PR140-RU 500060 TR3463528/A		Manufacturing Site: STI							
<table border="1"> <tr> <td>1. Cyan</td> <td>2. Magenta</td> <td>3. Yellow</td> <td>4. Black</td> <td>5. PANTONE 224 C</td> <td>6. PANTONE 286 C</td> </tr> </table>		1. Cyan	2. Magenta	3. Yellow	4. Black	5. PANTONE 224 C	6. PANTONE 286 C	Approving Market: Russia		Technical Drawing No: 10 Refills - JH07277A - AWSPEC - RevF	
1. Cyan	2. Magenta	3. Yellow	4. Black	5. PANTONE 224 C	6. PANTONE 286 C						
7. Varnish		Material Spec No: 10 Refills - JH07277A - AWSPEC - RevF		Body Text Size: 7 Opt							
Total Special Finishes: 0		Smallest Text Size: 6 Opt		Electronic Verification Code: N/A							
Studio Location: Europe		Printer and User notes:									

BARCODE INFO	
Barcode Type	EAN 13
Barcode Number	4607045192163
Magnification	90
BWB	0 Micrometre