

Насадки
сменные
для аспиратора
назального



Отривин
Бэби

В упаковке содержатся десять одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным Отривин Бэби, который приобретаетс^я отдельно. Анатомическая форма насадки позволяет легко установить ее в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеничное использование.

Аспиратор назальный Отривин Бэби предназначен для детей (новорожденных, грудных, младшего возраста). Аспиратор способствует очищению носа Вашего ребенка, мягко удаляя беспокоящие его слизистые выделения.


Удаление слизистых выделений из носа способствует предотвращению осложнений, например, отита, синусита и кашля.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями Отривин Бэби.

Способ применения

1. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора.
2. Возьмите мундштук (С) в рот (для родителей и лиц, ухаживающих за ребенком) и вставьте наконечник (А) в один из носовых ходов ребенка.
3. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
4. Если насадка заполняется выделениями в промежутке между вдохами, удалите секрет из насадки в салфетку, продувая мундштук, или замените насадку.
5. Повторите процедуру для другого носового хода.
6. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А).

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

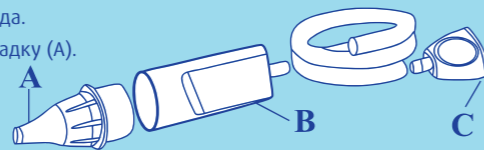

Насадки сменные для назального аспиратора Отривин Бэби в количестве 10 штук.

Сменные насадки идеально подходят для носика малыша; содержат впитывающий фильтр, удерживающий слизь.

Перед использованием следует внимательно ознакомиться с информацией на упаковке.

Одноразовые насадки гигиеничны в применении.

Во избежание повторного инфицирования использованную насадку следует выбросить.

Не следует использовать аспиратор и насадки при наличии аллергии на материалы, из которых изготовлены компоненты изделия.

Состав: полипропилен, меламиновая пена.

Не следует использовать аспиратор, если он испорчен или поврежден.



Отривин
Бэби

10 штук



Насадки сменные
для аспиратора
назального



05PR140-RU 500050

P 286 C
P 1788 C
P 2985 C
P 486 C

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от 0 °С до 30 °С. Срок годности 5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие,
рег. удостоверение
№ ФСЗ 2008/01134 от 05.05.2022.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:
АО «ГлаксосмитКляйн Хелскер»,
Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, помещение III, комната 9, эт. 6.

Тел. 8 (495) 777-98-50;
факс 8 (495) 777-98-51
Телефон бесплатной «Горячей линии»
☎ 8 800 333 46 94
E-mail: rus.info@gsk.com

Место производства – «Стипластик – 62 Чемин дес Плантес – 38160 СЕН-МАРСЕЛЛЕН ФРАНЦИЯ»
Produced by Stioplastics – 62 Chemin des Plantées – 38160 SAINT-MARCELLIN – FRANCE

Производитель – ГСК Консьюмер Хелкер САРЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария
Legal Manufacturer - GSK Consumer Healthcare SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland

Годен до:

Серия №:

128 x 47 x 92

