

OtriBaby

Nässug (med mjuka engångsfilter)

HALEON

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda OtriBaby Nässug. Om du har några frågor, kontakta läkare eller apotekspersonal.

1. Vad OtriBaby Nässug är och vad det används för

OtriBaby Nässug för nyfödda, spädbarn och barn. Användning av nässug rekommenderas när ditt barn är täppt i näsan och kan användas så ofta som det behövs, särskilt innan ditt barn ska äta eller sova. Produkten är utvecklad för att hjälpa till att rensa ditt barns näsa genom att varsamt ta bort nässekret.

Enkel och hygienisk att använda.

OtriBaby Nässug hjälper ditt barn att andas, äta, sova normalt och må bättre igen.

Vem har användning för OtriBaby Nässug?

Denna produkt är till för de som inte kan snyta näsan själv, såsom nyfödda, spädbarn och barn. Du bör dock kontakta läkare innan användning på ett nyfött barn.

Vem ska använda OtriBaby Nässug? Av säkerhetsskäl ska OtriBaby Nässug användas av en förälder eller vårdare som kan läsa och förstå bipacksedeln, som kan skilja mellan mun, näsa, öron och ögon, och förstår grundläggande hygienkoncept.

Två mjuka engångsfilter ingår i förpackningen med OtriBaby Nässug. Den innehåller ett absorberande engångsfilter som garanterar fullgod hygien genom att binda nässekretet i filtret. Engångsfilter finns också tillgängliga i förpackningar om 10 filter.

2. Innan användning av OtriBaby Nässug

Använd endast OtriBaby mjuka engångsfilter med OtriBaby Nässug. Kontakta läkare innan användning av OtriBaby Nässug efter en skada eller nyligen genomförd näsoperation. Denna produkt ska användas när barnet är vilande. Munstycket ska hållas fast ordentligt mellan läpparna.

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren och i Sverige till Läkemedelsverket och i Finland till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

3. Hur du använder OtriBaby Nässug


Av hygieniska skäl och för att undvika smittspridning, säkerställ att de olika komponenterna till OtriBaby Nässug är korrekt monterade och inte monterat med ett använt engångsfilter.

1. Innan du använder OtriBaby Nässug, tvätta dina händer noggrant.
2. Placera ett mjukt engångsfilter (A) i mittdelen (B) av produkten. Montera inte med ett använt engångsfilter.
3. Placera munstycket (C) i din mun (förälder, vårdare) och placera änden av engångsfiltret (A) i öppningen av barnets näsborre. För att förbättra produktens kapacitet är det rekommenderat att hålla den andra näsborren stängd vid utsugning.
4. Sug försiktigt, långsamt och med jämnt flöde genom munstycket (C).
5. Om ett engångsfilter blir fullt under en användning, återanvänd det inte.
6. Upprepa behandlingen i den andra näsborren.
7. **Rengöringsinstruktioner**

Ta bort och släng det använda engångsfiltret (A). Torka utsidan av munstycket (C) med en ren, fuktig näsduk med

varmt vatten. Torka utsidan av munstycket med en näsduk. ENDAST om slem eller sekret är inuti den centrala delen: Ta bort den centrala delen (B) från plastubben. Spola den centrala delen (B) med varmt vatten och dränera för att torka innan tuben sätts fast igen. Säkerställ att enheten är torr och förvara i originalförpackningen. Tvätta dina händer noggrant.

(A)

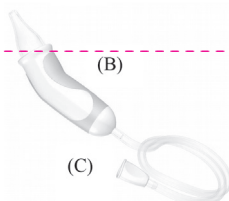

(B)

(C)



4. För din säkerhet

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte produkten vid allergi mot något av materialen i produkten (se sammansättning).

Använd inte en trasig eller skadad produkt, en använd eller skadad spets eller en spets som saknar eller har ett trasigt filter.



Använd inte skadad eller trasig produkt.



Varning: Innan du använder denna produkt, läs noga igenom instruktionerna som finns i förpackningen.



Engångsbruk: Engångsfilterna ska endast användas en gång. Övriga delar av utrustningen kan återanvändas.

Om du har ytterligare frågor kring denna produkt, fråga läkare eller apotekspersonal.

5. Hur OtriBaby Nässug ska förvaras



Förvaras ej under 0 °C eller över 30 °C. Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Förvaras i originalförpackningen. Kassera produkten enligt lokala föreskrifter och ta alltid hänsyn till miljön.

6. Vidare information

Sammansättning: Nässug: polypropylen, styrenetylenbutylenstyren, silikon.

Engångsfilter: PVC och melaminskum. Fri från bisfenol A.

Innehåll: 1 nässug (mittdelen av nässugen, del B), 1 flexibel slang med munstycke (del C), 2 mjuka engångsfilter (del A).



Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Schweiz/Sveitsi.



Haleon Medical Devices,
Clocherane,
Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
X35 Y983,
Ireland/Irlandi



Mystory.nd@haleon.com

Datum/Päiväys: Juni/Kesäkuu 2023

05NO106 000140

05NO106 000140

OtriBaby

Niistäjä (pehmeä kertakäyttösuutin)

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti, ennen kuin käytät OtriBaby Niistäjää. Jos sinulla on kysymyksiä, käännä lääkäriin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

1. Mikä OtriBaby Niistäjä on ja mihin sitä käytetään

OtriBaby Niistäjä vastasyntyneille, vauvoille ja lapsille.

Niistäjän käyttöä suositellaan, kun lapsen nenä on tukossa ja sitä voidaan käyttää niin usein kuin tarpeellista, erityisesti ennen kuin lapsi syö tai menee nukkumaan.

Tuote on kehitetty avuksi lapsen nenän puhdistamiseen, jotta nenän eritteet voidaan poistaa varovasti.

Helppo ja hygieeninen käyttö.

OtriBaby Niistäjä auttaa lasta hengittämään, syömään, nukkumaan normaalisti ja tuntemaan olonsa paremmaksi.

Kenellä on käyttöä OtriBaby Niistäjälle?

Tämä tuote on tarkoitettu niille, jotka eivät osaa itse niistä ä nenäänsä, kuten vastasyntyneet, vauvat ja lapset. Sinun pitää kuitenkin kysyä neuvoo lääkäriltä, ennen kuin käytät sitä vastasyntyneelle lapselle.

Kuka saa käyttää OtriBaby Niistäjää?

Turvallisuussyistä OtriBaby Niistäjää saa käyttää vanhempi tai huoltaja, joka osaa lukea ja ymmärtää pakkauselosteen, joka erottaa suun, nenän, korvat ja silmät ja ymmärtää perushygieenian käsitteet.

OtriBaby Niistäjän pakkauksessa on mukana kaksi pehmeää kertakäyttösuutinta. Niissä on imukykyinen suodatin, joka varmistaa hygieenian sitomalla nenäeritteen suuttimeen. Kertakäyttösuuttimia on saatavana myös 10 kappaleen täyttöpakkausissa.

2. Ennen kuin käytät OtriBaby Niistäjää

Käytä vain pehmeitä OtriBaby-kertakäyttösuuttimia OtriBaby Niistäjän kanssa. Kysy neuvoo lääkäriltä ennen OtriBaby Niistäjän käyttöä vammaan tai äskettäisen nenäleikkauksen jälkeen.

Tätä tuotetta käytetään, kun lapsi on lepoasennossa. Suukappale on pidettävä tiukasti huulten välissä. Kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista pitää ilmoittaa valmistajalle ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

3. Miten OtriBaby Niistäjää käytetään

Hygieniasyistä ja tartunnan leviämisen vähentämiseksi varmista, että OtriBaby Niistäjän eri osat on koottu oikein, eikä siihen ole liitetty käytettyä kertakäyttösuutinta.

1. Pese kätesi huolellisesti ennen OtriBaby Niistäjän käyttöä.
2. Aseta pehmeä kertakäyttösuutin (A) laitteen (B) keskiosaan. Älä käytä käytettyä kertakäyttösuutinta.
3. Aseta suukappale (C) suuhusi (vanhempi, huoltaja) ja aseta kertakäyttösuuttimen (A) pää lapsen sierainaukkoon. Tuotteen kapasiteetin parantamiseksi suositellaan pitämään toinen sierain suljettuna imemisen ajaksi.
4. Ime varovasti, hitaasti ja tasaisella virtauksella suukappaleen (C) kautta.
5. Jos kertakäyttösuutin täyttyy yhden käytön aikana, älä käytä sitä uudelleen.
6. Toista käsittely toiseen sieraimen.


7. Puhdistusohjeet

Irrota ja heitä pois käytetty kertakäyttösuutin (A). Pyyhi suukappaleen (C) ulkopinta puhtaalla, lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla. Kuivaa suukappaleen ulkopinta liinalla. VAIN, jos limaa tai eritteitä on keskiosan sisällä: Irrota keskiosa (B) muoviletkusta. Huuhtele keskiosa (B) lämpimällä vedellä ja valuta kuivaksi ennen letkun kiinnittämistä takaisin. Varmista, että laite on kuiva ja säilytä se alkuperäispakkauksessa. Pese kätesi huolellisesti.

(A)

(B)

(C)

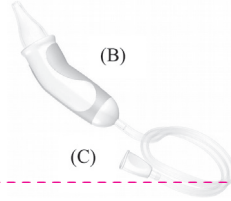

4. Turvallisuustietoja

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen materiaalille (katso Koostumus).

Älä käytä rikkineistä tai vaurioitunutta tuotetta äläkä käytä käytettyä tai vaurioitunutta suutinta, josta puuttuu tai jossa on vaurioitunut suodatin.



Älä käytä rikkineistä tai vaurioitunutta tuotetta.



Varoitus: Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue huolellisesti läpi pakkauksessa olevat käyttöohjeet.



Kertakäyttöinen: Kertakäyttösuuttimia saa käyttää vain kerran. Laitteen muita osia voidaan käyttää uudelleen.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tästä tuotteesta, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

5. Miten OtriBaby Niistäjä säilytetään

Ei saa säilyttää alle 0 °C eikä yli 30 °C lämpötiloissa.

Älä käytä tuotetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Hävittä tuotteen paikallisten vaatimusten mukaisesti ja ota aina huomioon ympäristö.



6. Lisätietoja

Koostumus: Niistäjä: Polypropeeni, styreenietylenibutyleenistyreeni, silikoni. Kertakäyttösuutin: PVC ja melaminivahto. Ei sisällä bisfenoli A:ta.

Sisältö: 1 niistäjä (niistäjän keskiosa, osa B), 1 joustava putki, jossa suukappale (osa C), 2 pehmeää kertakäyttösuutinta (osa A).