



# 歐治鼻海水鼻用噴霧器

Otrivin Sea Water, Nasal Spray

衛部醫器輸字第029223號

本產品含天然、等滲透壓的海水溶液，為清潔及濕潤鼻腔之溫和噴霧器

使用前請詳閱此說明書，若有任何問題，請詢問您的醫師或藥師。

鼻子可溫暖且濕潤所吸入的空氣，還可以過濾空氣中的微小顆粒，保護呼吸道以避免灰塵、外來的刺激及乾燥。因此，保持鼻腔的乾淨與濕潤可以使鼻子充分發揮功能。

## 1. 用途

歐治鼻海水鼻用噴霧器是一種不含防腐劑、天然的等滲透壓的海水溶液。

建議可用於：

- 鼻塞時溫和清潔鼻腔，例如感冒或過敏時，協助將多餘的黏液或過敏原物質沖洗掉，例如灰塵或花粉
- 濕潤鼻腔黏膜。使用於輕微鼻腔不適、或濕度較低的狀況下（例如開空調或暖氣的室內、高緯度、搭乘飛機時）。
- 稀釋鼻腔分泌物，幫助其排除。歐治鼻海水鼻用噴霧器也適用於每日的鼻腔清潔，特別是還不會擤鼻子的幼兒。
- 過多鼻腔分泌物可能會影響幼兒的作息（睡得不好、吃東西有困難）。每日的鼻腔清潔可稀釋鼻腔黏液，並幫助移除過多的鼻腔分泌物，能幫助幼兒再次呼吸順暢並感覺較好。

## 2. 在使用歐治鼻海水鼻用噴霧器之前

⚠ 注意，使用前請詳細閱讀包裝說明書。

若您對本產品中所含之任一成分過敏，請勿使用本產品。（見成分）

⊘ 若本產品破損，請勿使用。請勿放入微波爐。

鼻部手術或鼻部受傷後的使用，使用前請諮詢醫師。

由於本產品具備清潔的特性，應於另一個鼻用（例如感冒用或鼻炎用）產品前使用。歐治鼻海水鼻用噴霧器可於懷孕及哺乳期間使用，使用前請諮詢您的醫師或藥師。

## 3. 如何使用歐治鼻海水鼻用噴霧器

一般使用頻率為每天每鼻孔一至二次。若需要時，可以經常使用本產品，不需特別限制使用次數。

適合嬰兒、兒童及成人使用。然而，二週大以下之嬰兒使用前，應諮詢醫藥專業人員。十一歲以下之兒童應於成人指導下使用。老年人或殘障人

士使用此產品時，可能需要另一成人幫忙。正常使用下，依照建議使用時，歐治鼻海水鼻用噴霧器之耐受性良好。

基於衛生原因及避免汙染，鼻用噴霧器應限一人專用。

- (1) 必要時先將鼻子擤乾淨。
- (2) 使用歐治鼻海水鼻用噴霧器前及之後，將手洗乾淨。
- (3) 取下噴霧器的保護蓋。
- (4) 若久未使用噴霧器，使用前先對空氣噴霧一次。若發現噴嘴堵塞，在熱自來水下清洗並用乾淨紙巾擦乾。
- (5) ※針對無法自行使用之兒童讓小孩躺著、頭側一邊，這樣可以使液體更容易從鼻腔流出 (圖1)  
※針對可以自行使用的兒童和成人將頭往前低下，向一側傾斜，使頭盡可能的水平 (圖2)



(圖1)



(圖2)

- (6) 將噴嘴放入鼻孔上半部並壓下噴霧（二至三秒）。
- (7) 然後將頭傾向另一側，於另一鼻孔重複同樣步驟。
- (8) 讓產品作用數秒，期間請勿擤鼻子，必要時將鼻子擦乾。
- (9) 必要時，將鼻子擤乾淨。
- (10) 每次使用後，將噴嘴於熱自來水下清洗乾淨，用乾淨紙巾擦乾，並將保護蓋蓋回。
- (11) 請用熱水清洗噴頭。請勿使用化學品或洗碗精或消毒劑清洗。請勿使用微波爐。

## 4. 安全事項

警語

內容物加壓：☀ 需遠離陽光直射及溫度超過50℃以上的地方。加壓容器：若加熱可能會爆裂。遠離熱/火星/開放性火焰/熱源。使用中請勿抽菸。

請勿刺穿瓶罐或焚燒，即使產品已使用。  
噴嘴針對成人與兒童設計，符合鼻孔形狀，並設計有安全環以避免兒童因噴嘴插入太深而受傷。  
若有任何進一步對於產品使用的問題，請詢問您的醫師及藥師。

#### 5.如何保存歐治鼻海水鼻用噴霧器

請將產品置於兒童看不到拿不到的地方。  
請勿使用超過包裝上標示保存期限之產品。  
請將噴霧器保存於原產品包裝盒中。  
請將產品置於0~30℃的環境。  
請勿儲存於冰箱。請勿冷凍。

#### 6.其他資訊

成分：海水及純水。不含防腐劑。  
本加壓裝置含有當作惰性推進氣體的氮氣，此推進氣體並未與產品溶液接觸。 規格：50 mL

---

藥商名稱：英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司  
藥商地址：台北市中正區忠孝西路一段66號24樓  
製造廠名稱及地址：Manufactured by SPPH  
(Address: 7 Impasse des Boussebots, F-21800  
Quetigny Cedex, France) for GSK Consumer  
Healthcare SARL (Address: Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH,  
Switzerland)

消費者專線：0800212259



---

Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies.  
©2021 GSK group of companies or its licensor.

TW ANA90GSK026B

